



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Cobi lejringspuder

Til særlige lejringsbehov

Anvendes med fordel til

- Personer med pareser.
- Sclerose patienter.
- Hjerneskadede.
- Demente.
- Neurologiske patienter.
- Smertepatienter.
- Mennesker i palliative forløb.
- Agiterede patienter.

Brugsanvisning



ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 For at sikre korrekt brug af Cobi lejringspuder, skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .

Desuden må lejringspuderne kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i deres brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

Puderne er anvendelige til mange patientgrupper, og særdeles velegnet til lejrning af brugere med blandt andet pareser, sclerose, hjerneskadede, neurologiske patienter, smertepatienter og alvorligt syge patienter, hvor få og selv små bevægelser vil udløse smerter. Fælles for disse grupper af patienter er, at langt de fleste af dem er i høj risiko for at udvikle vævsskade og tryksår.

Puderne fremmer og sikrer den optimale lejrning i sengen på en simpel og effektiv måde. Materialets fleksible sammensætning tilgodeser alle typer af underlag uden at øge risikoen for tryk og shear af huden.

Foruden at kunne afhjælpe tryk og øge trykfordelingen, er puderne særdeles velegnet til brug for nedsættelse af spasticitet, samt giver en taktil stimuli, hvilket er meget relevant for blandt andet demente. Brugeren får en afgrænsende fornemmelse af kroppen, hvilket ofte har en beroligende effekt og øger komforten.

Beskrivelse

Cobi lejringspuder er en serie lejringspuder med et utal af fleksible løsninger. Hver pude kan anvendes til løsninger af forskellige positioneringsproblematikker, afhængigt af den enkeltes konkrete behov.

Puderne er udviklet og produceret med udgangspunkt i de gængse lejringsprincipper og i samarbejde med specialenheder indenfor neurologisk skadede patienter og demente borgere. Fokus har været, at materialets kvalitet skal holde faconen for at skabe stabilitet og samt en stor understøttelsesflade og trykfordeling.

Cobi lejringspuder er universale med flere funktioner i én og samme pude, hvilket giver dem store anvendelsesmuligheder og fleksibilitet. Stabiliteten gør dem nemme at anvende og sikrer en stabil og hensigtsmæssig lejrning.

Stor tyngde og anatomisk design

I designet af Cobi lejringspuder, har vi lagt stor vægt på, at puderne er meget kropsnære og kan komme tæt på brugeren.

Der er en stor tyngde i puderne, så de bliver, hvor de bliver positioneret og støtter op, så lejrningen af brugeren forbliver stabil.

Puderne er lufttætte og fyldt med små Krøyer kugler, granulater og vægtfylde, hvilket sikrer, at stillingen holdes og puderne ikke ændrer facon. Der fås 2 typer betræk, et hygiejnebetræk og et ekstra blødt jerseybetræk. Hygiejnebetrækket er et utroligt strækbart PU materiale, antibakterielt forseglet, som gør det ekstra modstandsdygtigt og uigennemtrængeligt for bakterier, og derfor meget hygiejnisk i brug. Betrækket er endvidere åndbart, strækbart og brandhæmmende. Jerseybetrækket er ekstra blødt stof, som er strækbart.

Før brug

Forebyggelse af liggesår


Følgende illustrationer viser, hvordan lejringspuderne kan anvendes til at forebygge liggesår forskellige steder på kroppen.

Direkte kontakt med det udsatte hudområde udgør ingen risiko for brugeren.


Cobi Rehab lejringspuder kan bruges i mange sammenhæng og i mange forskellige lejringsituationer. Her er overordnede forslag til brug af lejringspuderne.

Under brug

Puderne kan anvendes med eller uden betræk for komfortenssyn.

 Undersøg jævnligt lejringspuderne for at sikre at de ikke er beskadigede eller defekte.

Cobi lejringspuder

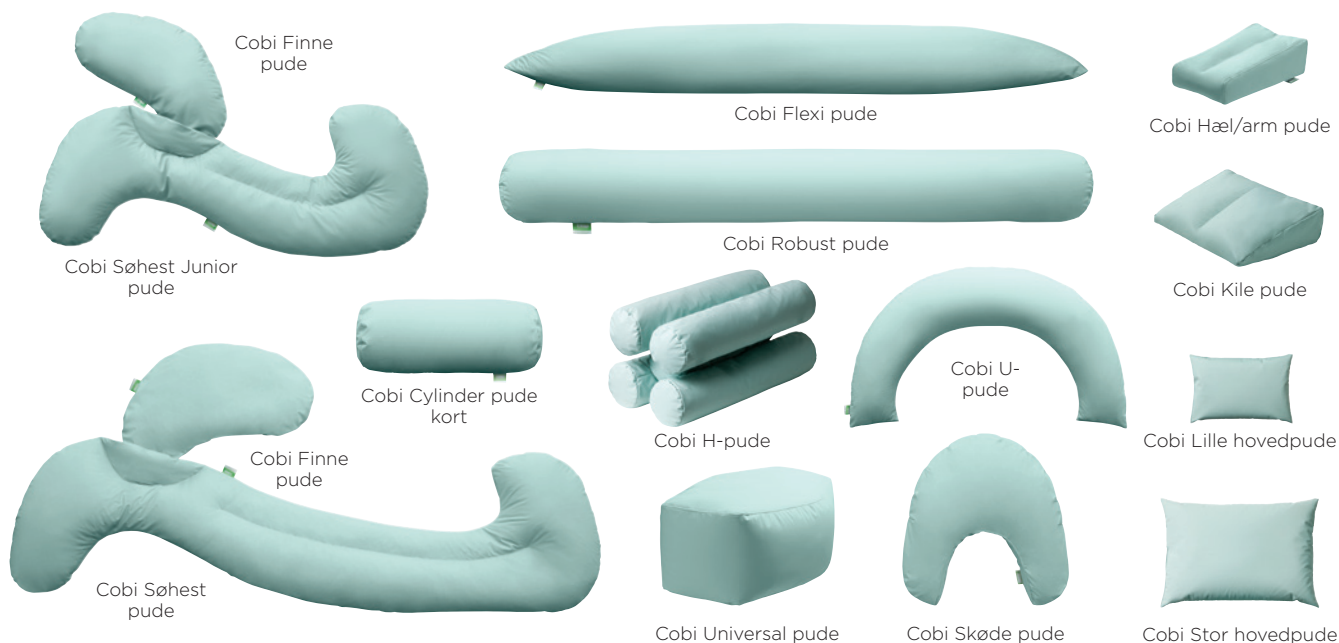

Cobi Søhest pude / Cobi Søhest Junior pude

Den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter for en god sidelejrning er samlet i én og samme pude. Cobi Søhest pude kan også anvendes med Cobi Finne pude, som gør front lejrning exceptionel.

Cobi Finne pude

Cobi Finne pude er ekstra tilbehør til Cobi Søhest pude og kan anvendes til at give yderligere aflastning og kan positionere ankel og hæl.

Cobi Flexi pude

På grund af sin opbygning, er denne pude særlig velegnet til at give brugeren en god kropstøtte. Den kan også bruges som U-pude og enderne er syet i spids, så den er mere kropsnær ved Semi-Fowler liggestilling. Puden kan også placeres bag, foran eller rundt om brugeren.

Cobi Robust pude

Denne cylinderpude er 200 cm lang og 28 cm bred og har ekstra tyngde, hvilket gør puden særlig velegnet til en tæt lejrning som Semi-Fowler liggestilling, eller ved 135° sideliggende/delvis bugleje. Puden kan også med fordel bruges til agiterede patienter, som har behov for øget taktile stimuli og proceceptiv afgrænsning.

Cobi H-pude

Cobi H-pude er en lejringspude, der kan anvendes på et utal af måder. I sidelejrning positioneres hofteleddet i neutral stilling og er særligt velegnet til hofteopererede, spastikere m.fl. Når Cobi H-puden anvendes rygliggende, positioneres hofteleddet i fleksion og benene lejrres støttet og stabilt. Puden kan desuden bruges i trænings- og behandlingsseancer.

Cobi Cylinder pude kort

Knæ- og hasepude, som er uundværlig, når der skal lejrres i Semi-Fowler liggestilling og ved fleksion af knæet. Puden kan også anvendes ved sidelejrning, som stabilitet til knæene.

Cobi Lille hovedpude

Denne pude kan anvendes til mange formål, når der i positioneringen skal udfyldes små hulrum. Puden giver den optimale understøttelse. Cobi Lille hovedpude kan desuden anvendes til at forebygge tryksår mellem knæene eller give optimal hovedpositionering.

Cobi Stor hovedpude

Cobi Stor hovedpude kan anvendes til rygstøtte, når man lejrer i Semi-Fowler liggestilling. Ved anvendelse til positionering af hovedet til neutral nakkestilling giver puden en utrolig god støtte og komfort, og giver et godt stabilt hold. Ved anvendelse under læggene i rygliggende stilling, giver puden god trykaflastning til hæle og et stabilt hold.

Cobi Hæl/arm pude

Puden anvendes til at elevere hælen fra madrassen ved behandling af tryksår. Puden kan også anvendes, hvor hele underbenet eleveres for at undgå ødemdannelser. Derudover kan puden anvendes til at lejre en hemiplegisk arm eller til brugere med nedsat tonus.

Cobi Kile pude

Kile puden er udformet som en trekantet pude, og kan benyttes til fleksible formål, som f.eks. stabilisering både foran og bag ryggen i sideleje for at give et fast hold. Ved brug af Cobi Kile pude foran kroppen, får øverste arm og skulder ligeledes en god understøttelse i neutral stilling. I rygleje kan Cobi Kile pude benyttes til at understøtte under haserne, læg og lår.

Cobi U-pude (rede med flex arme)

På grund af sin U-form er denne pude særlig velegnet til at give brugeren en god kropstøtte. Puden kan enten placeres bag, foran eller rundt om brugeren. Kropstøttepuden er en af grundstenene i Semi-Fowler liggestilling.

Cobi Skøde pude

Denne pude kan med fordel anvendes i den siddende stilling, hvor den urolige bruger kan have god gavn af at have "katten i sin favn". Skaber ro og afgrænsning. Puden kan desuden bruges til lejrning af hovedet samt skabe stabilitet og lårstyr i den siddende stilling i sengen under lårene.

Cobi Universal pude



Denne pude anvendes til at sikre hofte abduction, og til at mindske risikoen ved hofte dislokation, når en bruger vendes fra ryg til sidelejrning. Derudover er puden særlig velegnet til understøttelse af arm/skulder og forebyggelse af ødemdannelse.

⚠ Vær opmærksom på brugers diagnose og stadie i sygdommen.

Eksempler på lejrning/brug af Cobi lejringspuder



med Cobi Finne pude mellem knæ

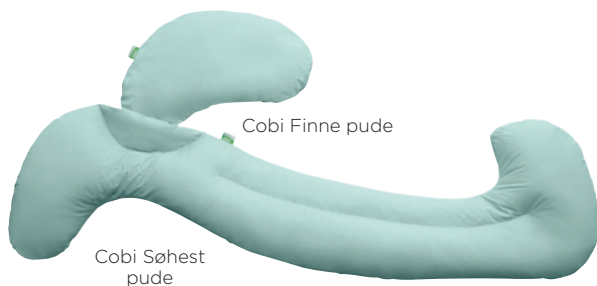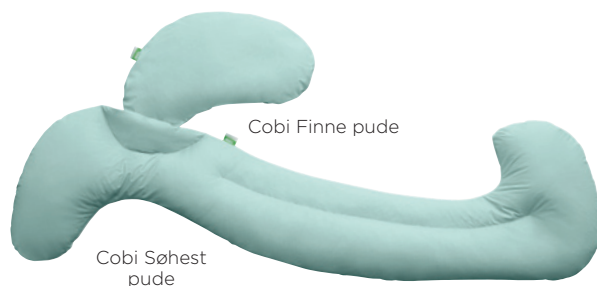

Eksempler på lejring/brug af Cobi lejringspuder



Cobi U-pude - under overkrop
Cobi Skøde pude - under hovede
Cobi Cylinder pude - under knæ
Cobi Finne pude - under underben



Cobi U-pude



Cobi Skøde pude



Cobi Cylinder pude kort



Cobi Finne pude



Cobi Skøde pude

Eksempler på lejrning/brug af Cobi lejringspuder



Cobi Hæl/arm pude



Cobi Universal pude

Vedligeholdelse og rengøring

Daglige rengøringer kan udføres med desinfektions midler og vand samt en ren og tør klud. Alle ikke-phenolholdige midler kan bruges.

Lejringspuderne kan evt. desinficeres med Virkon fra Kebo- Med hvis der er spor af blod, urin eller andre kropsvæsker.

Af hygiejnebetrækket

Kan maskinvaskes ved 60°.

Af jerseybetrækket

Kan maskinvaskes ved 40°.

Af puderne

- ⚠ Kan ikke maskinvaskes eller rengøres ved kemisk rensning.
- ⚠ Kan ikke stryges.
- ⚠ Brug ikke pulverformede skuremidler, opløsningsmidler eller ridsende og skarpe genstande direkte på betrækket.
- ⚠ Skal tørres ved nedsat varme.
- ⚠ Må ikke tørretumbles.
- ⚠ Klorholdige midler skal undgås (1 volumen klor i 200 volumen vand).
- ⚠ Der skal foretages en visuel kontrol af puderne en til flere gange om året for at sikre, at de er i god stand. Hvis der konstateres en forandring af puderne eller af sammenføjningerne, skal produktet fjernes og bortskaffes.
- ⚠ Puderne må ikke opbevares i direkte sollys eller udsættes for kraftig fugt.

Specifikationer

Kuglemateriale	Ekspanderet polystyren
Kuglestørrelse	Ca. 3 mm
Pudeoverflade	Polyester, polyuretan polycarbonat
Hygiejnebetræk	Polyester, polyuretan polycarbonat
Jerseybetræk	100% bomuld
Rengøring	Begge pudebetræk er vaskbare. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 18 12 15 - 09

Scan koden og få flere produktinformationer.



Garanti

Garantiperioden for Cobi lejringspuder er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



FORHANDLER / PRODUCENT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com