



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Kelvin kugle/skummadras

En stabil, tonusdæmpende og tryksårsforebyggende helmadras

Anvendes med fordel til

- Hjerneskadede.
- Alzheimer patienter.
- Smertepatienter.
- Brugere, der har brug for trykaflastning, og som samtidig har brug for et fast underlag.
- Til brugere med sansemotoriske problemer.
- Til brugere med frakturer.
- Til nyopererede, som har brug for en stabil ligestilling.
- Til brugere med perceptionsforstyrrelser.
- Brugere, der har gavn af kugledyne, men som også har brug for en trykaflastende liggeflade.

30-110 kg

Brugsanvisning



! ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af Kelvin kugle/skummadras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

Kelvin madrassen kan med fordel anvendes i hjemmet, på institutioner og på plejehjem.

Kelvin madrassen er en stabil, tonusdæmpende og tryksårsforebyggende helmadrass, udviklet til urolige brugere eller brugere, der har brug for specifik lejring samt til forebyggelse og behandling af tryksår op til tryksår stadie 4.

Med Kelvin madrassen er det muligt at opnå en meget dyb lejring, som sikrer en optimal trykfordeling over hele liggefladen. Derudover er der mulighed for at lave mikro positionering og lejring i madrassen uden brug af andre hjælpemidler.

Anvendelig til brugervægt 30-110 kg.

⚠ Hvis brugere vejer mere end 110 kg er der risiko for at madrassen vil gå i stykker eller tage skade.

Sikkerhedsvejledninger / kontraindikationer

⚠ Før anvendelse af madrassen skal ISU betrækket kontrolleres for skader som huller.

⚠ For brugere, der ikke kan temperaturregulere, bør Kelvin madrassen kun anvendes efter lægelig vurdering og under periodisk overvågning af plejepersonale. Der kendes ikke til andre kontraindikationer.

⚠ For optimal brug af madrassen skal brugeren repositioneres regelmæssigt.

Beskrivelse

Det øverste lag i Kelvin madrassen er et ISU betræk fyldt med små Krøjer kugler. Betrækket er syet i kanaler, som er strækbart lateralt. Dette lag kan formes efter bruger, så han/hun får den optimale støtte og trykaflastning. ISU laget er lagt i en skumramme for at sikre stabilitet, når bruger sidder på kanten af sengen.

Under ISU laget er der en skummadras, som er forsynet med et midterlag med perforeringer for at sikre en optimal ventilation af madrassen.

Beskrivelse af betræk

Strækbart, åndbart og inkontinens betræk med orange top og grå bund.

⚠ Folderne i betrækket er tilsigtet for at muliggøre, at bruger kan synke ned i madrassen på et stort område uden at der opstår shear.



Før brug

Læs disse vigtige bemærkninger om håndtering før Kelvin kugle/skummadrassen tages i brug.

⚠ Brug lagen på madrassen. Lagnet skal være strækbart og ikke sidde for stramt.

⚠ Brug af ekstra inkontinens betræk/ekstra vendesystem ovenpå madrassen kan nedsætte effekten af madrassen.

⚠ Hvis der er huller i betrækket eller ISU betrækket kontakt forhandleren med det samme.


⚠ Vær forsigtig med skarpe eller spidse genstande, der kan beskadige betrækket.

Under brug


Glat ISU betrækket sideværts med hænderne en gang om dagen.

For at gøre det, skal fyldet trækkes fra kanten til midten af madrassen (figur 1), eller fyldet skal skubbes ind i midten (figur 2).

Figur 1

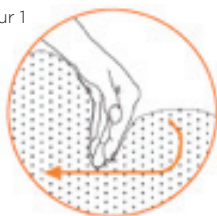

Figur 2

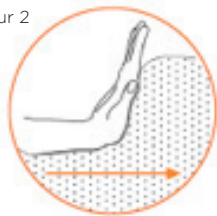

Fordybning-lejring

I tilfælde af præ-eksisterende tryksår, anbefales det at etablere en fordybnings-lejring ved at flytte fyldet i madrassen. Skab en fordybning med hånden under det punkt, hvor trykaflastningen ønskes. Hvis brugeren er repositioneret udjævn fordybningen.

Mikro positionering

Mikro positionering er baseret på den antagelse, at det at flytte en lille del af kroppen er tilstrækkeligt til at ændre på trykfordelingen af hele kroppen. Mikro positionering kan udføres uden yderligere hjælpemidler ved at omfordele fyldet.

⚠ Undersøg jævnligt madrassen for at sikre at den ikke er beskadiget eller defekt.

Specifikationer

Brugervægt	30-110 kg
Længde	200 cm
Bredde	85 cm
Højde	15 cm
Madrassens vægt	13 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårforebyggende stadie	Op til stadie 4
Betræk: Orange top	44% polyamid, 56% polyuretan
Betræk: Grå bund	54% polyester, 46% polyuretan
ISU betræk	Polyamid stof, ekspanderet polystyren perler og polyester fibre
Skummadras	Polyuretanskum, polyesterfibre
ISO - klassifikation	ISO 04 33 06 - 02



Scan koden og få flere produktinformationer.

HM00070174 fra hmsid.com.dk

Vedligeholdelse og rengøring

Af betrækkene

Betrækkene er aftagelige med lynlås og kan vaskes. Når madrassen er i brug, anbefaler vi jævnlig vask af betrækket med orange top for at sikre god hygiejne.

- Betrækket med orange top kan maskinvaskes ved op til 60° C. Betrækket kan aftørres med almindelige rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Aftørningsdesinfektion er også mulig.
- Betrækket med grå bund maskinvaskes ved op til 60° C.
- ISU betrækket kan maskinvaskes ved op til 60° C. Anvend vaskepose.

⚠ Brug ikke desinfektionsmidler, der indeholder acetone og / eller klor.

Af skummadrasen

For hver ny bruger, skal skummadrasen desinficeres (autoklaveres).

⚠ ISU betrækket skal inspiceres efter hver vask.

⚠ ISU betrækket må ikke vaskes mere end otte gange, herefter skal det udskiftes.

⚠ Hvis et af betrækkene er beskadiget må bruger ikke anvende madrassen, før betrækket er udskiftet.

Garanti

Garantiperioden for Kelvin kugle/skummadras er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret. Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.

PRODUCENT

OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Tyskland

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com