

Bariatri

Kørestole, puder og stole

*Positioneringsløsninger til svært overvægtige
alle døgnets timer*



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



XXL-Rehab Minimaxx kørestol

Sammenklappelig kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere

Stærk konstruktion og funktionelt design specielt udviklet til bariatriske brugere.

Idé og konstruktion

Vores mål med XXL-Rehab Minimaxx var at designe en stol med meget lav egenvægt og stor vægtkapacitet. Samtidig skulle den være let at manøvrere og selvfølgelig sammenklappelig.

Vi har anvendt en rør-teknologi med lette rør, der også anvendes til MTB cykler og landevejscyklar. Derfor vejer XXL-Rehab Minimaxx kørestolen kun ca. 9% af dens egen vægtkapacitet. For- og baghjulenes placering bevirker, at stolen er let at køre, og baghjulene bærer størstedelen af brugerens vægt, hvilket gør det meget nemmere for brugeren at skubbe stolen. Desuden sidder forhjulene længere fremme end på standard stole, hvilket forhindrer stolen i at tippe.

Den lave sædehøjde gør det nemt at få adgang til stolen og samtidig drive stolen frem.

De højdejusterbare skubbehåndtag er designet, så hjælperen nemt kan bruge sin krop til at dreje og skubbe stolen. De polstrede håndtag har en vinkel, som lægger mindst muligt pres på håndled og skuldre.

Foldemekanisme

XXL-Rehab Minimaxx kørestolen er let at klappe sammen og transportere. Foldemekanismen er nem at aktivere og giver samtidig stor støtte til sædet. Foldemekanismens design gør stolen stiv, og når stolen er foldet ud, er den også langt mere stabil end andre sammenklappelige stole. De meget lange armlæn gør det nemt for brugeren at komme ind og ud af stolen.

Skivebremser

XXL-Rehab Minimaxx kan også leveres med skivebremser, så der kun skal få kræfter til at bremse stolen - selv med fuld last. På skivebremserne er der også tilføjet en parkeringsbremse, og stolen har som standard også hjullås.

Armlæn

Ud over de aftagelige standard armlæn kan XXL-Rehab Minimaxx også monteres med sports armlæn.

Fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er endvidere indstillelige i både højden og bredden. Fodstøtterne kan derfor tilpasses brugere med forskellig benstilling.

- Sammenklappelig
- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Justerbar stroptryk
- Skivebremser som tilvalg
- Højde- og breddeindstillelige fodstøtter
- Flere typer armlæn

MAX 325 kg



Produkt video
Scan koden og se produktet i brug



Standard armlæn



Sports armlæn



Sports armlæn set fra siden



Sammenklappet

XXL-Rehab Minimaxx kørestol

Specifikationer

XXL-Rehab Minimaxx kørestol	
Brugervægt max.	325 kg
Total bredde	80 / 85 / 90 / 95 cm
Total bredde foldet	41 cm
Total højde uden skubbehåndtag	103 cm
Total højde med skubbehåndtag, laveste position	110 cm
Total længde uden fodstøtter	70 cm
Sædebredde	56 / 61 / 66 / 71 cm
Sædedybde	46 cm
Sædehøjde	43 cm
Ryghøjde	51 cm
Armlæn svingbare og aftagelige	Ja
Fodstøtter højdejusterbare	Ja
Fodstøtter svingbare og aftagelige	Ja
Vægt	Ca. 27 kg
Betjening	Manuel
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Sort
Farve stel	Sølvmetallic
Skubbehåndtag højdejusterbare	Ja
Drivhjul quick release	Ja
Balancepunkt indstilleligt	Ja
Sammenklappelig	Ja
Fast sæde	Ja
Stel	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Drivhjul	24" alu med massive PU dæk
Svinghjul	125 mm nylon med PU
Sæde/ryg	Polyester/nylon
Armlæn	Polyuretan
Fodplader	Rustfrit stål med gummibelægning
ISO - klassifikation	ISO 12 22 03 - 08



Hjælperbetjent håndbremse



Ittflaskeholder med dropstativ



Sports armlæn



Bord



Skivebremse

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitaler.
- Plejeboliger.
- Hjemmet.

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter	56	46	0100-056-000	54891
XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter	61	46	0100-061-000	53978
XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter	66	46	0100-066-000	54788
XXL-Rehab Minimaxx Standard inklusive fodstøtter	71	46	0100-071-000	54789
XXL-Rehab Minimaxx med skivebremsen inklusive fodstøtter	56	46	0109-056-000	54891
XXL-Rehab Minimaxx med skivebremsen inklusive fodstøtter	61	46	0109-061-000	53978
XXL-Rehab Minimaxx med skivebremsen inklusive fodstøtter	66	46	0109-066-000	54788
XXL-Rehab Minimaxx med skivebremsen inklusive fodstøtter	71	46	0109-071-000	54789

Tilbehør

Sports armlæn sæt	0100-999-006
Bord universal	0100-999-001
Ittflaskeholder Ø10 cm og dropstativ	0100-999-020
Fodstøtte standard justerbar højre	0100-999-010
Fodstøtte standard justerbar venstre	0100-999-011



XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol

Med hjælpemotor

Stærk og funktionel kørestol med hjælpemotor specielt udviklet til bariatriske brugere.

Hjælpemotor

XXL-Rehab Minimaxx med hjælpemotor og skivebremser er en stærk kørestol, der hjælper plejepersonalet med at køre stolen uden nogen anstrengelser. Nu er det nemt at hjælpe en bariatrisk patient omkring. XXL-Rehab Minimaxx med hjælpemotor medvirker til, at plejepersonalet kan undgå ømme skuldre og belastning på håndleddene.

Selv på skrå underlag med stigninger på op til 5% er det nemt at komme over toppen. Ned ad bakke yder skivebremssystemet stor grad af sikkerhed. Hvis der er behov for en øjeblikkelig standsning, skal håndtaget bare trækkes, og kørestolen stopper med det samme.

Betjening

Hjælpemotoren er nem at betjene. Kontrolpanelet er placeret på håndtaget og har Drive/Kør og Reverse/Bak funktioner samt hastighedsregulering på 1-5 km/t.

Konstruktion

Hvad angår konstruktionen af kørestolen var STW (Stiffness To Weight) vores mål. Vi har anvendt en rør-teknologi med lette rør, der også bruges på MTB cykler og landevejscykler. XXL-Rehab Minimaxx kørestol vejer derfor kun ca. 9% af dens vægtpacitet og er stadig nem at køre.

Desuden sidder forhjulene længere fremme end på standard stole. Dette forhindrer stolen i at tippe. De meget lange armlæn gør det nemt for brugeren at komme ind og ud af stolen, og den lave sædehøjde gør det nemt at få adgang til stolen.

Armlæn

Ud over de aftagelige standard armlæn kan XXL-Rehab Minimaxx også monteres med sports armlæn.

Fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er endvidere indstillelige i både højden og bredden. Fodstøtterne kan derfor tilpasses brugere med forskellig benstilling.

MAX 325 kg



Hjælpemotor

- Hjælpemotor
- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Justerbar stropryg
- Skivebremser er inklusive
- Højde- og breddeindstillelige fodstøtter
- Flere typer armlæn



Standard armlæn



Sports armlæn



Sports armlæn set fra siden

XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol

Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitaler.
- Plejeboliger.
- Hjemmet.



Skivebremse



Bord



Hjælperbetjent håndbremse



Ittflaskeholder med dropstativ



Sports armlæn

XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol	
Brugervægt max.	325 kg
Total bredde	80 / 85 / 90 / 95 cm
Total højde uden skubbehåndtag	103 cm
Total højde med skubbehåndtag, laveste position	110 cm
Total længde uden fodstøtter	70 cm
Sædebredde	56 / 61 / 66 / 71 cm
Sædedybde	46 cm
Sædehøjde	43 cm
Ryghøjde	51 cm
Armlæn svingbare og aftagelige	Ja
Fodstøtter højdejusterbare	Ja
Fodstøtter svingbare og aftagelige	Ja
Vægt	Ca. 27 kg
Vægt hjælpemotor	23 kg
Vægt batteri	9 kg
Betjening	Manuel
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Sort
Farve stel	Sølvmetallic

Skubbehåndtag højdejusterbare	Ja
Drivhjul quick release	Ja
Balancepunkt indstilleligt	Ja
Sammenklappelig	Ja
Fast sæde	Ja
Rækkevidde pr. opladning	4,5 km
Hastighed max.	5 km/t
Stigeevne	5°
Forcerer forhindringer på max.	4 cm
Stel	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Drivhjul	24" alu med massive PU dæk
Svinghjul	125 mm nylon/PU
Sæde/ryg	Polyester/nylon
Armlæn	Polyuretan
Fodplader	Rustfrit stål med gummibelægning
Motor	24V 450W 4,5 amp.
Batterikapacitet	2 stk. 12V 12Ah
Lader	Off-board, 1,8 amp.
Hjul på motorenhed	50 mm x 200 mm (massive dæk) x 2
ISO - klassifikation	ISO 12 23 12 - 02

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	56	46	0110-056-000	62394
XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	61	46	0110-061-000	64996
XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	66	46	0110-066-000	64998
XXL-Rehab Minimaxx Push, skivebremser og fodstøtter	71	46	0110-071-000	64999

Tilbehør			
Sports armlæn sæt			0100-999-006
Bord universal			0100-999-001
Ittflaskeholder Ø10 cm og dropstativ			0100-999-020
Fodstøtte standard justerbar højre			0100-999-010
Fodstøtte standard justerbar venstre			0100-999-011



XXL-Rehab Eclipse kørestol

Stærk og funktionel kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere op til 270 kg

XXL-Rehab Eclipse er en enestående manuel kørestol, hvis konstruktion og indstillingsmuligheder er unikke for den bariatriske brugers behov og kropsbygning.

Konstruktion

XXL-Rehab Eclipse er en manuel fastramme kørestol, som er opbygget med en ultrastærk stålramme, som giver maksimal styrke, stivhed og lang holdbarhed. Den er designet, så den største del af brugerens vægt hviler på baghjulene. Dækkene er specielt fremstillet og er ekstra hårde og massive, hvilket gør fremdrift og styring utrolig let. De fremskudte forhjul har anti-tip funktion, og gør det muligt for brugeren at komme ind og ud af kørestolen uden risiko for at vælte. Sædebunden er stærk og massiv, og giver brugeren mulighed for et godt afsæt fra stolen.

Kan "vokse" med opgaven

XXL-Rehab Eclipse kan blive større eller mindre i sædebredden med montering af Eclipse Grow-kit og kan derfor følge brugeren ved vægtøgning eller vægttab. Denne ombygningsmulighed giver stolen god genbrugsværdi, da den derved også kan ombygges til en anden bruger. Stolen kan også forstærkes til en brugervægt op til 450 kg. Til det formål kan stolen leveres med stærke, hjælperbetjente skivebremser.

Tilpasningsmuligheder

XXL-Rehab Eclipse kan monteres med forskellige løsninger, hvad angår rygsystemer for at tilgodese de forskellige kropsformers behov. Bælteryggen er konstrueret, således at brugere med en fremspringende bagdel får god lændestøtte - et over-set problem, der sjældent imødekommes i andre stole.

Den har justerbar sædedybde, sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store tilpasningsmuligheder til den enkelte bruger. Eclipse leveres som standard med swing-away fodstøtter, men kan også leveres med eleverbare benstøtter med lægpuder.

Armlæne leveres i 2 modeller; en standard og en forlænget udgave. De forlængede armlæn gør det nemmere for selvhjulpne brugere at sætte sig og rejse sig fra stolen.

Alle disse indstillingsmuligheder imødekommer behovene fra forskellige bariatriske kropstyper, og giver brugeren en mulighed for selv aktivt at fremdrive stolen, at komme ind og ud af stolen og måske også gå stolen frem.

XXL-Rehab Eclipse kan anvendes med forskellige typer sædepuder.

MAX 270 kg / MAX 450 kg



- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Forskellige typer rygge
- Mulighed for 30° hydraulisk nedfældbar ryg
- Skivebremser som tilvalg
- Flere typer fodstøtter
- Flere typer armlæn
- Brugervægt op til 270 kg
- Kan forstærkes op til 450 kg
- Muligt at tilpasse stolen efter kropsformens ressourcer og behov



30° hydraulisk nedfældbar ryg

XXL-Rehab Eclipse kørestol

Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitaler.
- Plejeboliger.
- Hjemmet.

XXL-Rehab Eclipse kørestol	
Brugervægt max.	270 / 450 kg
Total bredde	Sædebredde + 18 cm
Total længde uden fodstøtter	87 cm
Sædebredde	50 / 55 / 58 / 61 / 66 / 72 / 76 / 82 / 92 / 102 / 112 cm
Sædedybde	41-56 cm
Sædehøjde	36-51 cm
Ryglænsenhøjde	65-75 cm
Rygvinkel indstillelig	Ja
Armlænsenhøjde indstillelig	Ja
Armlæn aftagelige	Ja
Fodstøtter højdejusterbare	Ja
Fodstøtter opklappelige/aftagelige	Ja
Vægt	Ca. 30 kg

Betjening	Manuel
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Sort
Farve stel	Rød
Skubbebøjle	Ja
Drivhjul quick release	Ja
Balancepunkt indstilleligt	Ja
Fast sæde	Ja
Stel	Pulverlakeret stål
Drivhjul	24" massive PU dæk
Svinghjul	125 mm nylon med PU
Sæde/ryg	Polyester/nylon
Armlæn	Polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 12 22 03 - 08

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	50	41-56	0120-050-000	73128
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	55	41-56	0120-055-000	73129
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	58	41-56	0120-058-000	107981
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	61	41-56	0120-061-000	73130
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	66	41-56	0120-066-000	73131
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	72	41-56	0120-072-000	73132
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	76	41-56	0120-076-000	73133
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	82	41-56	0120-082-000	73134
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	92	41-56	0120-092-000	73135
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	102	41-56	0120-102-000	102184
XXL-Rehab Eclipse eksklusiv standard fodstøtter	112	41-56	0120-112-000	73136

Tilbehør	Varenummer
Itflaskeholder Ø10 cm	0120-999-021
IV holder (dropstativ)	0120-999-020
Nakkestøtte	0121-999-010
Bord universal (til sædebredde 55-72 cm)	0100-999-001
Skivebremser	0120-999-022
Grow-kit	0120-999-030
Forstærkning til Eclipse til 450 kg brugervægt	0120-999-010
30° hydraulisk nedfældbar ryg	0120-999-032
Rygforlængelse	0120-999-033
Armlæn forlænget højre	0120-999-078
Armlæn forlænget venstre	0120-999-077
Fodstøtte standard swing-away højre	0120-999-008
Fodstøtte standard swing-away venstre	0120-999-009
Benstøtte eleverbar højre	0120-999-006
Benstøtte eleverbar venstre	0120-999-007
Beslag til biltransport	0120-999-065



Skivebremser



XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol

Stærk og funktionel kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Eclipse Tilt har en tiltfunktion op til 30°, som sikrer optimal komfort og positionering af brugeren, der har brug for mere støtte. Stolen kan nemt tilte med brugere op til 270 kg.

Konstruktion

XXL-Rehab Eclipse Tilt er en manuel fastramme kørestol med tiltmekanisme, som er opbygget med en ultrastærk stålramme, som giver maksimal styrke, stivhed og lang holdbarhed. Den er designet, så den største del af brugerens vægt hviler på baghjulene. Dækkene er specielt fremstillet og er ekstra hårde og massive, hvilket gør fremdrift og styring utrolig let. De fremskudte forhjul har anti-tip funktion, og gør det muligt for brugeren at komme ind og ud af kørestolen uden risiko for at stolen tipper. Sædebunden er stærk og massiv og giver brugeren mulighed for et godt afsæt fra stolen samt en god kropsholdning.

Tilpasningsmuligheder

XXL-Rehab Eclipse Tilt har justerbar sædedybde, sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store tilpasningsmuligheder til den enkelte bruger.

Armlænene leveres i 2 modeller; en standard og en forlænget udgave, som letter ind- og udstigning af stolen. Alle disse indstillingsmuligheder imødekommer behovene fra forskellige bariatriske kropstyper og giver brugeren en mulighed for selv aktivt at fremdrive stolen, at komme ind og ud af stolen og måske også gå stolen frem.

XXL-Rehab Eclipse Tilt kan anvendes med forskellige typer sædepuder.

MAX 270 kg

- 30° tiltfunktion
- Stærk konstruktion
- Flere bredder
- Justerbar stropryg
- Flere typer fodstøtter
- Flere typer armlæn



XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol

Specifikationer

XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol	
Brugervægt max.	270 kg
Total bredde	Sædebredde + 25 cm
Total længde uden fodstøtter	87 cm
Sædebredde	50 / 55 / 61 / 66 / 72 / 76 / 82 cm
Sædedybde	41-56 cm
Sædehøjde	41-51 cm
Ryglænsenhøjde	65-75 cm
Rygvinkel indstillelig	Ja
Armlænsenhøjde indstillelig	29-34 cm
Armlæn aftagelige	Ja
Fodstøtter højdejusterbare	Ja
Fodstøtter opklappelige/aftagelige	Ja
Vægt	Ca. 32 kg
Betjening	Manuel
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Sort
Farve stel	Blå
Skubbebøjle	Ja
Drivhjul quick release	Ja
Balancepunkt indstilleligt	Ja
Fast sæde	Ja
Stel	Pulverlakeret stål
Drivhjul	24" massive PU dæk
Svinghjul	125 mm nylon med PU
Sæde/ryg	Polyester/nylon
Armlæn	Polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 12 22 03 - 08

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Hospitaler.
- Plejeboliger.
- Hjemmet.



Fjeder
støddæmper

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter	50	41-56	0121-050-000	54758
XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter	55	41-56	0121-055-000	54760
XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter	61	41-56	0121-061-000	54761
XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter	66	41-56	0121-066-000	54763
XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter	72	41-56	0121-072-000	54764
XXL-Rehab Eclipse Tilt eksklusive fodstøtter	82	41-56	0121-082-000	54765

Tilbehør	Varenummer
Ilflaskeholder Ø10 cm	0120-999-021
IV holder (dropstativ)	0120-999-020
Bord universal (til sædebredde 55-72 cm)	0100-999-001
Nakkestøtte justerbar	0121-999-010
Rygforlængelse til Eclipse tillæg	0120-999-033
Armlæn forlænget højre	0120-999-078
Armlæn forlænget venstre	0120-999-077

Tilbehør	Varenummer
Beslag til biltransport	0120-999-065
Fodstøtte swing-away højre	0120-999-008
Fodstøtte swing-away venstre	0120-999-009
Benstøtte eleverbar højre	0120-999-006
Benstøtte eleverbar venstre	0120-999-007



XXL-Rehab HD elektrisk kørestol

Stærk og funktionel kørestol specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er det oplagte valg til bariatriske brugere. Kørestolen har både en forstærket ramme og kraftige, lydsvage dobbelte motorer, der tilsammen giver en maksimal holdbarhed til brugere op til 295 kg.

Uovertrufne køreegenskaber

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er både pålidelig og sikker at køre. Centerdrevet giver en uovertruffen manøvreedygtighed med en minimal venderadius, da stolen drejer om sin egen midterakse. Sammen med den lille udvendige bredde, er den let at manøvrere omkring både ude i nærområdet og inde i egen bolig. De 16" drivhjul, 9" drejhjul og solide fjedre på de forreste anti-tip hjul giver tilsammen stor stabilitet. Derudover er den udstyret med elektroniske regenerative skivebremser og en topfart på 8 km/t.

Sædesystem

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er konstrueret til stor brugervægt. Kørestolen er udstyret med sædesystemet "Synergy", der kan indstilles både i sædebredden og i sædedybden, så den kan "vokse med opgaven". Det er også muligt at indstille sædehøjde og sædevinkel manuelt.

Armlænene er højdejusterbare, og der er flere valgmuligheder inden for sædepuder, så brugeren kan få den helt rigtige aflastning.

Joystiksbetjening

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol er nem at betjene med det overskuelige joystick, som er placeret lige ved hånden i højre eller venstre side. Joysticket kan også monteres med et "swing away" beslag, så det er muligt at køre stolen helt ind til for eksempel et spisebord.

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol kan anvendes med forskellige typer sædepuder.

- Justerbar sædebredde og sædedybde
- Uovertruffen manøvreedygtighed
- Minimal venderadius med centerdrevet
- Højdejusterbare armlæn
- Stærke fodstøtter
- Beslag for fastspænding i bil

MAX 295 kg




XXL-Rehab HD elektrisk kørestol

Specifikationer

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol	
Brugervægt max.	295 kg
Total længde med fodstøtter	130 cm
Total bredde	78 cm
Sædebredde	61-71 cm
Sædedybde	30-55 cm
Sædetilt manuelt bagud	5°
Bredde mellem armlæn	61-71 cm
Sædehøjde uden sædepude manuel justerbar	46-51 cm
Højde sæde til armlæn	Justerbar
Vægt med sæde og batterier	Ca. 165 kg
Frihøjde	10 cm
Armlæn højdejusterbare	Ja
Fodstøtter justerbare	36-43,5 cm
Fodstøtter opklappelige	Ja
Fodstøtter aftagelige	Ja
Fodstøtter højdeindstillelige	Ja
Nakkestøtte	Ja
Betjening	Via joystick
Hastighed max.	8 km/t
Kapacitet op/ned ved fuld opladet batteri	Ca. 24 km
Venderadius	131 cm
Ramme	Rustfrit stål
Hjul	Drivhjul: 16" luftfyldte Drejehjul: 9" massive Anti-tip hjul: 8" massive
Strømføring	24V
Batterikapacitet	2 stk. 12V / 72Ah
Lader	Off-board, 8 amp.
ISO - klassifikation	ISO 12 23 06 - 08

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere, hvor der er begrænset plads.

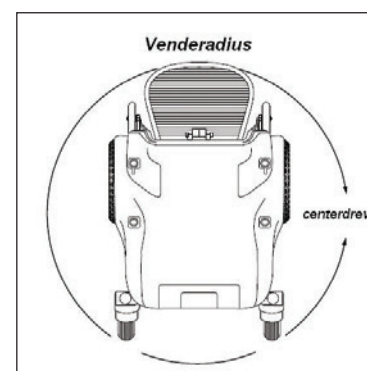

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab HD elektrisk kørestol med batterier og lader	61-71	30 -55	0500-066-000	62500

Tilbehør		
Nakkestøtte		0500-999-010
Fodstøtte justerbar med hælstop højre		0500-999-020
Fodstøtte justerbar med hælstop venstre		0500-999-021
Hoftesele justerbar 228 cm		0500-999-030
Stokkeholder til 2 stokke		0500-999-040
Varekurv bagmonteret		0500-999-050
Joysticksbeslag "swing away" højre		0500-999-060
Joysticksbeslag "swing away" venstre		0500-999-061



XXL-Rehab Transporter

Fast ramme kørestol til transport specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Transporter er designet til nem indendørs transport, for eksempel på hospitaler og bariatriske afdelinger. Derudover er den designet til at være vedligeholdelsesfri og nem at desinficere i modsætning til normale kørestole.

Stolen er udstyret med en kurv, så brugerens ejendele nemt kan komme med under transit.

Udgangspunktet for designet har været nem adgang, selvstændighed og sikkerhed, både for bruger og plejepersonale. De 24" store drivhjul gør stolen nemmere og mere retningsstabil at køre med for plejepersonalet.

Bred indvendig og smal udvendig

XXL-Rehab Transporter har en sædebredde på 71 cm. Stolen er konstrueret med et 5 cm højt PU skumsæde og 7 cm åbning mellem sæde og armlæn. Herved opnås, at vævet falder ned og ikke breder sig til siderne. Det umulige paradoks: "bred indvendig og smal udvendig" er opnået.

Robuste fodstøtter

Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er endvidere indstillelige i både højden og i bredden op til et ydre mål på 110 cm. Derfor kan brugere med meget fedtvæv på indersiden af låret med fordel benytte XXL-Rehab Transporter. Fodstøtterne er belagt med PU skum.

Funktionelle armlæn

Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre armene langt nok tilbage til at få fat i almindelige stolearm læn, når de skal sætte sig.

Armlænene på XXL-Rehab Transporter har en længde på 64 cm og stikker 7 cm frem foran siddeflader. Dette hjælper brugeren til at få nemmere fat med hænderne og sætte sig sikkert i stolen, til gavn for både plejepersonalet og brugeren. Armlænene er endvidere aftagelige og svingbare.

Ryglæn med frigang

Under ryglænet er en frigang ned til sædet på 32 cm, som giver mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt bagud. Herved opnås støtte i ryggen, og samtidig giver det plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjælpe til med at placere brugeren korrekt.

- Nem indendørs transport
- Nem at desinficere
- Vedligeholdelsesfri
- Store 24" drivhjul med parkeringsbremse
- Robuste armlæn giver optimal brugerstøtte og sikkerhed
- Kurv til ejendele

MAX 325 kg



XXL-Rehab Transporter Specifikationer

XXL-Rehab Transporter	
Brugervægt max.	325 kg
Sædebredde med standard armlæn	71 cm
Total bredde med standard armlæn	78 cm
Sædedybde	56 cm
Sædehøjde	55 cm
Ryghøjde	32-52 cm
Afstand fra sæde til fodstøtter	40-42-44-46-48 cm
Fodstøtter breddejusterbare (total bredden ændres)	58-110 cm
Afstand fra gulv til skubbebøjle	100 cm
Afstand mellem armlæn	54 cm
Ryghøjde	48 cm
Højde på fodstøtter	40-48 cm
Afstand fra gulv til underside af sæde	44,5 cm
Total længde	129 cm
Vægt	30 kg
Hjul	Ø125 mm, faste
Drivhjul	24" faste, punkterfrie, med parkeringsbremse
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Fodstøttebelægning	PU skum
ISO - klassifikation	ISO 09 12 03



Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Bariatriske afdelinger.
- Institutioner.
- Hospitaler.

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Transporter	71	56	0182-071-000	102329



XXL-Rehab Viscocomfort kørestolspude

Specielt udviklet til bariatriske brugere

Viscocomfort kørestolspude er specielt udviklet til bariatriske brugere, som har risiko for at udvikle tryksår.

Pudens ergonomisk støbte base er udført i fast skum med en 3 cm Viscoelastisk top. Den støbte base giver øget stabilitet, sæde støtte og enestående trykaflastning på tuber ischii.

Puden er betrukket med stræk- og åndbart inkontinens betræk, der er flammehæmmende og vaskbart.

- Udviklet til bariatriske brugere
- Anatomisk formet skumpude
- Strækbart inkontinens betræk

MAX 325 kg



XXL-Rehab Viscocomfort kørestolspude

Brugervægt max.	325 kg
Vægt	Ca. 3 kg
Basispude	HD PUR skum / Viscoelastisk PUR skum
Pudebetræk	PU
Inkontinens betræk	Ja
Vaskbart betræk	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Brugere med risiko for at udvikle tryksår.

Model	Bredde cm	Dybde cm	Højde cm	Brugervægt max. kg	Varenummer	HMI
Viscocomfort kørestolspude	56	50	14	325	0233-056-050	70650
Viscocomfort kørestolspude	61	50	14	325	0233-061-050	70649
Viscocomfort kørestolspude	66	50	14	325	0233-066-050	70648
Viscocomfort kørestolspude	71	50	14	325	0233-071-050	70647
Viscocomfort kørestolspude	81	50	14	325	0230-081-050	64538
Viscocomfort kørestolspude	91	50	14	325	0233-091-050	64539
Viscocomfort kørestolspude	96	50	14	325	0233-096-050	64541
Viscocomfort kørestolspude	100	50	14	325	0233-100-050	64540

Tilbehør

Betræk til Viscocomfort	0233-999-099
-------------------------	--------------



XXL-Rehab Comfort kørestolspude

Specielt udviklet til bariatriske brugere

Comfort kørestolspude er specielt udviklet som en standard kørestolspude til bariatriske brugere.

Puden benyttes til at optimere siddekomforten samt at øge trykfordelingen hos bariatriske brugere. Den passer perfekt til blandt andet XXL-Rehab Eclipse kørestolen.

Puden består af 2 dele; et 3 cm lag viscoelastisk skum øverst og en tykt Heavy Duty PU-skum nederst, der er opskåret i fjedre, der øger den trykaflastende effekt.

Puden er betrukket med stræk- og åndbart PU inkontinesbetræk, der er flammehæmmende. Betrækket tåler maskinvask.

- Udviklet til bariatriske brugere
- Viscoelastisk top
- Strækbart inkontinens betræk

MAX 325 kg



XXL-Rehab Comfort kørestolspude

Brugervægt max.	325 kg
Vægt	Ca. 2 kg
Basispude	HD PUR skum / Viscoelastisk PUR skum
Pudebetræk	PU
Inkontinens betræk	Ja
Vaskbart betræk	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Brugere med risiko for at udvikle tryksår.

Model	Bredde cm	Dybde cm	Højde cm	Brugervægt max. kg	Varenummer	HMI
Comfort kørestolspude	55	45	12	325	0230-055-045	47700
Comfort kørestolspude	61	45	12	325	0230-061-045	47699
Comfort kørestolspude	66	45	12	325	0230-066-045	47697
Comfort kørestolspude	72	45	12	325	0230-072-045	45332
Comfort kørestolspude	82	45	12	325	0230-082-045	47701

Tilbehør

Betræk til Comfort 55 cm bred	0230-055-100
Betræk til Comfort 61 cm bred	0230-061-100
Betræk til Comfort 66 cm bred	0230-066-100
Betræk til Comfort 72 cm bred	0230-072-100
Betræk til Comfort 82 cm bred	0230-082-100



XXL-Rehab Patientstol

En stærk patientstol med justerbar højde og sædedybde specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Patientstolen er designet til at give bariatriske brugere en god siddekomfort og en let ind- og udstigning af stolen uden at blive klemt. Patientstolen er særlig anvendelig som spisebordsstol, patientstol i venteværelser, på sygehuse og på institutioner.

Konstruktion og funktioner

Til patientstolen har vi anvendt højteknologiske letvægtsrør for at give stolen mest muligt stabilitet og den laveste vægt. Rørene har endvidere en stærk og holdbar overfladebehandling.

Armlænene er designet, så kroppen ikke bliver klemt, og de går ud over siddefladen. Dette gør det nemt at få et godt greb og komme ind og ud af stolen, når brugeren enten ønsker at sætte sig eller rejse sig fra stolen.

Patientstolen giver meget høj funktionalitet for brugeren, sammenlignet med andre patientstole med lige og korte armlæn, hvor det nærmest er umuligt for bariatriske brugere at få et godt greb.

Ryglænet kan justeres til brugeren for at opnå en behagelig siddestilling. Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm, og de buede rør sikrer en god siddekomfort.

Sædehøjden er justerbar fra 44-59 cm, så en rigtig siddehøjde kan opnås og samtidig er det let at komme ind og ud af stolen. Hvis stolen er for høj, vil brugerens fødder svæve over gulvet, hvilket vil gøre det svært for brugeren at placere sig godt i stolen. Hvis stolen er for lav, vil brugeren have svært ved at komme ud af stolen.

Rengøring

Det er nemt at rengøre XXL-Rehab Patientstolen med almindelige rengøringsmidler.

MAX 325 kg

XXL-Rehab Patientstol	
Brugervægt max.	325 kg
Total længde	80-101 cm
Total bredde over armlæn	74 / 84 cm
Total højde	79-94 cm
Sædebredde	61 / 71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Sæderyg højde	37 cm
Afstand fra gulv til underside af sæde	33-48 cm
Afstand mellem armlæn	65 / 75 cm
Højde sæde til armlæn	28 cm
Vægt	16,5 / 17,5 kg
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 09 33 03



- Justerbar sædehøjde
- Justerbar sædedybde
- Lange stabile armlæn
- Armlænsputer
- 2 størrelser

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Plejecentre.
- Hjemmet.
- Venteværelser.

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Patientstol	61	40-52	0160-061-000	54767
XXL-Rehab Patientstol	71	40-52	0160-071-000	54766



XXL-Rehab Arbejdsstol

Funktionel og stabil arbejdsstol specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Arbejdsstol er komfortabel og giver god aflastning, så unødigt slitage på kroppen undgås. Med el-sædehejset og de letløbende hjul kan brugeren forflytte sig både horisontalt og vertikalt, hvilket gør det lettere at leve et aktivt liv i hjemmet.

Dobbelt el-hejs

XXL-Rehab Arbejdsstol har elektrisk højdejustering med dobbelte cylindre, som gør hejset ekstra stærkt. Hejset har et løftespænd på henholdsvis 20 eller 28 cm, som gør stolen nem at indstille til den korrekte arbejds højde ved et køkken-bord eller spisebord. El-hejset betjenes let med et tryk på en knap placeret under armlænet.

MAX 275 kg

XXL-Rehab Arbejdsstol	
Brugervægt max.	275 kg
Stelbredde	56 cm
Sædebredde	62 / 72 cm
Sædedybde	40 / 45 / 50 cm
Sædehøjde	44-64 / 51-79 cm
Rygbredde	46 / 66 cm
Ryghøjde	43 cm
Armlæn trinløs indstilling	25-35 cm
Armlæn breddeindstillelige	Ja
Vægt	Ca. 40 kg
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Grå
Ramme	Pulverlakeret stål
Løftesystem	Heavy-duty aktuator
Hjul	100 mm grå polyuretan
Betræk	100% polyester
Lader	230V
ISO - klassifikation	ISO 18 09 03 - 12

Stærk konstruktion

XXL-Rehab Arbejdsstol har en stærk krydsramme konstruktion, holdbare hjul med meget letkørende SKF lejer og en vægtpacitet på 275 kg. Stolen har manuel håndbetjent bremse.

Komfortabelt sæde

Arbejdsstolens sæde er godt polstret, hvilket giver god trykaflastning samt en komfortabel siddestilling igennem længe tid. Ryglænet er forstærket og monteret på 2 parallelle rør, der kan indstilles i vinkel og dybde. Armlænene kan slås ned og har trinløs indstilling med konisk spor, som sikrer, at de aldrig går løs.

Betræk

Arbejdsstolen leveres med kraftigt møbelbetræk, som er smuds-afvisende og brandhæmmende.



Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Sædehøjde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Arbejdsstol	62	40	44-64	0190-062-040	47605
XXL-Rehab Arbejdsstol	62	45	44-64	0190-062-045	105800
XXL-Rehab Arbejdsstol	62	50	44-64	0190-062-050	105801
XXL-Rehab Arbejdsstol	62	40	51-79	0190-062-140	105802
XXL-Rehab Arbejdsstol	62	45	51-79	0190-062-145	105804
XXL-Rehab Arbejdsstol	62	50	51-79	0190-062-150	105803
XXL-Rehab Arbejdsstol	72	40	44-64	0190-072-040	47618
XXL-Rehab Arbejdsstol	72	45	44-64	0190-072-045	105805
XXL-Rehab Arbejdsstol	72	50	44-64	0190-072-050	105806
XXL-Rehab Arbejdsstol	72	40	51-79	0190-072-140	105807
XXL-Rehab Arbejdsstol	72	45	51-79	0190-072-145	105808
XXL-Rehab Arbejdsstol	72	50	51-79	0190-072-150	105809

- Glidende og støjsvag el-hejs
- Komfortabelt og justerbart sæde
- Stærk krydsramme
- Vægt kapacitet op til 275 kg

- Anvendes med fordel til...**
- Bariatriske brugere.

Indholdsfortegnelse

2-3	XXL-Rehab Minimaxx kørestol	12-13	XXL-Rehab Transporter
4-5	XXL-Rehab Minimaxx Push kørestol	14	XXL-Rehab Viscocomfort kørestolspude
6-7	XXL-Rehab Eclipse kørestol	15	XXL-Rehab Comfort kørestolspude
8-9	XXL-Rehab Eclipse Tilt kørestol	16	XXL-Rehab Patientstol
10-11	XXL-Rehab HD elektrisk kørestol	17	XXL-Rehab Arbejdsstol



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com