



COBI REHAB®
The Positioning Company

Cobiflow 500 vekseltryksmadras

Retningslinjer for rengøring- og vedligeholdelse

Desinfektionsvejledning

Gode vedligeholdelses- og rengøringsrutiner kan forlænge levetiden på Cobiflow 500 vekseltryksmadras



Daglig rengøring af Cobiflow 500 vekseltryksmadras



1

Fjern eventuelt snavs og spild fra overfladen før rengøring af betrækket.

Aftør betrækket med et almindeligt rengøringsmiddel. Rengøring kan ved behov, efterfølges af aftørring med en desinfektant. Se oversigt på næste side.



2

Aftør betrækket med en ren klud vredet op i vand. Sørg for, at betrækket er helt tørt, før det tages i brug igen. Hvis betrækket efterlades vådt, er det mere modtageligt for skade og slidtage.



3

Tør betrækket grundigt før ibrugtagning eller opbevaring. Hvis betrækket eventuelt er gået ud af facon, vil det vende tilbage til sin oprindelige facon, når det er helt tørt.



4

Følg altid producentens instruktioner, når kemiske rengøringsmidler anvendes ved rengøring.

Ikke alle rengøringsmidler kan anvendes på Cobiflow 500 vekseltryksmadras. Kontakt cobi@cobi.dk for yderligere informationer.

Retningslinjer for dekontaminering af Cobiflow 500 vekseltryksmadras

Metode	Aktiv %	pH-værdier egnet til desinfektion	Hviletid	Efter påføring	Indvirkning på betræk
Klor og klorblandinger	1,000-10,000 millionte-dele	7-9	<10 min. Styrke og mikrobiel afhængighed	Aftør betrækket med en ren klud vredet op i vand, og tør efter med en ren tør klud.	Anbefalet brug Anvend opløsning på 1000 milliontedel til daglig rengøring. Op til 10.000 milliontedel kan anvendes til dekontaminering. Aftør betrækket med en ren klud vredet op i vand, og tør efter med en ren tør klud. Undgå hårdhændet skrubning af betrækket.
Glutaraldehyd	2	7,5-8,5	Temperaturafhængig	Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud. Lad betrækket tørre.	Anbefalet brug
Damp sterilisation	Ikke relevant	Neutral	3 min. - 134°C 10 min. - 126°C 15 min. - 121°C 30 min. - 115°C	Tør og returnér til brug eller opbevaring.	Anbefalet brug Høje temperaturer og lange dvæletider kan forårsage at betrækket krymper. Verificér kompatibilitet med hele betrækket før brug.
Alkohol	Typisk 70	-	10 min. (MAC)	Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud. Undgå overdrevent brug af vand.	Anbefalet brug og forholdsregler Betrækkets overflade kan svulme op med risiko for skader. Der skal udvises forsigtighed indtil betrækket er helt tørt (- 1 time).
Ortho-phthalaldehyd (OPA)	0,55%	7,5	5 min.	Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.	Anbefalet brug og forholdsregler Vil give mærker på huden.
Ethylenoxid	3	-	>30 min. Temperaturafhængig	Risiko for giftrester. Skyl grundigt og tør efter før brug.	Acceptabelt, men kan ikke anbefales Eksplodings- og toksicitetsproblemer ved håndtering af EtO. Giftrester vil skade betrækkets biokompatibilitet.
Brintoverilte	3-25%	5-9	<5 min.	Neutraliser og tør.	Betinget acceptabelt brug Brintoverilte skal neutraliseres fuldstændig. Meget basisk peroxid (10 og derover) må IKKE anvendes.
Kvartær ammonium blandinger	3-15%	7-13	Variører Se produktets vejledning	Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.	Betinget acceptabelt brug Kvaternære ammoniumsblandinger er typisk for basiske. Kvaternære opløsninger med en pH> 10 anbefales ikke. BRUG IKKE klude indeholdende natriumhydroxid (NaOH).
Iodoforer	75-100 millionte-dele	Syre	<20 min.	Hvis udsat, skyl med vand og tør efter.	Kan IKKE anbefales Farvning og syreholdige produkter der reducerer betrækkets levetid.
Pereddikesyre	0,2-0,35	-	<20 min.	Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.	Ikke egnet til brug
Fenoler	2-12%	-	10 min.	Kassér.	Ikke egnet til brug Irreversibel opsvulmning af betræk.
Tør varme	Ikke relevant	Neutral	10 min. - 126°C 15 min. - 121°C 30 min. - 115°C	Kassér.	Ikke egnet til brug Blødgører betrækket til det går i stykker.
Formaldehyd	2-8	5-7	<10 min.	Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.	Ikke egnet til brug Personlige grænseværdier gælder for rengøringspersonalet. Stærk lugt.

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com