



Scan koden og få flere produktinformationer.

Serie 12102 fra hmi-basen.dk



Brugervægt

Madrasen er beregnet til brugervægt 30-160 kg.

CPR/Ved hjertestop

Ved hjertestop hives den sorte slange med RØDT CPR på ud af pumpen.

Rengøring

Luftmadras og pumpe skal rengøres omhyggeligt ved skift mellem brugere for at undgå krydskontaminering. Følgende er en god retningslinje, men lokale beslutninger vedr. rengøring bør ligeså følges.

- Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler, vand og mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud.
- Rengøring af pumpen kan udføres med en hårdt opvredet klud med vand eller med lidt neutral sæbe.
- Vær omhyggelig med, at celler og betræk er HELT tørre før brugeren igen ligger på overfalden.
- Betrækket kan maskinvaskes op til 95° C.
- Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være helt tørt før påmontering.
- Betrækket må ikke tørres i tørreskab og må IKKE stryges.

Find den udvidede brugsanvisning på www.cobirehab.com

QUICK guide



COBI REHAB
The Positioning Company

Carital Optima statisk madras

Opsætning af Carital Optima

- 1 Læg madrassen i sengen.
- 2 Tilslut slangerne til kontrolsystemet/pumpen – brug farvekoderne.
- 3 Tilslut strøm. Tænd apparatet på O/I knappen.
- 4 Læg et lagen løst hen over madrassen.
- 5 Tryk på "Normal".
- 6 Brugeren lægges på madrassen.
- 7 Madrassen indstiller nu selv alle sektioner til brugeren, ud fra lejrning og vægtfordeling.

- | | |
|--|---|
| <p>A Den funktion som pumpen selv automatisk stiller sig i. Mulighed for lejrning på siden og ryggen. Automatisk kontrol af tryk hvert 2. minut.</p> <p>B Bruges hvis brugeren KUN kan ligge på ryggen. Madrassen er her kun fyldt med meget lidt luft for at opnå så optimal trykaflastning som muligt.</p> <p>C Fast funktion. Madrassen bliver fast i midter sektionen. Forsvinder automatisk efter 15 minutter.</p> | <p>D Hvis madrassen slet ikke må starte pumperne om natten. Bruges normalt ikke. Til meget lydfølsomme brugere.</p> <p>E Hvis brugeren skal sidde op, skal denne funktion aktiveres. Hovedgærdet over 45°. Automatisk alarmering efter 1 time med både lys og lyd.</p> <p>F Er deaktiveret!</p> <p>G Bruges til at slukke alarmen, hvis der kommer en sådan. Den vil alarmere igen efter 15 minutter, hvis fejlen ikke er korrigeret.</p> |
|--|---|

