



### Brugervægt

Madrasen er beregnet til brugervægt fra 30-150 kg.

### Autofirm max / plejefunktion

Autofirm max funktionen bruges, når der skal plejes i sengen.

Funktionen pumper madrassen hård i 15 minutter og skifter derefter automatisk tilbage til vekseltryk. Ved brug af autofirm bliver madrassen fyldt med luft til maksimum trykket opnås.

Pleje og forflytning gøres lettere. Plejefunktionen vil automatisk annulleres efter 15 minutter.

Tryk på Autofirm max (figur 5) for at afbryde tidligere.

### Upright / Siddefunktion

Knappen aktiveres hvis patienten er siddende konstant (figur 6). Denne funktion er ikke for korte perioder.

### CPR / ved hjertestop

Skal der gives hjertemassage, lukkes luften straks ud ved at hive i CPR flap ved hovedgærdet og tilslutningsslanger afmonteres ved pumpen.

### Ved driftsforstyrrelser:

#### Lavt tryk / strømafbrydelse

Motorenheden gør personalet opmærksom på, at systemet har insufficente tryk værdier. Systemet vil alarmere og lyse i figur 8. Kontroller strømstik, luftslanger og om CPR er korrekt sat i. Se fejlsøgnings-skema i brugsanvisning på [www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com) eller kontakt tekniker/depot.

#### Rengøring

Luftmadras og pumpe skal rengøres omhyggeligt ved skift mellem brugere for at undgå krydskontaminering. Følgende er en god retningslinje, men lokale beslutninger vedr. rengøring bør ligeså følges.

- Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler, vand og mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud.
- Rengøring af pumpen kan udføres med en hårdt opvredet klud med vand eller med lidt neutral sæbe.
- Vær omhyggelig med, at celler og betræk er HELT tørre før brugeren igen ligger på overfalden.
- Betrækket kan maskinvaskes ved 60° C.
- Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være helt tørt før påmontering.
- Betrækket må ikke tørres i tørreskab og må IKKE stryges.

Find den udvidede brugsanvisning på [www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)




## Cobiflow 500 vekseltryksmadras med dual plus pumpe

### Opsætning af madras og pumpe

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden, så cellerne vender opad og fod-symbolet på betrækket er placeret i fodenden.
- 2 Fastgør madrassen i hvert hjørne ved hjælp af stropperne.
- 3 Efterse at alle sengens funktioner kan bruges, når madrassen er spændt fast på liggefladen, før næste trin udføres.
- 4 Hæng pumpeenheten på sengegavlen ved hjælp af krogene.
- 5 Tjek at madrassens CPR flap/knap i venstre side af hovedenden er placeret korrekt, lukket og at CPR skiltet er tydeligt.
- 6 Tilslut madrassens luft slanger til quick release koblingerne på pumpe enhedens udtag.
- 7 Sæt stikket i en kontakt. Pumpe enheden tændes på vippekontakten på enhedens højre side.
- 8 Tryk på On/off knappen for at tænde, den sidder på siden af pumpen. Tryk derefter panellock/tænd/sluk (figur 1) og pumpen går i gang ved at vise 10 i timer (figur 4) og 0 i komfort indstilling (figur 3). Der går ca. 20 minutter før brugeren kan lægges på madrassen. Når madrassen er klar, lyser timer indikationen (figur 2) grønt. Læg et løst lagen på madrassen. Brugeren kan nu lægges på madrassen.

- 9 Pumpen indstiller sig automatisk på brugerens vægt. Dog kan komforten indstilles op – eller ned på komfort indstilling (figur 3). + gør den hårdere, - gør den blødere. For at bruge denne funktion, hold panellock/tænd/sluk (figur 1) inde i 5 sek. Derefter kan alle panelets funktioner anvendes. Plejepersonalet/terapeuten bør altid kontrollere luften under brugeren ved en håndprøve under brugeren bækken. Det gøres ved at føre hånden ind i madrassen ovenpå den celle, der er under brugeren tungeste del (bækket). Kontrollér, at brugeren ikke ligger/sidder igennem madrassen. Brugeren skal være sunket halvvejs ned i madrassen.

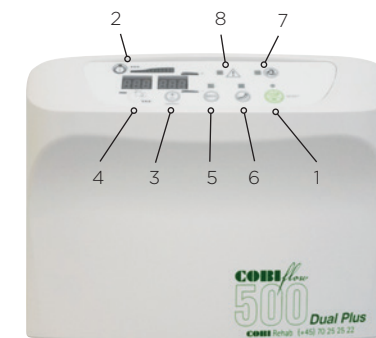

04-2018 Cobiflow 500 vekseltryksmadras med dual plus pumpe