



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# Cobi lejringspuder

Hjælpe midler, der gør en forskel...



Cobi Søhest pude og  
Cobi Finne pude mellem knæ

Scan koden og få  
brugsanvisning m.m.



Serie 48094 fra hmi-basen.dk

- Til særlige lejringsbehov
- Kurver sig omkring knoglefremspring og fordeler trykket
- Perfekt til lejrning i Semi-Fowler liggestilling
- Gør det muligt og nemt at lejre sideliggende
- Antibakterielt forseglede
- 2 typer aftagelige vaskbare betræk
- Giver sansestimuli

## Anvendes med fordel til...

- Pareser.
- Sclerose patienter.
- Hjerneskadede.
- Demente.
- Neurologiske patienter.
- Smertepatienter.
- Mennesker i palliative forløb.
- Agiterede patienter.

# Cobi lejringspuder

Flere funktioner i én og samme pude

Cobi lejringspuder er en serie puder med et utal af fleksible løsninger. Hver pude kan anvendes til løsninger af forskellige positioneringsproblematikker, afhængigt af den enkeltes konkrete behov. Puderne er produceret med udgangspunkt i de gængse lejringsprincipper og i samarbejde med specialenheder indenfor neurologisk skadede patienter og demente borgere. Fokus har været, at materialets kvalitet skal holde faconen for at skabe stabilitet samt stor understøttelsesflade og trykfordeling.

Cobi lejringspuder er universale med flere funktioner i én og samme pude, hvilket giver dem store anvendelsesmuligheder og fleksibilitet. Stabiliteten gør dem nemme at anvende og sikrer en stabil og hensigtsmæssig lejrning.

## Stor tyngde og anatomisk design

I designet af Cobi lejringspuder har vi lagt stor vægt på, at puderne er meget kropsnære og kan komme tæt på brugeren. Der er en stor tyngde i puderne, så de bliver, hvor de bliver positioneret og støtter op, så lejrningen af brugeren forbliver stabil.

## Anvendelig til mange patientgrupper

Puderne er særdeles velegnet til lejrning af brugere med blandt andet pareser, sclerose patienter, hjerneskadede, neurologiske patienter, smertepatienter og mennesker i palliative forløb, hvor få og selv små bevægelser vil udløse smerter. Fælles for disse grupper af patienter er, at langt de fleste af dem er i høj risiko for at udvikle vævsskade og tryksår.

## Eksempler på lejrning

Cobi Søhest pude er den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter for en god sidelejrning er samlet i én og samme pude.

Cobi Søhest pude kan også anvendes med Cobi Finne pude, som gør front lejrning exceptionel.

## Beroligende effekt

Foruden at kunne afhjælpe tryk og øge trykfordelingen, er puderne særdeles velegnet til brug for nedsættelse af spasticitet, samt giver en taktil stimuli, hvilket er meget relevant for blandt andet demente. Brugeren får en afgrænsende fornemmelse af kroppen, hvilket ofte har en beroligende effekt og øger komforten.

## Konstruktion

Cobi lejringspuder er fremstillet af materialer, der skaber stabil lejrning og skaber en så stor trykfordeling som muligt. Materiale sammensætningen giver både taktile og proprioceptive input.

Pudernes stof er vandtæt, men samtidig åndbart. Stoffet er anti-bakterielt behandlet, uden brug af nano materialer. Derudover er puderne lufttætte og fyldt med små Krøyer kugler, granulat og vægtfylde, hvilket sikrer, at stillingen holdes og puderne ikke ændrer facon.

Der fås 2 typer betræk, et hygiejnebetræk og et ekstra blødt jerseybetræk. Hygiejnebetrækket er et utroligt strækbart PU materiale, antibakterielt forseget, som gør det ekstra modstandsdygtigt og uigennemtrængeligt for bakterier, og derfor meget hygiejnisk i brug. Betrækket er endvidere åndbart, strækbart og brandhæmmende. Jerseybetrækket af 100% økologisk bomuld er ekstra blødt stof, som er strækbart.

Cobi deltager gerne i konkrete afprøvninger med brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) eller 70 25 25 22.



Cobi Universal pude



Cobi Universal pude



Cobi U-pude under overkrop,  
Cobi Skøde pude under hovede,  
Cobi Cylinder pude under knæ,  
Cobi Finne pude under underben



Cobi Hæl/arm pude



Cobi Skøde pude




Cobi Hæl/arm pude



Cobi Skøde pude




# Cobi lejringspuder

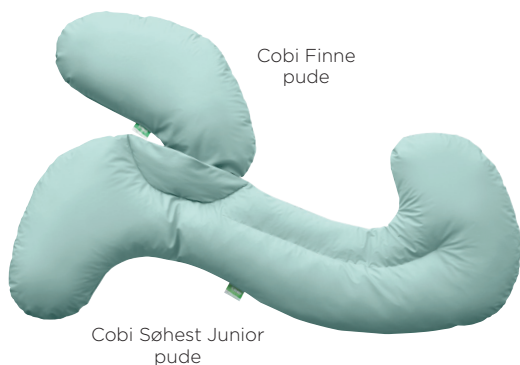

Cobi Flexi pude



Cobi Robust pude

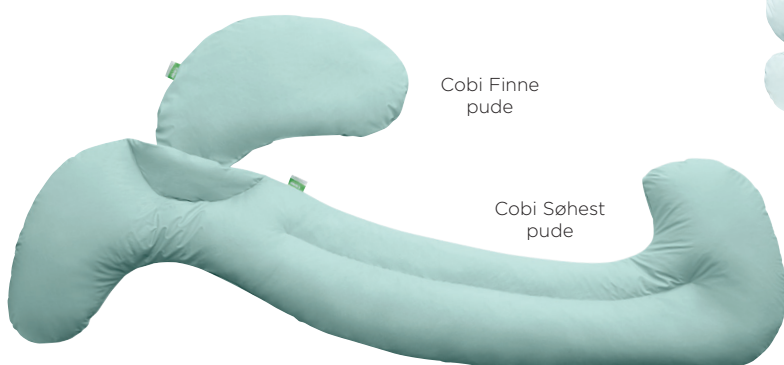

Cobi H-pude



Cobi Cylinder pude kort



Cobi Lille hovedpude




Cobi Stor hovedpude



Cobi Hæl/arm pude



Cobi Kile pude

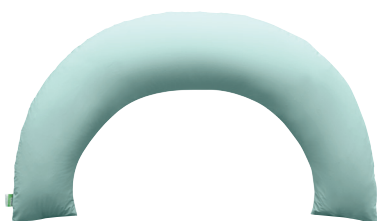

Cobi U-pude



Cobi Skøde pude



Cobi Universal pude

# Kelvin Support puder



Kelvin Support  
Arm/hånd/læg/hæl pude



Kelvin Support  
Lille hovedpude



Kelvin Support  
Mellem hovedpude



Kelvin Support  
Stor hovedpude

# Cobi lejringspuder

## **Cobi Søhest pude / Cobi Søhest Junior pude**

Den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter for en god sidelejrning er samlet i én og samme pude. Cobi Søhest pude kan også anvendes med Cobi Finne pude, som gør front lejrning exceptionel.

## **Cobi Finne pude**

Cobi Finne pude er ekstra tilbehør til Cobi Søhest pude og kan anvendes til at give yderligere aflastning og kan positionere ankel og hæl.

## **Cobi Flexi pude**

På grund af sin opbygning, er denne pude særlig velegnet til at give brugeren en god kropssupport. Den kan også bruges som U-pude og enderne er syet i spids, så den er mere kropsnær ved Semi-Fowler liggestilling. Puden kan også placeres bag, foran eller rundt om brugeren.

## **Cobi Robust pude**

Denne cylinderpude er 200 cm lang og 28 cm bred og har ekstra tyngde, hvilket gør puden særlig velegnet til en tæt lejrning som Semi-Fowler liggestilling, eller ved 135° sideliggende/delvis bugleje. Puden kan også med fordel bruges til agiterede patienter, som har behov for øget taktile stimuli og proprioceptiv afgrænsning.

## **Cobi H-pude**

Cobi H-pude er en lejringspude, der kan anvendes på et utal af måder. I sidelejrning positioneres hoftelæddet i neutral stilling og er særligt velegnet til hofteopererede, spastikere m.fl. Når Cobi H-puden anvendes rygliggende, positioneres hoftelæddet i fleksion og benene lejreres støttet og stabilt. Puden kan desuden bruges i trænings- og behandlingsseancer.

## **Cobi Cylinder pude kort**

Knæ- og hasepude, som er uundværlig, når der skal lejreres i Semi-Fowler liggestilling og ved fleksion af knæet. Puden kan også anvendes ved sidelejrning, som stabilitet til knæene.

## **Cobi Lille hovedpude**

Denne pude kan anvendes til mange formål, når der i positioneringen skal udfyldes små hulrum. Puden giver den optimale understøttelse. Cobi Lille hovedpude kan desuden anvendes til at forebygge tryksår mellem knæene eller give optimal hovedpositionering.

## **Cobi Stor hovedpude**

Cobi Stor hovedpude kan anvendes til rygstøtte, når man lejreres i Semi-Fowler liggestilling. Ved anvendelse til positionering af hovedet til neutral nakkestilling giver puden en utrolig god støtte og komfort, og giver et godt stabilt hold. Ved anvendelse under læggene i rygliggende stilling, giver puden god trykafledning til hæle og et stabilt hold.

## **Cobi Hæl/arm pude**

Puden anvendes til at elevare hælen fra madrassen ved behandling af tryksår. Puden kan også anvendes, hvor hele underbenet elevares for at undgå ødemdannelse. Derudover kan puden anvendes til at lejre en hemiplegisk arm eller til brugere med nedsat tonus.

## **Cobi Kile pude**

Kile puden er udformet som en trekantet pude, og kan benyttes til fleksible formål, som f.eks. stabilisering både foran og bag ryggen i sideleje for at give et fast hold. Ved brug af Cobi Kile pude foran kroppen, får øverste arm og skulder ligeledes en god understøttelse i neutral stilling. I rygleje kan Cobi Kile pude benyttes til at understøtte under haserne, læg og lår.

## **Cobi U-pude (rede med flex arme)**

På grund af sin U-form er denne pude særlig velegnet til at give brugeren en god kropssupport. Puden kan enten placeres bag, foran eller rundt om brugeren. Kropssupportepuden er en af grundstenene i Semi-Fowler liggestilling.

## **Cobi Skøde pude**

Denne pude kan med fordel anvendes i den siddende stilling, hvor den urolige bruger kan have god gavn af at have "katten i sin favn". Skaber ro og afgrænsning. Puden kan desuden bruges til lejrning af hovedet samt skabe stabilitet og lårstyr i den siddende stilling i sengen under lårene.

## **Cobi Universal pude**

Denne pude anvendes til at sikre hofte abduktion, og til at mindske risikoen ved hofte dislokation, når en bruger vendes fra ryg til sidelejrning. Derudover er puden særlig velegnet til understøttelse af arm/skulder og forebyggelse af ødemdannelse.

# Kelvin Support puder

## **Kelvin Support Arm/hånd/læg/hæl pude**

Puden kan anvendes til at lejre en hemiplegisk arm og er velegnet til brugere med nedsat tonus. Denne pude kan desuden anvendes til at elevare hælen fra madrassen. Særligt anvendelig ved behandling, hvor hele underbenet elevares for at undgå ødemdannelse med mere.

## **Kelvin Support hovedpude - Lille / Mellem / Stor**

Hovedpuderne kan anvendes til rygstøtte, når man lejreres i Semi-Fowler liggestilling. Derudover giver hovedpuderne en øget komfort, da de bidrager til utrolig god støtte til nakken.

## Cobi lejringspuder Specifikationer

Cobi lejringspuder	
Fyld-materialer	3 mm Krøyer-kugler af ekspanderet polystyren. Gummi granulat til at skabe vægtfylde. PU skum der opfylder ØKO-TEX® Standard 100. Fordeling er tilpasset hver pude-type.
Pudeoverflade	Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med PU og anti-bakterielt behandlet.
Hygiejnebetræk	Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med PU og anti-bakterielt behandlet.
Jerseybetræk	100% økologisk bomuld
Rengøring	Begge betræk er vaskbare. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 18 12 15 - 09

### Anvendes med fordel til...

- Pareser.
- Sclerose patienter.
- Hjerneskadede.
- Demente.
- Neurologiske patienter.
- Smertepatienter.
- Mennesker i palliative forløb.
- Agiterede patienter.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Kg	Varenummer	HMI
Cobi lejringspudesæt komplet med taske					0400-000-000	
Cobi Cylinderpude pude kort	62	29	20	1,7	0400-064-000	101214
Cobi Flexi pude	194	27	15	3,7	0400-068-000	101215
Cobi Robust pude	200	28	28	6,0	0400-070-000	101216
Cobi Hæl/arm pude	40	28	11	0,5	0400-060-000	101218
Cobi Universal pude	58	39	22	1,7	0400-054-000	101220
Cobi Søhest pude	186	51	12	5	0400-056-000	101221
Cobi Søhest Junior pude	127	27	12	2,5	0400-057-000	101282
Cobi Finne pude	58	28	8	0,6	0400-058-000	101222
Cobi U-pude	88	94	17	2,7	0400-072-000	101225
Cobi Skøde pude	55	54	12	1,2	0400-050-000	101226
Cobi Lille hovedpude	39	25	8	0,3	0400-048-000	103833
Cobi Stor hovedpude	58	40	13	0,9	0400-049-000	103834
Cobi H-pude	51	30	30	1,8	0400-074-000	103835
Cobi Kile pude	40	50	14	1,1	0400-066-000	103836

Tilbehør	Hygiejnebetræk	Jerseybetræk
Pudebetræk Cobi Cylinder pude kort	0400-064-010	0400-064-015
Pudebetræk Cobi Flexi pude	0400-068-010	0400-068-015
Pudebetræk Cobi Robust pude	0400-070-010	0400-070-015
Pudebetræk Cobi Hæl/arm pude	0400-060-010	0400-060-015
Pudebetræk Cobi Universal pude	0400-054-010	0400-054-015
Pudebetræk Cobi Søhest pude	0400-056-010	0400-056-015
Pudebetræk Cobi Søhest Junior pude	0400-057-010	0400-057-015
Pudebetræk Cobi Finne pude	0400-058-010	0400-058-015
Pudebetræk Cobi U-pude	0400-072-010	0400-072-015
Pudebetræk Cobi Skøde pude	0400-050-010	0400-050-015
Pudebetræk Cobi Lille hovedpude	0400-048-010	0400-048-015
Pudebetræk Cobi Stor hovedpude	0400-049-010	0400-049-015
Pudebetræk Cobi H-pude	Intet betræk	Intet betræk
Pudebetræk Cobi Kile pude	0400-066-010	0400-066-015
Opbevaringstaske til Cobi lejringspuder	0400-080-000	0400-080-000

## Kelvin Support puder Specifikationer

Kelvin Support puder	
Kuglemateriale	Ekspanderet polystyren
Kuglestørrelse	Ca. 1 mm
Pudeoverflade	Polyester, polyuretan polycarbonat
Pudebetræk	67% bomuld, 33% polyester
Rengøring	Pudebetrækket er vaskbart. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 18 12 15 - 09

### Anvendes med fordel til...

- Pareser.
- Sclerose patienter.
- Hjerneskadede.
- Demente.
- Neurologiske patienter.
- Smertepatienter.
- Mennesker i palliative forløb.

Model	Længde cm	Bredde cm	Varenummer	HMI
Kelvin Support Arm/hånd/læg/hæl	27	27	3001-027-027	
Kelvin Support Lille hovedpude	40	40	3001-040-040	
Kelvin Support Mellem hovedpude	40	60	3001-040-060	
Kelvin Support Stor hovedpude	40	70	3001-040-070	

Tilbehør	
Microfiberbetræk, til pudestørrelse 30 x 30 cm	3001-999-003
Microfiberbetræk, til pudestørrelse 40 x 40 cm	3001-999-002
Microfiberbetræk, til pudestørrelse 40 x 65 cm	3001-999-001





**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)