

Brugervægt

Madrasen er beregnet til brugervægt fra 25-180 kg.

Funktionsindstilling (Se figur 1)

Skifter mellem Autofirm funktion eller vekseltryks-funktion.

Auto firm funktion (00000)

Alle madrassens celler bliver fyldt ensartet, når denne funktion er valgt.

Autofirm funktionen slår selv fra efter 20 minutter.


Vekseltryks-funktion (00-00-0)

Tilstødende celler i madrassen bliver skiftevis oppustet og tømt for luft, når denne funktion er valgt. Justér trykket, så det passer til brugeren ved at trykke på figur 2.

Komfort indstilling (Se figur 2)

Komforten på madrassen kan indstilles til at gøres hårdere, tryk på + og gøres blødere ved tryk på minus -.

Alarm/Advarsels lysdiode (Se figur 3) ved lavt tryk / strømafbrydelse

Hvis strømmen bliver afbrudt, mens enheden er tændt, lyder en alarm. Tryk på knappen:  for at slå lyden fra.

Hvis der opstår tryk-tab i madrassen, mens enheden er tændt, lyder en alarm og lys blinker.


Låse funktion (Se figur 4)

Låse funktionen låser efter 3 sek., hvis der ikke har været stillet på knappenes funktioner. Hvis låse funktionen er låst, skal den låses op, før nye indstillinger kan foretages. For at låse op trykkes på figur 4 i 5 sekunder, til lyset ved knappen slukker.

Siddefunktion (Se figur 5)

Hvis Siddefunktionen er valgt, vil lysdioden lyse op, og pumpen øger trykket lidt. Denne funktion vælges, hvis brugeren skal sidde op. Hvis brugeren skal ligge, skal denne funktion være deaktiveret.

ALARM-Mute-knappen (Se figur 6)

 Aktiveres, hvis lydløs tilstand ønskes. Dioden vil fortsat blinke.

Ved driftsforstyrrelser

Kontrollér strømstik, luftslanger og celler. Se checkliste for problemløsning i brugsanvisning på www.cobirehab.com eller kontakt tekniker/depot.

CPR

For at tømme madrassen og skabe fast underlag for CPR:


1. Frakobl madrassens luft slanger fra quick release koblingerne på siden af pumpen.
2. Start CPR straks. Vent IKKE til madrassen er helt tømt for luft!!!

Rengøring

Pumpen og madrassen skal desinficeres grundigt mellem hver patientbrug for at undgå krydskontaminering og infektioner. Lokale rengørings- og desinfektionspolitikker skal overholdes, men det følgende er anbefalede retningslinjer.

Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler, vand og mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud.

- Tør de udvendige overflader på pumpen, strømkablet og luft slanger med en fugtig klud med et desinfektionsmiddel og vand eller mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.
- Vær omhyggelig med, at madrassen og betræk er HELT tørre før brugeren igen ligger på overfladen.
- Betrækket kan maskinvaskes ved 95° C.
- Betrækket må tumles i tørretumbler på laveste temperatur, indtil det er tørt eller hænges til tørre, når det er muligt.
- Betrækket må IKKE stryges.

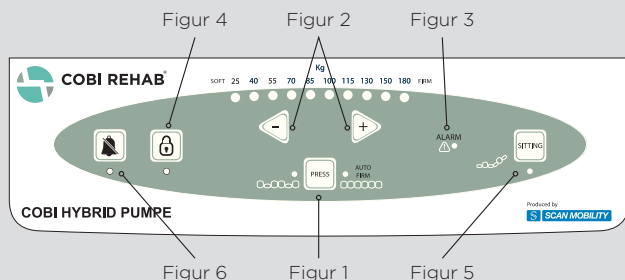

QUICK guide

Cobi Hybrid

- en kombinationsmadras

Opsætning af madras og pumpe

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden med luft slangerne ved fodenden af sengen.
- 2 Hvis vekseltryks-funktionen skal anvendes, hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af monteringsbeslagene på bagsiden af enheden. Pumpen kan ligeledes placeres opretstående på gulvet.
- 3 Tilslut madrassens 3 luft slanger til quick release koblingerne på siden af pumpen. Enhver slange kan sidde på enhver quick release kobling på pumpen. Altså: Man kan ikke sætte en luft slange på en forkert quick release kobling. Quick release koblingen giver en "klik-lyd", når luft slangen er sat "helt" og korrekt på koblingen. Ved af-tagningen af en luft slange fra en quick release kobling, presses metal-fladen ind, så luft slangen løsnes.
- 4 Kontrollér, at luft slangerne er monteret rigtigt ved at trække forsigtigt i dem. Sørg for, at luft slangerne ikke er snoede eller gemt under madrassen eller betrækket.
- 5 Sæt stikket i en kontakt. Tænd for pumpen på vippekontakten On/off på pumpens venstre side.
- 6 Når pumpen er tændt, vil madrassen blive pustet op, og alle funktioner vil være inaktive, indtil madrassen er fyldt.
- 7 Det tager ca. 10 minutter for madrassen at blive helt fyldt. Efter 10 minutter: vælg ønsket trykindstilling og vent yderligere 10 minutter.
- 8 Anbring brugeren på madrassen. Løft sengehestene op.



Find den udvidede brugsanvisning på www.cobirehab.com