



**COBI REHAB®**  
The Positioning Company

# Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Retningslinjer for rengøring- og vedligeholdelse

## Desinfektionsvejledning

Gode vedligeholdelses- og rengøringsrutiner kan forlænge levetiden på Cobi Cura X10 vekseltryksmadras



# Daglig rengøring af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras



1

**Fjern** eventuelt snavs og spild fra overfladen før rengøring af betrækket.

Aftør betrækket med et almindeligt rengøringsmiddel. Rengøring kan ved behov, efterfølges af aftørring med en desinfektant. Se oversigt på næste side.



2

**Aftør** betrækket med en ren klud vredet op i vand. Sørg for, at betrækket er helt tørt, før det tages i brug igen. Hvis betrækket efterlades vådt, er det mere modtageligt for skade og slidtage.



3

**Tør** betrækket grundigt før ibrugtagning eller opbevaring. Hvis betrækket eventuelt er gået ud af facon, vil det vende tilbage til sin oprindelige facon, når det er helt tørt.



4

**Følg altid** producentens instruktioner, når kemiske rengøringsmidler anvendes ved rengøring.

Ikke alle rengøringsmidler kan anvendes på Cobi Cura X10 vekseltryksmadras. Kontakt [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) for yderligere informationer.

# Retningslinjer for dekontaminering af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

| Metode                      | Aktiv %                     | pH-værdier egnet til desinfektion | Hviletid  | Efter påføring  | Indvirkning på betræk  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| Klor og klorblandinger      | 1,000-10,000 millionte-dele | 7-9                               | <10 min.<br>Styrke og mikrobiel afhængighed                             | Aftør betrækket med en ren klud vredet op i vand, og tør efter med en ren tør klud. | <b>Anbefalet brug</b><br>Anvend opløsning på 1000 milliontedel til daglig rengøring. Op til 10.000 milliontedel kan anvendes til dekontaminering. Aftør betrækket med en ren klud vredet op i vand, og tør efter med en ren tør klud. Undgå hårdhændet skrubning af betrækket. |
| Glutaraldehyd               | 2                           | 7,5-8,5                           | Temperaturafhængig  | Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud. Lad betrækket tørre.                 | <b>Anbefalet brug</b>  |
| Damp sterilisation          | Ikke relevant               | Neutral                           | 3 min. - 134°C<br>10 min. - 126°C<br>15 min. - 121°C<br>30 min. - 115°C | Tør og returnér til brug eller opbevaring.  | <b>Anbefalet brug</b><br>Høje temperaturer og lange dvæletider kan forårsage at betrækket krymper. Verificér kompatibilitet med hele betrækket før brug.   |
| Alkohol                     | Typisk 70                   | -                                 | 10 min. (MAC)   | Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud. Undgå overdrevent brug af vand.      | <b>Anbefalet brug og forholdsregler</b><br>Betrækkets overflade kan svulme op med risiko for skader. Der skal udvises forsigtighed indtil betrækket er helt tørt (- 1 time).   |
| Ortho-phthalaldehyd (OPA)   | 0,55%                       | 7,5                               | 5 min.  | Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.                                      | <b>Anbefalet brug og forholdsregler</b><br>Vil give mærker på huden.   |
| Ethylenoxid                 | 3                           | -                                 | >30 min.<br>Temperaturafhængig  | Risiko for giftrester. Skyl grundigt og tør efter før brug.                         | <b>Acceptabelt, men kan ikke anbefales</b><br>Eksplodings- og toksicitetsproblemer ved håndtering af EtO. Giftrester vil skade betrækkets biokompatibilitet.   |
| Brintoverilte               | 3-25%                       | 5-9                               | <5 min.   | Neutraliser og tør.   | <b>Betinget acceptabelt brug</b><br>Brintoverilte skal neutraliseres fuldstændig. Meget basisk peroxid (10 og derover) må IKKE anvendes.   |
| Kvartær ammonium blandinger | 3-15%                       | 7-13                              | Variere<br>Se produktets vejledning                                     | Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.                                      | <b>Betinget acceptabelt brug</b><br>Kvaternære ammoniumsblandinger er typisk for basiske. Kvaternære opløsninger med en pH> 10 anbefales ikke. <b>BRUG IKKE</b> klude indeholdende natriumhydroxid (NaOH).   |
| Iodoforer                   | 75-100 millionte-dele       | Syre                              | <20 min.  | Hvis udsat, skyl med vand og tør efter.   | <b>Kan IKKE anbefales</b><br>Farvning og syreholdige produkter der reducerer betrækkets levetid.   |
| Pereddikesyre               | 0,2-0,35                    | -                                 | <20 min.  | Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.                                      | <b>Ikke egnet til brug</b>   |
| Fenoler                     | 2-12%                       | -                                 | 10 min.   | Kassér.   | <b>Ikke egnet til brug</b><br>Irreversibel opsvulmning af betræk.  |
| Tør varme                   | Ikke relevant               | Neutral                           | 10 min. - 126°C<br>15 min. - 121°C<br>30 min. - 115°C                   | Kassér.   | <b>Ikke egnet til brug</b><br>Blødgør betrækket til det går i stykker.   |
| Formaldehyd                 | 2-8                         | 5-7                               | <10 min.  | Aftør med fugtig klud, tør efter med tør klud.                                      | <b>Ikke egnet til brug</b><br>Personlige grænseværdier gælder for rengøringspersonalet. Stærk lugt.  |

10/2018/JP



**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)