



COBI REHAB®
The Positioning Company

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Retningslinjer for rengøring- og vedligeholdelse

Desinfektionsvejledning

Daglig rengøring af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

1. Fjern snavs og spild fra betrækket, før rengøringen starter.
Brug et almindeligt rengøringsmiddel. Rengøringen kan evt. suppleres med en desinfektant.
Se oversigten på næste side.
2. Tør betrækket af med en ren klud, som er vredet op i vand.
3. Tør betrækket grundigt af med en ren, tør klud, før betrækket tages i brug eller lægges væk.
Et vådt betræk er mere modtageligt for skade og slidtage.
4. Følg altid Cobi Rehabs instruktioner, når der bruges kemiske rengøringsmidler. Ikke alle rengøringsmidler kan anvendes på Cobi Cura X10 vekseltryksmadras.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere information eller se oversigten på næste side.



Hovedende

AutoX10 pumpe

Fodende

Retningslinjer for dekontaminering af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

😊 **Anbefales** 😐 **Anbefales med forbehold / Anbefales med kraftige forbehold** 😞 **Anbefales ikke**

Metode	Aktiv %	pH-værdi- er egnet til desin- fektion	Hviletid	Efter påføring	Indvirkning på betræk
Klor og klorblandinger 😊	1,000-10,000 millionte- dele	7-9	<10 min. Afhængigt af styrken og blandingen.	Tør med fugtig, ren klud. Tør efter med tør klud. Lad be- trækket tørre.	Anbefales Anvend opløsning på 1,000 millionte dele til rengøring, og max 10,000 millionte dele til dekontaminering. Undgå at skrubbe hårdt på betrækket.
Glutaraldehyd 😊	2	7,5-8,5	Afhængigt af temperaturen	Tør med fugtig, ren klud. Tør efter med tør klud. Lad be- trækket tørre.	Anbefales
Dampsterili- sation 😊	Ikke relevant	Neutral	3 min. - 134°C 10 min. - 126°C 15 min. - 121°C 30 min. - 115°C	Tør og returnér betrækket til brug eller opbe- varing.	Anbefales med forbehold Høje temperaturer og lange dvæletider kan få betrækket til at krympe. Tjek altid, at betrækket tåler dampsterilisering.
Alkohol 😊	Typisk 70	-	10 min. (MAC)	Tør af med fugtig, ren klud. Tør efter med tør klud.	Anbefales med forbehold Betrækkets overflade kan svulme op og gå i stykker. Behandl derfor betrækket forsigtigt, indtil det er helt tørt.
Orthohtalal- dehyd (OPA) 😊	0,55 %	7,5	5 min.	Tør af med fug- tig, ren klud. Tør efter med tør klud. Lad tørre.	Anbefales med forbehold Efterlader mærker på brugerens hud.
Ethylenoxid 😊	3	-	>30 min. Temperatur- afhængig	Skyl grundigt, og tør efter med tør klud. Lad tørre.	Anbefales med kraftige forbehold Eksplosions- og toksicitetsproblemer ved brug af EtO. Giftrester skader betrækkets biokompatibilitet.
Brintoverilte 😊	3-25 %	5-9	<5 min.	Neutraliser og lad tørre.	Anbefales med kraftige forbehold Brintoverilte skal neutraliseres fuldstændigt. Meget basisk peroxid (10 og derover) må ikke anvendes.
Kvartær ammonium blandinger 😊	3-15 %	7-13	Varierer Se produktets vejledning	Tør med fugtig klud. Tør efter med tør klud. Lad tørre.	Anbefales med kraftige forbehold Kvaternære opløsninger med en pH > 10 anbefales ikke. Brug ikke klude indeholdende natrium- hydroxid (NaOH).
Iodoformer 😞	75-100 millionte- dele	Syre	<20 min.	Udsættes be- træk for iodofo- rer, skylles det med vand og tørres efter med tør klud.	Anbefales ikke Farvning og syreholdige produkter reducerer betrækkets levetid.
Pereddike- syre 😞	0,2-0,35	-	<20 min.	Tør med fugtig, ren klud. Tør efter med tør klud. Lad tørre.	Anbefales ikke
Fenoler 😞	2-12 %	-	10 min.	Kassér.	Anbefales ikke Fenolers syregenskaber ødelægger betrækket.
Tør varme 😞	Ikke relevant	Neutral	10 min. - 126°C 15 min. - 121°C 30 min. - 115°C	Kassér.	Anbefales ikke Tør varme blødgør betrækket, hvilket ødelægger det over tid.
Formaldehyd 😞	2-8	5-7	<10 min.	Tør med fugtig, ren klud. Tør efter med tør klud. Lad tørre	Anbefales ikke Personlige grænseværdier gælder for rengøringspersonalet. Stærk lugt.