

Funktionsindstilling (Se figur 1)

Tryk her for at veksle mellem Autofirm og Vekseltryk.

Autofirm-funktion (00000)

Autofirm-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket slås automatisk fra efter 20 minutter.

Vekseltryk-funktion (00:00:0)

Hver tredje celle i madrassen tømmes eller fyldes på skift, når Vekseltryk er valgt. Justér trykket, så det passer til brugeren ved at trykke på plus- eller minusknappen.

Komfortindstilling (figur 2)

Komforten på madrassen kan gøres hårdere med tryk på + og blødere med tryk på -.

Alarm (figur 3)

Afbrydes strømmen, mens pumpen er tændt, lyder alarmen. Tryk på alarmknappen (figur 6) for at slå lyden fra. Falder trykket i madrassen, mens pumpen kører, vil alarmen også lyse og blinke.

Låse-funktion (figur 4)

Låse-funktionen låser tre sekunder efter, at der sidst er blevet trykket på én af kontrolpanelets knapper. Låse-funktionen låses op ved tryk på (figur 4) i fem sekunder, eller indtil lyset ved knappen slukker.

Sidde-funktion (figur 5)

Pumpen har en siddefunktion, som er beregnet til fx lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen. Funktionen aktiveres ved tryk på SITTING. Pumpen øger nu trykket. Husk at deaktivere funktionen, når brugeren skal ned og ligge.

ALARM-Mute-knappen (figur 6)

Tryk på , hvis lyden skal slås fra, så det kun er dioden, der indikerer alarm.

Ved driftsforstyrrelser

Kontrollér strømsik, luftslanger og celler. Scan QR-koden og få adgang til mere hjælp ved driftsforstyrrelser. Eller kontakt depotet/Cobi Rehabs serviceteknikere.

I tilfælde af hjertestop/CPR

Madrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen sker ved at trække luftslangerne ud af quick release koblingen. Start hjertemassagen, allerede mens madrassen tømmes.

Rengøring af Cobi Hybrid

Til daglig rengøring af madrassen bruges vand, et desinfektions- og/eller et mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud. Madrassen skal være **helt** tør før brug.


Tør strømkablet, luftslangerne og pumpens overflade af med en fugtig klud med vand og et desinfektions- og/eller et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

Betrækket kan maskinvaskes ved 95° C.

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være **helt** tørt, før det lægges på madrassen igen.

Betrækket må **ikke** tørres i tørreskab eller stryges.

Brugsanvisning
Cobi Hybrid

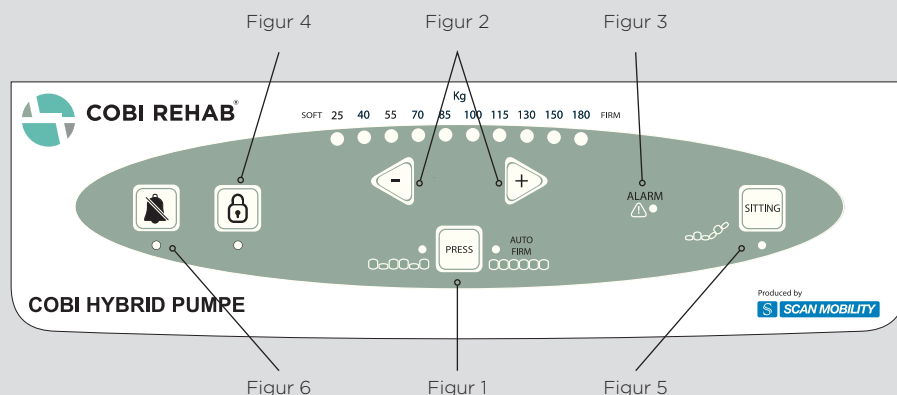

QUICK guide



COBI REHAB®
The Positioning Company

Cobi Hybrid - en kombinationsmadrass

Opsætning af madras og pumpe

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden, så luftslangerne hænger ud ved fodenden.
- 2 Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af monteringsbeslagene på pumpens bagside. Pumpen kan også stilles på gulvet.
- 3 Tilslut de tre luftslanger fra madrassen til en tilfældig indgang i quick release koblingen, som sidder på siden af pumpen.
Når luftslangerne er sat korrekt i koblingen, lyder der en kliklyd. Når luftslangerne skal ud af koblingen, presses metalfladen ind, så luftslangen løsnes.
- 4 Kontrollér, at luftslangerne er monteret rigtigt ved at trække forsigtigt i dem. Sørg for, at luftslangerne ikke er snoede eller gemt under madras eller betræk.
- 5 Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for pumpen på vippekontakten ON/OFF på pumpens venstre side.
- 6 Når pumpen kører, pumpes madrassen op. De forskellige funktioner er inaktive, indtil madrassen er fyldt helt op.
- 7 Det tager 10 minutter at fylde madrassen med luft. Vælg derefter den ønskede funktion.
- 8 Anbring brugeren på madrassen og løft sengehesten op.

