



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Cobi skummadras

Brugsanvisning



ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af Cobi skummadras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må produktet kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dets brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

Cobi Skummadras er en forebyggende trykaflastningsmadras med åndbart, strækbart inkontinens betræk. Betrækket er desuden antibakterielt, aftageligt og kan vaskes ved 95 grader. Kernen er fremstillet af RG 40 skum og toppen er et RG 50 viscoelastisk dæklag.

Madrassen skal placeres så den viscoelastiske skumdel ligger øverst og her placeres brugeren.

Beskrivelse

Cobi Skummadras består af en skumkerne samt et Bolan inkontinensbetræk. For at reducere shear og yderligere beskytte kernen, er madrassen dækket med et tyndt hvidt lag tricot.

Denne madras er til voksne, som er i lav til middel risiko for udvikling af tryksår.

Madrassen kan anvendes op til tryksårsstadiet 2 ifølge EPUAP - afhængigt af patientens vægt.

Brugervægt: 50-130 kg: madrassen kan anvendes op til tryksårsstadiet 2 EPUAP

Denne madras kan også anvendes til smertebehandling, ingen kontraindikationer er kendt eller rapporteret.

Før brug

⚠ Før ibrugtagning tjek om betrækket har skader. I tilfælde af skader på materialet (transportskader) kontakt Cobi Rehab straks.

Madrassen skal placeres så den viscoelastiske skumdel ligger øverst og her placeres brugeren.

Madrassen kan placeres direkte på lamelbund og er også velegnet til brug i plejesenge.

Specifikationer

Madras mål	200 x 85 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm
Materiale og opbygning	Kernen er fremstillet af RG 40 skum og toppen er et RG 50 viscoelastisk dæklag. Betrækket er lavet af PU (polyurethan) bielastisk stof - strækbart, åndbart brandhæmmende inkontinens betræk.
Vægt af madras	10 hhv. 11 kg
Gennemsnitlig holdbarhed	5 år
Belastning	50-130 kg
Anti-allergisk	100% latexfri
Godkendt i henhold til	UNE EN597, 1 og 2, Medical Device Class 1 none sterile for non measurement purpose (R.D 1591/2006 oct 16, DS/EN 12182:2012)
Miljøforsvarlig bortskaffelse	Madrassen: Indgives til genanvendelse. Ca. 98 % kan genbruges.

Vedligeholdelse og rengøring

Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler og vand samt en ren og tør klud. Vær omhyggelig med, at betrækket er HELT tørt før brugeren igen ligger på overfalden.

Betrækket kan maskinvaskes med varmt vand ved 95° C. Brug ikke klor eller lignende. Tåler tørring i tørretumbler ved 40° C.

Skumkernen kan autoklaveres ved op til 110° C eller kemisk-termisk renses for at fjerne eventuel forurening eller bakterier. Bemærk, at skummet er UV-lys følsomt og kan skifte farve ved udsættelse for stærkt sollys over en længere periode - farveændringen har ingen indvirkning på kvaliteten eller anvendeligheden af madrassen.

Garanti

Cobi Rehab garanterer, at produktet er fejlfrit, når det leveres. Hvis der på nogen måde er en mangel eller skade på produktet, når det modtages, skal De omgående bede om et nyt hos Cobi Rehab.

Garantiperioden 3 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Der ydes ikke garanti på produkter hvor serienummer, batch nummer eller lign. er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt, eller på produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale eller hvis Cobi Rehab vurderer at produktet er blevet håndteret på en ureglementeret måde. Denne vurdering foretager Cobi Rehab.

Denne garanti dækker IKKE normal vedligeholdelse så som rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele. Hvis en skade er opstået pga. ukorrekt brug vil der blive faktureret en pris for service og anvendte reservedele. Garantien ovenfor er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.



PRODUCENT

SPM
Cumhuriyet Mh Orhan Alp Yörük
35875 Izmir
Tyrkiet

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com