

Brugervægt

Madrassen er beregnet til brugervægt fra 30 til 130 kg.

Rengøring

- Daglige rengøringer kan udføres ved sengen med desinfektionsmidler og vand samt en ren og tør klud.
- Vær omhyggelig med, at betrækket er HELT tørt før brugeren igen ligger på overfalden.
- Betrækket kan maskinvaskes med varmt vand ved 95o C. Brug ikke klor eller lignende. Tåler tørring i tørretumbler ved temperaturer mellem 80 - 130° C.
- Skumkernen kan autoklaveres ved op til 110° C eller kemisk-termisk renses for at fjerne eventuel forurening eller bakterier.
- Bemærk, at skummet er UV-lys følsomt og kan skifte farve ved udsættelse for stærkt sollys over en længere periode - farveændringen har ingen indvirkning på kvaliteten eller anvendeligheden af madrassen.

Cobi skummadras

Opsætning af madras

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden, så den viscoelastiske skumdel ligger øverst. Madrassen kan placeres direkte på lamelbund og er også velegnet til brug i plejesenge.
- 2 Mærkaten "TOP" markerer området hvor brugerens hoved skal placeres.
- 3 Læg et løst lagen på madrassen.
- 4 Læg brugeren centreret på madrassen.

