



Max 200 kg



Hovedende

AutoX10 pumpe

Fodende

Pumpens funktion

Autofirm-funktion

Autofirm-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter. Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekselsestryk.

Vekslende - Statisk - Siddende

Pumpen har tre funktioner: Vekselsestryk, Statisk og Siddende. Tryk på Skift (figur 4) for at veksle mellem de tre funktioner.

Vekselsestryk veksler madrassens lufttryk i forskellige intervaller. Anbefalet cykustid er 10 minutter.

Statisk bevarer madrassens lufttryk konstant.

Siddende er beregnet til fx lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen.

I tilfælde af hjertestop

Madrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen sker ved at dreje på CPR-ventilen i hovedenden, så ventilen står på OPEN. Bagefter trækkes tilslutningsslangerne ud af pumpen.

Driftsforstyrrelser

Alarmknappen på frontpanelet bipper og lyser (figur 7) ved manglende strøm eller for lavt tryk. Tjek, at luftslinger og CPR-ventilen er korrekt sat i. Kontakt Cobi Rehab for mere hjælp.

Manuel indstilling af brugervægt

Pumpen indstiller sig automatisk til brugerens vægt, men tryk på Soft-knappen (figur 1), hvis der er brug for en blødere madras. Tryk på Firm-knappen (figur 2), hvis der ønskes en hårdere madras.

Rengøring af Cobi Cura X10

Til daglig rengøring af madrassen bruges vand, et desinfektions- og/eller et mildt rengøringsmiddel og en klud.

Pumpen kan rengøres med en hårdt opvredet klud med vand og lidt neutral sæbe.

For yderligere information om rengøring, læs venligst brugsanvisningen til Cobi Cura X10.

Find Cobi Cura X10 brugsanvisning på www.cobirehab.com



Brugsanvisning
Cobi Cura X10

Cobi Cura X10 vekselsestryksmadras

Klargøring af madras og pumpe

1. Læg madrassen direkte på sengebunden med cellerne opad. Fastgør madrassen til hvert hjørne ved hjælp af stropperne.
2. Tjek, at madrassens CPR-ventil er lukket. Ventilen sidder i venstre side i hovedenden.
3. Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af krogene, og slut madrassens luftslinger til koblingen på siden af pumpen.
4. Sæt strømstikket i stikkontakten.
5. Tænd pumpen på vippekontakten på pumpens højre side. Tryk bagefter på ON/OFF-knappen på frontpanelet (figur 6).
6. Tjek, at Autofirm knappen blinker (figur 5). Autofirm knappen stopper med at blinke, når det maksimale lufttryk er fundet.

7. Vent 20 minutter og læg så brugeren på madrassen.
8. Når brugeren ligger på madrassen, indstiller pumpen sig automatisk til Vekselsestryk og til brugerens vægt.

Lås betjening

Frontpanelet låses efter 25 sekunder uden brug. Tryk 5 sekunder på Lås betjening (figur 3) for at aktivere frontpanelet igen.

Håndprøven

Før hånden ind mellem cellerne under brugerens tungeste del (fx bækkenet). Madrassen skal være præcis så fyldt, at brugeren ligger/sidder halvvejs ned i madrassen.

