



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Helmadrassen er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobi Cura X10 helmadrass bruges fx på plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, som er alment eller midlertidigt svækket og derfor har brug for dyb og trykaflastende lejrning.

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Helmadrassen består af 20 luftceller lavet i et forstærket TPU-materiale. Cellerne er 13 cm høje. Under cellerne er der en 6 cm tyk, luftfyldt undermadras. Undermadrassen sikrer, at brugeren ikke ligger direkte på sengebunden i tilfælde af strømsvigt. Samlet højde er 19 cm.

En elektronisk vekseltrykspumpe sørger for, at luften skiftevis pumpes ind eller tømmes ud af de 20 celler. Det vil sige, at celle 1, 3, 5 osv. fyldes med luft, mens celle 2, 4, 6 osv. tømmes langsomt, hvorefter cyklussen vender. Tidscyklussen kan indstilles manuelt.

Vekseltrykket flytter presset på brugerens væv. Det forbedrer blodcirkulationen og forebygger tryksår.

Ved strømsvigt holder madrassen luften i 24 timer.

Madrassens luftceller kan udskiftes enkeltvis. Cellerne holdes på plads ved hjælp af trykknapper. De midterste celler er perforerede. Det sikrer luftgennemtrængning og mindsker varmeophobning.

Betrækket

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart i fire retninger og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er flammehæmmet.

Betrækket kan vaskes, tørretumbles og desinficeres.

Auto X10 pumpen

Pumpen er forsynet med et enkelt og tydeligt display med blandt andet en audiovisuel alarm, der bipper og lyser ved strømsvigt eller tryktab.

Pumpen arbejder næsten lydløst og kan hænge på de fleste sengegavle.

Pumpen har en Autofirm-funktion til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter. Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekseltryk.

Pumpen har en siddefunktion (Siddende) beregnet til fx bariatriske brugere og lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen. Funktionen aktiveres ved tryk på Skift-knappen.


Pumpen indstiller automatisk madrassen til brugerens vægt. Manuel indstilling sker ved tryk på Firm- eller Soft-knappen til det rigtige vægtinterval på displayet nås.

Kontraindikationer

Brugere med ustabile frakturer eller osteoporose bør ikke ligge på en Cobi Cura X10 vekseltryksmadras. Madrassen er ikke egnet til brugere under 20 kg.

Max 200 kg

- Let at rengøre
- Kan genbruges
- Lydsvag pumpe
- Vaskbart betræk.

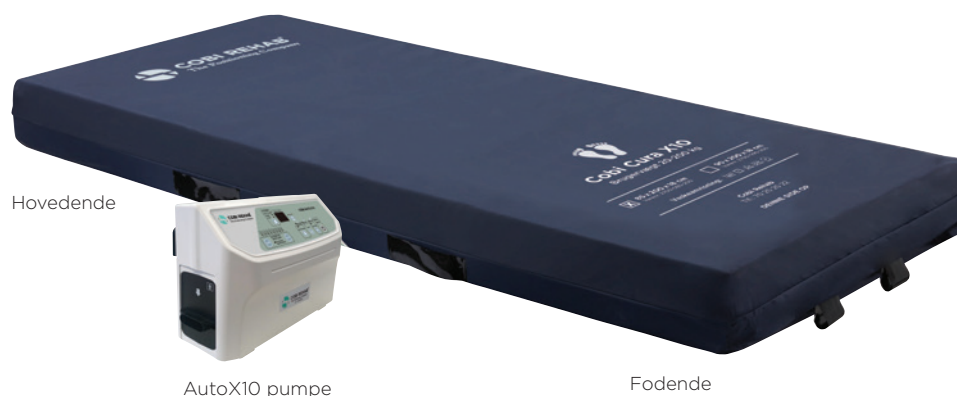

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Specifikationer

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras	
Brugervægt	20-200 kg
Længde	200 cm
Bredde	83/85/88/90 cm
Højde	19 cm
Madrassens vægt	8/9 kg
Pumpens vægt	2,8 kg
Pumpens mål	32 x 24 x 13 cm
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinensbetræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-4
Dartex madrasbetræk, vandtæt og åndbart	PU-coated 100 % polyester
Celler	100 % TPU
Pumpe	ABS flamme-resistent, UL
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28

Bruges til

- Brugere med tryksår stadie 0-4
- Brugere med brug for dyb lejring
- Brugere sengeliggende over længere tid
- Morbus Crohn-, hjerte- eller sclerosepatienter.



Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobi Cura X10 helmadras	200	83	19	2700-083-200	114 858
Cobi Cura X10 helmadras	200	85	19	2700-085-200	112 300
Cobi Cura X10 helmadras	200	88	19	2700-088-200	114 863
Cobi Cura X10 helmadras	200	90	19	2700-090-200	112 424

Tilbehør					
Betræk til Cobi Cura X10	200	83	19	2700-999-019	-
Betræk til Cobi Cura X10	200	85	19	2700-999-020	-
Betræk til Cobi Cura X10	200	88	19	2700-999-021	-
Betræk til Cobi Cura X10	200	90	19	2700-999-022	-
Hurtig-pumpe til Cobi Cura X10 (ekskl. CPR-ventil og studsudtag)	-	-	-	2700-999-100	-
CPR-ventil Cobi Cura X10	-	-	-	2700-999-029	-
Studsudtag komplet til Cobi Cura X10	-	-	-	2700-999-058	-