




**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# Cobi Hybrid

## - en kombinationsmadras

Helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår stadie 1-4

Cobi Hybrid madrassen kan bruges med og uden pumpe og egner sig derfor til et bredt udvalg af patienter med behov for trykaflastning.

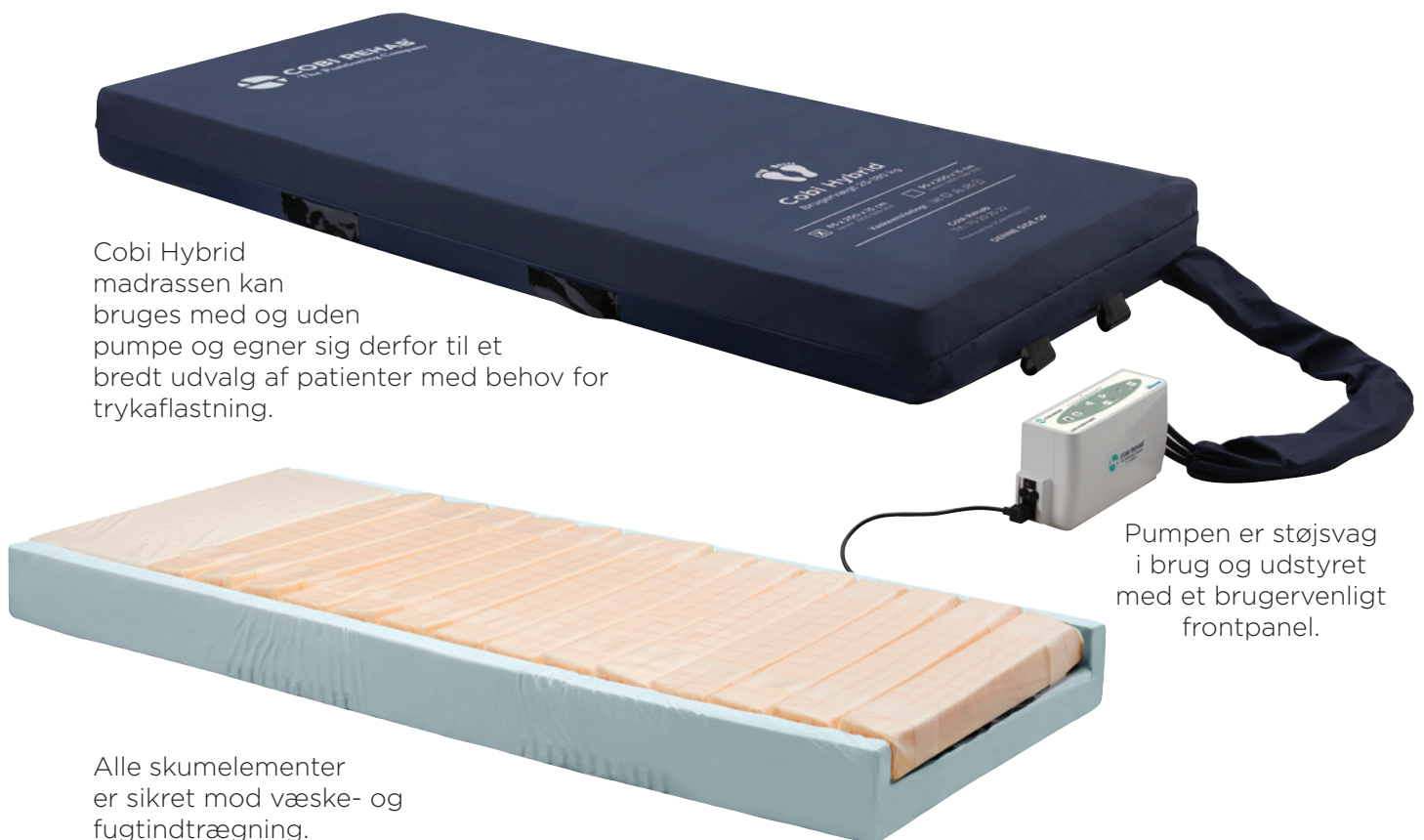

Pumpen er støjsvag i brug og udstyret med et brugervenligt frontpanel.

Alle skumelementer er sikret mod væske- og fugtindtrængning.

- Let at rengøre
- Lydsvag pumpe
- Velegnet til genbrug
- Trykaflastende 1-3 cyklus
- Mulighed for etablering af hælzone
- Til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4.

### Bruges til

- Brugere, der er alment svækkede eller i risikozonen for tryksår.

Madrassen bruges blandt andet på plejecentre, på sygehuse og i hjemmeplejen.

# Cobi Hybrid – en kombinationsmadras

Helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår stadie 1-4

Cobi Hybrid madrassen kan bruges med og uden tilslutning af pumpe og er derfor egnet til et bredt udvalg af patienter med behov for trykaflastning. Pumpen indstilles efter brugerens vægt. Trykket i pumpen kan også indstilles manuelt. Madrassens 14 celler giver maksimal trykaflastning og komfort for brugeren.

## Cobi Hybrid som skummadras

Cobi Hybrid fungerer som en reaktiv trykaflastende skummadras, når pumpen ikke er tilsluttet. Skummet er udskåret i 930 profiler i varierende størrelser. Profilerne er individuelt fleksible og formbare. Det giver en tilpasset og effektiv trykfordeling af hele kroppen.

Alle madrassens celler kan udskiftes, og der kan laves en hælzone ved at fjerne en eller to af de sidste celler.

## Cobi Hybrid som vekseltrykmadras

Når pumpen er tilsluttet, fungerer Cobi Hybrid som en aktiv vekseltrykmadras til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4. Luften pumpes ind i 14 tværgående luftceller, der omkranser skumprofilerne. Cyklussen kører over 10 minutter og arbejder med højt eller lavt tryk. Pumpen er støjsvag og har et lavt strømforbrug.

Cobi Hybrid madrassen ændrer højde, når pumpen tilsluttes. Madrassen kan blive op til 20 cm høj, men der er ikke behov for at ændre på seng, lagner eller sengeheste. Heller ikke når madrassen rammer den maksimale højde.

Der kan laves en hælzone ved at fjerne en eller to af de sidste celler.

## Madrassen

Cobi Hybrid madrassen består af 14 tværgående og skumfyldte luftceller, konstrueret af Low Shear nylon. Den vandrette rørformede cellekonstruktion sikrer optimal komfort og omfordeling af tryk. Cellerne er lavet af støjsvage materialer, der giver en rolig søvn.

I vekseltryktilstand aftager hver tredje celle i madrassen skiftevis i tryk hvert 10. minut. Alle skumelementer under betrækket er pakket ind i et beskyttende hygiejnelag, som sikrer, at der ikke trænger væske og fugt ind.

## Pumpen

Cobi Hybrid pumpen har flere funktioner som fx Autofirm, Vekseltryk og Siddende. Pumpen skal indstilles til brugerens vægt. Pumpen er udstyret med en alarm, der bipper ved strømfejl og trykfald. Trykket i pumpen kan også justeres manuelt. Luftcellerne pumpes op i en 1-3 cyklus.

## Betrækket

Betrækket er et Low Shear, åndbart inkontinensbetræk, der kan strækkes i fire retninger. På den måde reducerer betrækket udviklingen af tryksår, samtidig med at det forhindrer opbygning af fugt fra kroppen og varmeophobning. Betrækket er klorresistent, anti-bakterielt behandlet og flammehæmmende. Betrækket tåler vask og desinfektionsmidler.

## Kontraindikationer

Brugere med ustabile frakturer må ikke ligge på en Cobi Hybrid vekseltrykmadras.

Konsultér altid læge eller terapeut før brugen af vekseltryk på Cobi Hybrid.

# Cobi Hybrid

## Specifikationer

| Cobi Hybrid                           |   |
|---------------------------------------|---|
| Brugervægt                            | 25-180 kg   |
| Længde                                | 200 cm  |
| Bredde                                | 85 / 90 cm  |
| Højde                                 | 15 cm uden pumpe / 18-20 cm med maximalt tryk på pumpe                              |
| Madrassens vægt                       | 13,5 kg   |
| Pumpens mål                           | 30 x 16 x 11 cm   |
| Pumpens vægt                          | 2,2 kg  |
| Alarm ved lufttab                     | Ja  |
| Alarm ved strømtab                    | Ja  |
| Lyntømningsfunktion                   | Ja  |
| Statisk funktion                      | Ja  |
| Anvendelig direkte på sengebund       | Ja  |
| Anvendelig til indstillelig sengebund | Ja  |
| Brandhæmmende betræk                  | Ja  |
| Inkontinensbetræk                     | Ja  |
| Allergivenligt betræk                 | Ja  |
| Vask- og desinficérbart betræk        | Ja  |
| Tryksårsforebyggende stadie           | 1-4   |
| Madrasmembran                         | Polyamid med polyurethan beklædning.<br>Oeko-Tex Standard 100.                      |
| Celler                                | Lyddæmpede celler af polyether TPU.   |
| Skum                                  | Skum af polyether polyuretan.<br>Overholder brandkrav:<br>S1 P1 1988 S.I. No. 1324. |
| Pumpe                                 | Lydsvag, 10 tryk-niveauer.<br>Luftcellerne pumpes op i en 1-3 cyklus.               |
| Holdbarhed                            | Ca 7 år afhængigt af brug og vedligeholdelse.                                       |
| ISO - klassifikation                  | ISO 9001:2015   |


### Bruges til

- Brugere, der er alment svækkede eller i risikozonen for tryksår.

Madrassen bruges blandt andet på plejecentre, på sygehuse og i hjemmeplejen.



Cellerne er lavet af lydsvage materialer, der giver en rolig søvn.

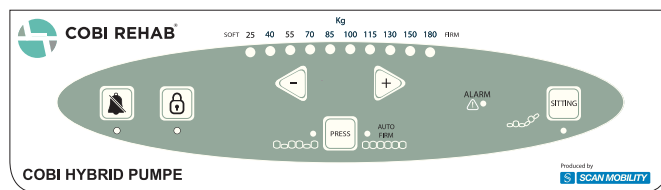

Pumpen indstilles efter brugerens vægt, men kan også gøres fastere eller hårdere.

| Model       | Længde cm | Bredde cm | Højde cm  | Varenummer   | HMI    |
|-------------|-----------|-----------|---|--------------|--------|
| Cobi Hybrid | 200       | 85        | 15 cm uden pumpe /<br>18-20 cm med maximalt tryk på pumpe | 2900-085-200 | 111293 |
| Cobi Hybrid | 200       | 90        | 15 cm uden pumpe /<br>18-20 cm med maximalt tryk på pumpe | 2900-090-200 | 111294 |





**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)