



Scan koden og få flere produktinformationer.



Brugervægt

Madrasen er beregnet til en brugervægt på 30-160 kg.

CPR/Ved hjertestop

I tilfælde af hjertestop trækkes den sorte slange, markeret med rødt CPR, ud af pumpen.

Rengøring

Luftmadras og pumpe skal rengøres omhyggeligt ved skift mellem brugere for at undgå krydskontaminering.

Sengen kan rengøres med desinfektionsmidler eller vand og et mildt rengøringsmiddel.

Pumpen kan rengøres med en hårdt opvredet klud med lidt neutral sæbe.

Celler og betræk skal være helt tørre, før brugeren lægges på madrassen igen.

Betrækket kan maskinvaskes op til 95° C.

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være helt tørt, før det lægges på madrassen.

Betrækket må ikke tørres i tørreskab og må ikke stryges.

Find den udvidede brugsanvisning på cobirehab.com

QUICK guide



COBI REHAB®
The Positioning Company

Carital Optima statisk madras

Opsætning af Carital Optima

- 1 Læg madrassen i sengen.
- 2 Tilslut slangerne til kontrolsystemet/pumpen. Brug farvekoderne.
- 3 Tilslut strøm. Tænd apparatet på O/I knappen.
- 4 Læg et lagen løst hen over madrassen.
- 5 Tryk på "Normal" og læg derefter brugeren på madrassen.
Pumpen indstiller automatisk de forskellige sektioner i madrassen til brugerens vægt og stilling.

- A** Normal-funktion betyder, at pumpen hvert 2. minut tilpasser trykket i madrassen ud fra brugerens vægt og placering.
- B** Supine-funktionen bruges, når brugeren kun kan ligge ned. Trykket minimeres til det mindst mulige i de tre sektioner i madrassen.
- C** Firm-funktionen holder trykket i madrassens midtersektion statisk i 15 minutter. Funktionen bruges til pleje i sengen.
- D** Stille-funktionen bruges til meget lydfølsomme brugere, der i en kortere periode, fx om natten, har mere brug for ro end for automatisk tilpasning af tryk.
- E** Sidde-funktionen er beregnet til brugere med behov for at sidde i en 45° position over længere tid. En automatisk alarm med lyd og lys minder efter 60 min. om, at sidde-funktionen er aktiveret.
- F** Denne funktion deaktiverer alarmen, der lyder hver time, når sidde-funktionen er aktiveret. Tryk først på sidde-funktionen, derefter på deaktiver alarm-knappen.
- G** Stop-knappen slukker for alarmen, når den lyder. Alarmen lyder igen efter 15 minutter, hvis ikke fejlen rettes.

