

Cobi Cura X10 hurtig-pumpe

1. Læg madrassen direkte på sengebunden med cellerne opad. Fastgør madrassen til hvert hjørne ved hjælp af stropperne.
2. Tjek, at madrassens CPR-ventil er lukket. Ventilen sidder i hovedenden.
3. Tilslut hurtig-pumpens kobling til madrassens kobling.
4. Sæt strømstikket i stikkontakten.
5. Tænd hurtig-pumpen på den sorte knap ved håndtaget. Det tager under tre minutter at pumpe madrassen op.
6. Tilslut madrassens kobling til den almindelige pumpe. Sæt transportdækslet på, hvis madrassen ikke skal i brug med det samme.

Ved brug af en omformer kan madrassen også pumpes op med et 12 volt udtag fra en bil.



Hovedende

Fodende



Hurtig-pumpe

For uddybende information om Cobi Cura X10 almindelig pumpe, læs brugsanvisningen til Cobi Cura X10 på cobirehab.com