

Rengøring

- Daglig rengøring kan foretages med desinfektionsmidler, vand og en ren, tør klud.
- Betrækket skal være helt tørt, før brugeren igen må ligge på det.
- Betrækket kan vaskes på 90° C. Brug ikke klor eller lignende i vasken. Betrækket kan tørres i tørretumbler ved 40° C.
- Skumkernen kan autoklaveres ved 110° C eller kemisk-termisk renses for at fjerne eventuelle bakterier.
- Skummet er UV-lysfølsomt og kan skifte farve, hvis det bliver udsat for stærkt sollys over en længere periode. Farveændringen har ingen betydning for kvaliteten eller madrassens anvendelighed.

Cobi skummadras

Opsætning af madras

- 1 Læg madrassen direkte på sengebunden, så det viskoelastiske dæklag ligger øverst.
- 2 Mærkatet "TOP" markerer området, hvor brugerens hoved skal placeres.
- 3 Læg et løst lagen på madrassen.
- 4 Læg brugeren centrert på madrassen.

