



H2O kørestolspude

Retningslinjer for rengøring og vedligeholdelse

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Daglig rengøring af H2O kørestolspude

1. Fjern snavs og spild fra kørestolspuden, før rengøringen starter.
Brug et almindeligt rengøringsmiddel.
2. Tør først kørestolspuden af med en ren klud, som er vredet op i vand.
3. Tør derefter kørestolspuden af med en ren, tør klud, før den tages i brug igen.

Vedligeholdelse og rengøring

Betræk

Komfortbetrækket kan vaskes ved 60°C. Inkontinensbetrækket kan vaskes ved 90°C. Det anbefales, at vaske betrækket med vrangen udad. Begge betræk kan tørretumbles ved lav temperatur.

Anvend ikke rengøringsmidler med alkohol eller phenol. Kørestolspuden må ikke bruges, hvis betrækket er beskadiget.

Vandcellerne

Vandcellerne skal som minimum efterses to gange årligt for at sikre, at vandmængden i vandcellerne er intakt. Defekte vandceller reducerer trykaflastningen. Påfyldning af vand i vandcellerne må kun foretages af Cobi Rehab eller specialuddannet personale.

Se nedenstående tabel for den rette mængde vand.

Bemærk: Kilointervallet angiver den totale vægt pr. vandcelle inklusiv vand.

Pude cm	40x40	40x45	40x50	45x40	45x45	45x50	50x45	50x50	61x50	66x50	70x50
Vægt/ celle kg	0,9	1,20	1,20	1,00	1,35	1,35	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Skumrammen

Skumrammen må ikke vaskes i vaskemaskine eller autoklaveres. Den må heller ikke udsættes for ekstrem kulde eller varme.

Kontakt Cobi Rehab for uddybning af desinfektionsvejledningen.



Korrekte vedligeholdelses- og rengøringsrutiner kan forlænge levetiden på H2O kørestolspuden.