



Cobi hygiejnepuder

Retningslinjer for rengøring- og vedligeholdelse

Desinfektionsvejledning

Rengøring og desinfektion af Cobi hygiejnepuder

Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal Cobi Hygiejnepuden tørres hurtigst muligt efter brug.

Hæng hygiejnepuden op et lunt sted, og lad den tørre helt dér.

Hygiejnepuden kan også tørres i tørreskab ved max 60° C eller i tørretumbler ved max 60° C.

Ved behov for vask kan Cobi hygiejnepuden vaskes i vaskepose ved max. 60° C. Læg kun én hygiejnepude i hver vaskepose.

Brug almindeligt vaskemiddel, men intet skyllemiddel!

Cobi hygiejnepuden skal på grund af størrelsen og tyngden altid vaskes i en større vaskemaskine.

Hygiejnepuden kan desinficeres med et desinficeringsmiddel med en PH-værdi under 11,4.

Undgå skyllemidler og andre tilsætningsstoffer, som indeholder opløsningsmidler.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere information.

Cobi Bananhygiejnepuder

Cobi Halvmånehygiejnepude



Cobi T-hygiejnepude



Cobi Nakkehygiejnepude

