



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# Cobi hygiejnepuder

Positioneringspuder til brug i badesituationer

## Bruges til



- Neurologiske patienter
- Alment svækkede medicinske eller geriatriske brugere
- Brugere med svære fejlstillinger eller udadreagerende adfærd
- Undervægtige brugere
- Brugere med komplekse smerter.

## Brugsanvisning



## ADVARSEL

Cobi hygiejnepuder må ikke bruges uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Cobi Hygiejnepuder, da forkert tilpasning eller brug kan skade brugeren.

 Brugsanvisningen skal læses grundigt før Cobi Hygiejnepuder tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med .

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på Cobi hygiejnepuder eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Cobi hygiejnepuder.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreserverede.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

## Anvendelse

Hygiejnepuderne kan bruges af mange patientgrupper fx brugere med neurologiske skader, undervægtige brugere, alment svækkede medicinske eller geriatriske brugere, brugere med svære fejlstillinger eller udadreagerende adfærd.

Hygiejnepuderne gavner også arbejdsforholdene for plejepersonalet, fordi den stabile positionering mindsker risikoen for, at brugeren glider eller ender i en uheldig position.

## Beskrivelse


Cobi hygiejnepuder bruges til at løse forskellige positioneringsproblematikker.

Puderne er fyldt med små brandhæmmende EPS-kugler. Det betyder, at puderne ikke ændrer facon, og at de er nemme at anvende samt sikrer en stabil lejring i badesituationer.

Vand trænger nemt igennem, så pudens vægt ikke øges nævneværdigt, når de bliver våde.

I brug skal den sorte side vende ind mod brugerens krop.

Når hygiejnepuden skal tørre, skal den hænges op med den blå netside nedad, så vandet kan løbe ud af hygiejnepuden.

 Cobi hygiejnepuder bør kun tilknyttes én bruger og ikke deles mellem brugere pga. risikoen for spredning af bakterier.

## Cobi hygiejnepuder

Cobi Halvmånehygiejnepude



Cobi Nakkehygiejnepude



Cobi T-hygiejnepude



Cobi Bananhygiejnepuder



### Cobi Halvmånehygiejnepude

Halvmånepuden bruges som en lille stabil støtte langs med truncus i badestol eller som nakkestøtte på bruselejet.

### Cobi Nakkehygiejnepude

Puden supplerer den eksisterende hovedstøtte i badestol eller på bruseleje og sikrer endnu bedre stabilisering og centrering af hoved og nakke.

### Cobi T-hygiejnepude

T-puden bruges til at separere eller centrere. Den stabiliserer ben og fødder i badestol eller på bruselejet.

T-puden giver støtte ved fejlstillinger i fødder og fylder op, hvis fødderne ikke hviler tilstrækkeligt på fodstøtten.

### Cobi Bananhygiejnepude S

Puden støtter under en paretisk arm og i siden på overkroppen. Puden virker også som underarmsstøtte for begge arme i skødet eller som fyld bag nakke og skuldre.

### Cobi Bananhygiejnepude M og L

Puden støtter hele kroppen i badestolen eller på bruselejet. Den fungerer også som fyld ved stabilisering af undervægtige brugere. Puden placeres bag ved nakken og støtter overkroppen på hver side. Puden skal placeres inden for armlænet. Den kan også placeres fra nakke og ned under den ene arm foran personen. Placeres puden langs kroppen giver den en sikker maveliggende positionering på bruselejet ved vask af ryggen.

## Eksempler på lejring/brug af Cobi hygiejnepuder



### Cobi Bananhygiejnepude L

Puden giver side- og nakkestøtte samt støtte af paretisk arm.



### Cobi Bananhygiejnepude L og Cobi Nakkehygiejnepude

Begge puder giver en stabil og tryk sideliggende lejring, som gør det nemmere for personalet at udføre plejeopgaver. Puderne kan også ligge bag ryggen og kan med fordel anvendes til brugere ude af stand til at opretholde en siddestilling.



### Cobi Bananhygiejne pude L, Cobi Nakkehygiejnepude og Cobi T-hygiejnepude S

Pudernes udformning og placering gør det muligt at lægge brugeren stabilt i en 30° graders sideliggende stilling.



### Cobi Bananhygiejnepude L og Cobi T-hygiejnepude L

Den symmetriske armstøtte giver en følelse af afgrænsning og tryk. Puden kan også bruges til positionering af fejlstillede fødder. Puden er desuden god til urolige og utrygge brugere.



### Cobi Bananhygiejne pude S og Cobi T-hygiejnepude L

Pudernes placering stabiliserer hofte, knæ og understøtter nakken i rygliggende stilling.

# Rengøring

Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal Cobi Hygiejnepuden tørre hurtigst muligt efter brug.

Hæng hygiejnepuden op et lunt sted og lad den tørre helt. Pudren hænges op med den blå side nedad, så vandet kan løbe fra.

Hygiejnepuden kan også tørres i tørreskab eller i tørretumbler ved max 60° C.

Ved behov kan Cobi Hygiejnepuden vaskes i vaskepose ved max. 60° C. Læg kun én hygiejnepude i hver vaskepose.

Brug almindeligt vaskemiddel, men intet skyllemiddel!

Cobi hygiejnepuden skal på grund af størrelsen og tyngden altid vaskes i en større vaskemaskine.

Hygiejnepuden kan desinficeres med et desinficeringsmiddel med en PH-værdi under 11,4.

# Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på forsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.

# Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Cobi Hygiejnepuden er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Cobi Hygiejnepuden ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Cobi Hygiejnepuden er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Cobi Hygiejnepuden er blevet håndteret på en ureglementeret måde, fx hvis brugervægten overskrides. Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti.



# Specifikationer

Yderbetræk overside	100 % polyester
Yderbetræk underside	100 % polyester netstof
Fyld-materialer	Brandhæmmende EPS-kugler (ekspanderet polystyren)
Rengøring og desinfektion	Hæng hygiejnepuden op et lunt sted med den blå side nedad, så vandet kan løbe fra.
	Kan også tørres i tørreskab eller i tørretumbler ved max. 60° C.
	Kan vaskes i vaskepose ved max. 60° C. Vaskes altid i en større vaskemaskine.
	Brug almindeligt vaskemiddel, ikke skyllemiddel!
	Kan desinficeres med et desinficeringsmiddel med en PH-værdi under 11,4.
ISO - klassifikation	30 09 33 - 04

Scan koden og få flere produktinformationer.



## FORHANDLER / PRODUCENT

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
cobirehab.com

10/2019/CP



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)