



### Funktionsindstilling (Se figur 1)

Tryk her for at veksle mellem Autofirm og Vekseltryk.

### Autofirm-funktion (00000)

Autofirm-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket slås automatisk fra efter 20 minutter.

### Vekseltryk-funktion (00:00:0)

Hver tredje celle i madrassen tømmes eller fyldes på skift, når Vekseltryk er valgt. Justér trykket, så det passer til brugeren ved at trykke på plus- eller minusknappen.

### Komfortindstilling (figur 2)

Komforten på madrassen kan gøres hårdere med tryk på + og blødere med tryk på -.

### Alarm (figur 3)

Afbrydes strømmen, mens pumpen er tændt, lyder alarmen. Tryk på alarmknappen (figur 6) for at slå lyden fra. Falder trykket i madrassen, mens pumpen kører, vil alarmen også lyse og blinke.

### Låse-funktion (figur 4)

Låse-funktionen låser tre sekunder efter, at der sidst er blevet trykket på én af kontrolpanelets knapper. Låse-funktionen låses op ved tryk på (figur 4) i fem sekunder, eller indtil lyset ved knappen slukker.

### Sidde-funktion (figur 5)

Pumpen har en siddefunktion, som er beregnet til fx lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen. Funktionen aktiveres ved tryk på SITTING. Pumpen øger nu trykket. Husk at deaktivere funktionen, når brugeren skal ned og ligge.

### ALARM-Mute-knappen (figur 6)

Tryk på , hvis lyden skal slås fra, så det kun er dioden, der indikerer alarm.

### Ved driftsforstyrrelser

Kontrollér strømstik, luftslanger og celler. Scan QR-koden og få adgang til mere hjælp ved driftsforstyrrelser. Eller kontakt depotet/Cobi Rehabs serviceteknikere.

### I tilfælde af hjertestop/CPR

Madrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen sker ved at trække luftslangerne ud af quick release koblingen. Start hjertemassagen, allerede mens madrassen tømmes.

### Rengøring af Cobi Hybrid

Til daglig rengøring af madrassen bruges vand, et desinfektions- og/eller et mildt rengøringsmiddel samt en ren og tør klud. Madrassen skal være **helt** tør før brug.

Tør strømkablet, luftslangerne og pumpens overflade af med en fugtig klud med vand og et desinfektions- og/eller et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.


Betrækket kan maskinvaskes ved 95° C.

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme. Betrækket skal være **helt** tørt, før det lægges på madrassen igen.

Betrækket må **ikke** tørres i tørreskab eller stryges.



Brugsanvisning  
Cobi Hybrid

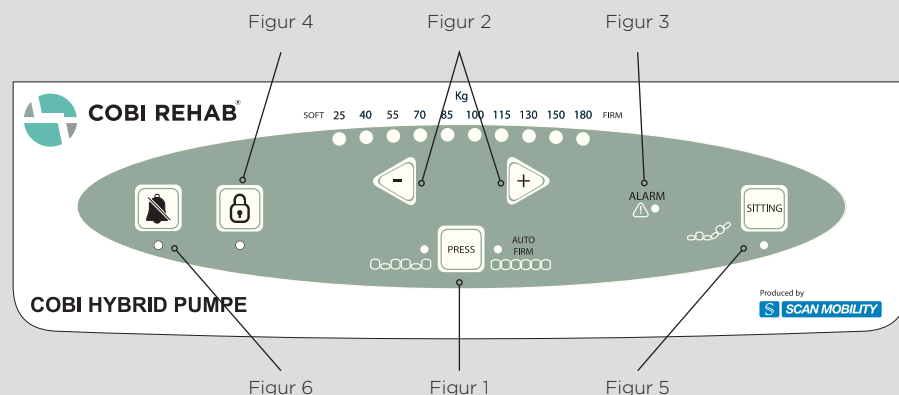

# Cobi Hybrid

## - en kombinationsmadrass

### Opsætning af madras og pumpe

- Læg madrassen direkte på sengebunden, så luftslangerne hænger ud ved fodenden.
- Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af monteringsbeslagene på pumpens bagside. Pumpen kan også stilles på gulvet.
- Tilslut de tre luftslanger fra madrassen til en tilfældig indgang i quick release koblingen, som sidder på siden af pumpen. Når luftslangerne er sat korrekt i koblingen, lyder der en kliklyd. Når luftslangerne skal ud af koblingen, presses metalfladen ind, så luftslangen løsnes.
- Kontrollér, at luftslangerne er monteret rigtigt ved at trække forsigtigt i dem. Sørg for, at luftslangerne ikke er snoede eller gemt under madras eller betræk.
- Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for pumpen på vippekontakten ON/OFF på pumpens venstre side.
- Når pumpen kører, pumpes madrassen op. De forskellige funktioner er inaktive, indtil madrassen er fyldt helt op.
- Det tager 10 minutter at fylde madrassen med luft. Vælg derefter den ønskede funktion.
- Anbring brugeren på madrassen og løft sengehesten op.

