



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Cobi skummadras T6

Bruges som

Max 200 kg

Brugsanvisning

- Underliggende skummadras til fx vekseltryk topmadrassen Cobi Cura X5



Medical device



ADVARSEL

Cobi skummadras T6 må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af skummadrassen. Forkert montering kan skade brugeren.

Bruges Cobi skummadras T6 til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige skummadrassen.

Brugsanvisningen skal læses grundigt før Cobi skummadras T6 tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med .

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på skummadrassen eller personskader forårsaget af forkert tilpasning, forkert montering eller forkert anvendelse af Cobi skummadras T6.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

Beskrivelse

Cobi skummadras T6 anbefales som underliggende madras til Cobi Cura X5 vekselryk topmadras, eller anden topmadras. Skummadrassen placeres direkte på sengebunden.

Cobi skummadras T6 er betrukket med et åndbart og strækbart inkontinensbetræk. Inkontinensbetrækket er antibakterielt, aftageligt og kan vaskes på 95° C.

Cobi skummadras T6 er fremstillet af miljøvenligt koldskum.

Anvendelse

Cobi skummadras T6 fungerer som underlag til Cobi Cura X5 vekselryk topmadras.

Cobi skummadras T6 kan anvendes til indstillelige (motoriserede) plejesenge med 4-delt liggeflade.

Specifikationer

Generelt	
Brugervægt	20-200 Kg
ISO-klassifikation	18 12 18 - 25
Generelle krav og prøvningsmetoder	Ja. Overholder DS/EN 12182:2012
Prøvningsmetoder til bestemmelse af funktionelle egenskaber og vurderingskriterier	Ja. Overholder ISO 3385 svarende til DS/EN 1957:2012
Estimeret holdbarhed	7 år
Miljøforsvarlig bortskaffelse	Aflever madrassen til genanvendelse, da størstedelen af madrassen kan genanvendes
Madras	
Længde	200 cm
Bredde	83/88 cm
Højde	6 cm
Vægt	3,2/3,4 Kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Madrasmateriale	CM HR PUR-skum (brandhæmmende højelastisk polyurethan skum)
Brandhæmmende madras	Ja. Overholder DS/EN 597-1 og 2
Betræk	
Aftageligt, allergivenligt, vask- og desinficerbart inkontinensbetræk	Ja
Madrasbetrækmateriale	Polyurethan
Brandhæmmende betræk	Ja. Overholder DS/EN ISO 12952-1 og 2:2010

Rengøring

Daglig rengøring kan foretages med et mildt rengøringsmiddel, vand og en ren, tør klud.

Betrækket kan maskinvaskes på 95° C. Brug ikke klor eller lignende i vasken. Betrækket kan tørres i tørretumbler ved lav varme.

Betrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Inkontinensbetrækket skal være helt tørt, før brugeren igen må ligge på det.

Desinficer Cobi skummadras T6 mellem hver bruger. Manglende desinficering øger risikoen for krydskontaminering og infektioner.

Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Cobi skummadras T6 er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på skummadrasen ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Cobi skummadras T6 er et år fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Cobi skummadras er blevet håndteret på en ureglementeret måde, fx hvis brugervægten overskrides.

Ved skade på grund af uhensigtsmæssig brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på forsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.



Medical device

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

COUNTRY OF ORIGIN

SPM
Cumhuriyet Mh Orhan Alp Yörük
35875 Izmir
Tyrkiet



PRODUCENT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
cobirehab.com

01/2020/CP



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
cobirehab.com