



# Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras

Vekseltryk topmadrasen er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 1-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras bruges fx på plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, som er alment eller midlertidigt svækket og derfor har brug for dyb og trykaflastende lejrning.

## Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras

Topmadrasen består af 20 luftceller lavet i et forstærket plastmateriale. Cellerne er 12 cm høje. Under cellerne er der et bundbetræk.

Cobi Cura X5 er en topmadras, som skal anvendes oven på en underliggende madras, fx Cobi Rehab skummadras T6.

En elektronisk vekseltrykpumpe sørger for, at luften skiftevis pumpes ind eller tømmes ud af de 20 celler. Det vil sige, at celle 1, 3, 5 osv. fyldes med luft, mens celle 2, 4, 6 osv. tømmes langsomt, hvorefter cyklussen vender. Tidscyklussen kan indstilles manuelt.

Vekseltrykket flytter presset på brugerens væv. Det forbedrer blodcirkulationen og forebygger tryksår.

Ved strømsvigt holder topmadrasen luften i 24 timer.

Topmadrassens luftceller kan udskiftes enkeltvis. Cellerne holdes på plads ved hjælp af trykknapper. De midterste celler er perforerede. Det sikrer luftgennemtrængning og mindsker varmeophobning. Alle topmadrassens dele kan udskiftes ved behov.

## Betrækket

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart i fire retninger og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er flammehæmmet.

Betrækket kan vaskes, tørretumbles og desinficeres.

## Auto X10 pumpen

Pumpen er forsynet med et enkelt og tydeligt display med blandt andet en audiovisuel alarm, der bipper og lyser ved strømsvigt eller tryktab.

Pumpen arbejder næsten lydløst og kan hænge på de fleste sengegavle.

Pumpen har en Autofirm-funktion til pleje i sengen. Funktionen fylder topmadrasen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter. Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekseltryk.

Pumpen har en siddefunktion (Siddende) beregnet til fx bariatriske brugere og lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen. Funktionen aktiveres ved tryk på Skift-knappen.

Pumpen indstiller automatisk topmadrasen til brugerens vægt. Manuel indstilling sker ved tryk på Firm- eller Soft-knappen til det rigtige vægtinterval på displayet nås.

## Kontraindikationer

Brugere med ustabile frakturer eller osteoporose bør ikke ligge på en Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras. Topmadrasen er ikke egnet til brugere under 20 kg.

Max 200 kg

- Let at rengøre
- Kan genbruges
- Lydsvag pumpe
- Vaskbart betræk.



## Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras

### Specifikationer

Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras	
Brugervægt	20-200 kg
Længde	200 cm
Bredde	83 / 88 cm
Højde	12 cm
Madrassens vægt	7 / 8 kg
Pumpens vægt	2,8 kg
Pumpens mål	32 x 24 x 13 cm
Audiovisuel alarm ved lufttab	Ja
Audiovisuel alarm ved strømsvigt	Ja
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Nej
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinensbetræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Beregnet til sårkategori	1-4
Madrasbetræk, vandtæt og åndbart	PU-coated 100 % polyester
Celler	100 % TPU
Pumpe	ABS flamme-resistent, UL94
ISO - klassifikation	ISO 04 33 06-10

### Bruges til

- Forebyggelse af tryksår
- Brugere med tryksår stadie 1-4
- Brugere med brug for dyb lejring
- Brugere sengeliggende over længere tid.



Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras	200	83	12	2710-083-200	119709
Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras	200	88	12	2710-088-200	119710

Tilbehør					
Betræk til Cobi Cura X5	200	83	12	2710-999-019	-
Betræk til Cobi Cura X5	200	88	12	2710-999-021	-
Hurtig-pumpe til Cobi Cura X5 og X10 (ekskl. CPR-ventil og studsudtag)	-	-	-	2700-999-100	-
CPR-ventil Cobi Cura X5 og X10	-	-	-	2700-999-029	-
Studsudtag komplet til Cobi Cura X5 og X10	-	-	-	2700-999-058	-