


LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE



LASAL & Mobilia TRANSPORTERE til:

- Hvile
- Afslapning
- Komfort
- Stabilisering
- Støtte
- Transport



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL®

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL Transporter 6800/6900

Mobilia Transporter MT5

Mini LASAL Transporter MT6

6800/6900



MT5



Mini MT6



Transportere med

- Løfte- og sænkefunktion
- Vippefunktion
- Fodforlænger
- Bremses
- Styrehåndtag



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

Generel information om transportere

Mobilia & LASAL Transportere er ligge-, sidde-, hvile- og transportvogn i ét. Monteret med hjul og med hæve/sænkefunktioner kan vognen indstilles på en hurtig og nem måde, så den passer til den enkelte. Til vognen bruges indsatspuder, hvilket giver utallige variationsmuligheder for lejring og transport af svært funktionshæmmede børn, voksne og ældre. Transporterne er ikke egnede til personer, som kan forflytte sig af egen kraft.

- Transporterne er konstrueret til at være en hvile- og afslapningsvogn og muliggør samtidig transport fra sted til sted og sparer derved personalet for mange forflytninger.
- Rygdelen er udstyret med en hæve/sænkefunktion, der gør det muligt at veksle mellem siddende og liggende stilling.
- Sædedelen har en vippefunktion, der hindrer at brugeren skrider fremad i sædet (kun model 6800/6900).
- Fodstøtten (Model 6800/6900) har en hæve/sænkefunktion og længden kan justeres, så den passer til benlængden.
- Transporteren kan indstilles i højden, hvilket sikrer hjælperen en korrekt arbejdsstilling samt individuel og situationsbestemt højdeindstilling .

Hvor bruges transporteren?

- Transporteren anvendes i situationer, hvor brugeren har behov for aflastning i forhold til seng eller kørestol.
- Brugeren kan typisk ikke sidde i kørestolen i mere end et par timer ad gangen og alternativet hertil er ofte et stationært sted som f.eks. sengen, en sækkestol eller en madras på gulvet.
- Den traditionelle løsning gør, at brugeren bliver afskåret fra socialt samvær med andre, da alternativerne er sædvanligvis placeret på brugerens eget værelse eller i et hjørne af opholdsrummet. Med en transporter som alternativ kan brugeren fortsat være en del af fællesskabet.

Hvem kan bruge en transporter?

Børn og voksne med f.eks.:

- Fysisk immobilitet
- Multihandicaps
- Rygdeformiteter
- Spasticitet



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk 🇩🇰 Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL TRANSPORTER



MODEL 6800


Model 6800 leveres med en manuel justérbar fodstøtte som kan hæves/sænkes, så den passer til en liggende eller siddende stilling. Ved at skubbe fodstøtten frem eller tilbage i en skinne, kan længden justeres, så den passer til benlængden.



MODEL 6900

Model 6900 leveres med en elektrisk justérbar fodstøtte, som betjenes med en håndkontrol. Fodstøtten kan løftes horisontalt eller sænkes til en nedadhængende position.

Pr. 1. juni 2014 har begge fodstøtter samme facon og design.

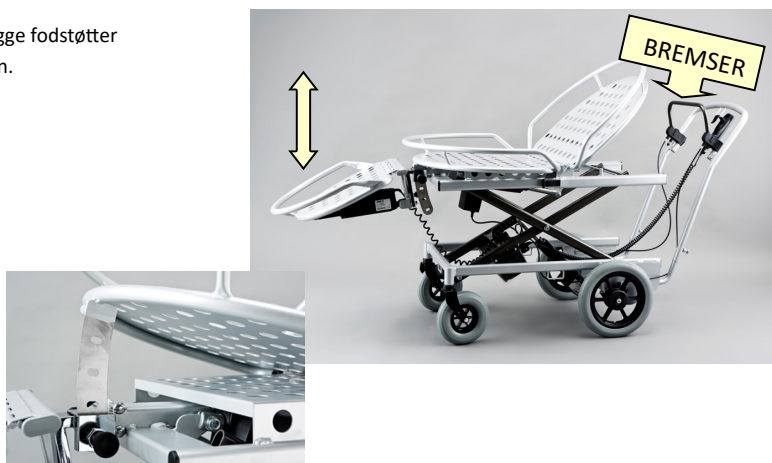

820

Passer kun til manuel fodstøtte gl. model



840



880 (ej ill).

Samme facon som 840, men højere og mere

Puder til fodstøtten

Til begge modeller fås puder til støtte af fødder og ben. Puderne leveres med aftageligt vaskbart betræk. 840, 880 og 860 passer alle til både el-fodstøtte og den nye model af manuel fodstøtte.



860



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

Mobilia Transporter MT5




MT5 er en mobil hvile- og aflastningstransporter udviklet til personer, der er alvorligt funktionshæmmede og som har brug for varierende stillingskift. MT5 henvender sig primært til brugeren, hvor en opret siddestilling ikke længere er mulig og liggende stilling derfor foretrækkes. Transporteren kan justeres i højde og længde og desuden leveres 45 ° i rygdelen.



- Elektrisk hæve/sænke funktion
- Elektrisk vippefunktion
- Håndholdt kontrolenhed
- Indbygget forlænger i sædedelen
- Fodforlænger
- Bremses
- Styrehåndtag
- Ramme til indsatspuder



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL®

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

INDSATSPUDE TIL LASAL OG MT5 TRANSPORTERE



LASAL båd, skummadras (blå) og kileformet pude



LASAL båd med bananformet pude

LASAL båden findes i tre længder og passer til begge transportere. LASAL båden fås også i en fastere udgave, som kan bruges på gulvet eller andre flade underlag. Med sin ovale form kan LASAL båden omkrænse hele kroppen på en behagelig og tryk måde og samtidig give ekstra støtte til nakke-regionen. Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker og kan nemt vaskes af. Bådens kant er fyldt med små polystyren kugler og det ovale hul i midten består af en skummadras. Bådens bagside er fremstillet af et skridsikkert materiale for at forhindre båden i at glide på underlaget.

Til brug i båden findes der en kileformet pude (nr. 521), som placeres under brugerens nakke og skulderregion. Specielt brugere med en lettere skævhed i ryggen kan have gavn af denne pude, da den støtter den øverste del af ryggen og former sig efter brugerens facon.



Duplo puden

En to-delt formbar pude i oval facon. Denne pude minder i funktion om sække-stolen og kan formes på samme måde, hvilket er en fordel for brugeren med f.eks. Scoliosis eller anden rygdeformitet. Pudens formes så den passer til personen, der skal sidde i den.



Triplo puden

Som Duplo pudens— blot tre-delt.



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

INDSATSPUDER TIL LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE



Mobilia Tumle båd

Denne båd minder i facon om LASAL båden og fås også i tre længder. Den er smallere i skummadrassen og fastere i kransen. Anbefales til personer, der har brug for et fastere leje og omkransning af kroppen. Er ikke egnet til brugere med rygdeformiteter. Kan også fås som gulvmodel.



Mobilia Tumle båd i en gyng.

LASAL MINI TRANSPORTER - MT6 til børn



MT6 med fodforlænger



Duplo pude



MT6 med Mini LASAL båd og fodpude

MT6 Transporteren kan anvendes til børn mellem 0 og 5/6 år. Som på de andre transportere kan ryggen eleveres og vognen højdejusteres, dog betjenes begge dele manuelt med et gasfjederhåndtag.

Vognen er nem at manøvrere rundt og barnet transporteres let rundt i boligen. Til MT6 medfølger en fodstøtte, som nemt monteres på vognen, så den passer til barnets længde.

Der fås to typer indsatspuder: Den formbare Duplo pude og en mini LASAL båd. Typen af indsatspude vælges efter barnets behov. Indsatspuderne kan kombineres med LASAL




LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

HIGHLIGHTS

- Et mobilt hjælpemiddel designet til hvile og afslapning
- Et godt supplement til en kørestol
- Et alternativ til den stationære seng eller sækkestol
- Mange muligheder for stillingskift
- Et socialt værktøj
- Gør det nemt at transportere en person
- Reducerer antallet af forflytninger
- Let at manøvrere

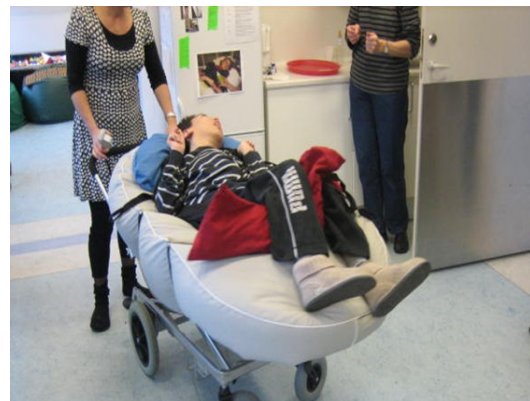

LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

MATERIALEBESKRIVELSE

Indsatspuder og andet pudetilbehør

Yderbetræk: 100% ØKO TEX certificeret bomuld.

Selve puden: PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil.

Fyld: Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).

Madras: Polyether skum i betræk af PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil.

Bund: Skridsikkert 100% polyestertekstil, PU-belagt.

Rengøring og vedligeholdelse

Yderbetrækket af bomuld kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme.

Polyesterbetrækket kan aftørres med sprit eller normale rengøringsprodukter og med vand.

Selve puden tåler ikke kemisk rensning og må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse opløsningsmidler kan opløse polystyrenkuglerne.

Bortskaffelse


Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Trods høj brugerkomfort og maksimal trykfordeling er puderne ikke antidecubitus produkter.

!!!VIGTIGT!!!

**Undgå skarpe kanter og spidse genstande
mod puderne.**



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL®

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL TRANSPORTER MODEL 6800/6900

Teknisk information

Max længde med styrehåndtag og fodstøtte fuldt udtrukket	2200 mm
Max bredde af transporteren målt over puderammens bøjle	680 mm
Højde af puderammen målt fra gulv til øverst på bøjlen Laveste position Højeste position	490 mm 730 mm
Puderammens længde (justerbar) Min længde Max længde	1090 mm 1390 mm
Max liggemål for udtrukket puderamme og fodstøtte	1950 mm
Styrehåndtagets højde Laveste position Højeste position	870 mm 960 mm
Hjulafstand mellem for- og baghjul	690 mm
Totalvægt uden indsatspude m/fodstøtte Heraf fodstøtte	60 kg 5,5 kg
Bæreevne (max. personvægt) sikkerhedsafprøvet til	140 kg
Brugsvægt (max. personvægt) anbefalet	100 kg
Forhjul diameter	200 mm
Baghjul diameter	300 mm
Aktuator, motor, ryglæn - LINAK LA 31	4000 N
Aktuator, motor, løft/sænk - LINAK LA 31	4000 N
Kontrolboks - LINAK CB12	24 V
Lader indbygget i kontrolboks. For opladning tilslut:	220V/230V
Fodstøtte 6900: Længde excl. indføringsskinne	Udvendig 400 mm Indvendig 340 mm
Bredde	Udvendig 520 mm Indvendig 440 mm
Aktuator, motor fodstøtte - LINAK LA 12	750 N
6900 = 6700 med mindre hjul 6800 = 6500 med mindre hjul	



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL®


LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

MT5 TRANSPORTER

Teknisk information

Længde med kørebøjle	1310/1460/1620 mm
Længde uden kørebøjle (Puderamme) uden fodforlænger	1110/1260/1420 mm
Bredde	680 mm
Højde, max., ryglæn i 0° med kørebøjle	1060 mm
Brugshøjde, max., ryglæn i 0° uden indsatspude	780 mm
Højde, min. liggeflade uden indsatspude	380 mm
Højde, min. uden kørebøjle	460 mm
Højde, min. med kørebøjle	680 mm
Totalvægt uden indsatspude m/ fodforlænger	57 kg
Heraf fodforlænger	1,420 kg
Bæreevne (max. personvægt) Sikkerhedsafprøvet til	120 kg
Bæreevne (max. personvægt) anbefalet	100 kg
Forhjul diameter	200 mm
Baghjul diameter	300 mm
Aktuator, motor, ryglæn – LINAK LA31-med spline	4000 N
Aktuator, motor, løft/sænk LINAK LA31:	6000 N
Kontrolboks LINAK CB12	24V – 1,2 ampt
Lader indbygget i kontrolboks. For opladning tilslut:	220V/230V
Håndbetjening HB42	



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL®


LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

MT6 TRANSPORTER

Teknisk information

Længde med kørebøjle	1140 mm
Længde af puderamme	900 mm
Længde med fodforlænger	1100 mm
Bredde	600mm
Højde med kørebøjle, max.	900 mm
Brugshøjde, flad, max.	650 mm
Brugshøjde, flad, min.	390 mm
Højde, min., med kørebøjle	650 mm
Total vægt uden indsatspude	24kg
Fodforlænger	Ca. 1,6kg
Max. tilladt brugervægt	60kg
Max. praktisk brugervægt	15 – 35 kg
Praktisk brugervægt med 1000N gas aktuator til løfte/sænke funktion	35 – 50 kg
Forhjul diameter	200mm
Baghjul diameter	200mm
Gas aktuator-vippefunktion	300N
Gas aktuator- løfte/sænke funktion	600N



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL®

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

Specifikationer


Transportere til større børn og voksne

Varenr.	Produkt
6800	LASAL Transporter med forlænger og manuel fodstøtte, HMI-nr. 65018 Se side 10 for mål mv.
6900	LASAL Transporter med forlænger og elektrisk fodstøtte, HMI-nr. 65149 Se side 10 for mål mv.
201	Mobilia Transporter MT5 med forlænger og fodforlænger, HMI-nr. 65155 Se side 11 for mål mv.

Indsatspuder til LASAL og MT5 Transportere

Varenr.	Produkt	Længde	Bredde	HMI-nr.
620	LASAL Båd, S, incl. betræk	116 cm	Top 88 cm, bund 80 cm	65153
630	LASAL Båd, M, incl. betræk	130 cm	Top 88 cm, bund 80 cm	65151
640	LASAL Båd, L, incl. betræk	144 cm	Top 88 cm, bund 80 cm	65152
625	Skummadras, S, til LASAL Båd	55 cm	33 cm	70126
635	Skummadras, M, til LASAL Båd	68 cm	33 cm	70127
645	Skummadras, L, til LASAL Båd	80 cm	33 cm	70128
1600	Mobilia Tumle Båd, S, incl. betræk	110 cm	Top 75 cm, bund 70 cm	69040
7500	Mobilia Tumle Båd, M, incl. Betræk	125 cm	Top 75 cm, bund 70 cm	69041
7600	Mobilia Tumle Båd, L, incl. betræk	140 cm	Top 75 cm, bund 70 cm	69042
1625	Skummadras, S, til Mobilia Tumle Båd	56 cm	30 cm	69043
7525	Skummadras, M, til Mobilia Tumle Båd	67 cm	30 cm	69044
7625	Skummadras, L, til Mobilia Tumle Båd	77 cm	30 cm	69045



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677



LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

Specifikationer


Indsatspuder til LASAL og MT5 Transportere

Varenr.	Produkt	Længde	Bredde	HMI-nr.
4300	Mobilia Duplo Indsatspude	120 cm	Top 75 cm Bund 58 cm	69018
4600	Mobilia Triplo Indsatspude	150 cm	58 cm	69021
1806	Mobilia Duplo pude - mellempude	30 cm	58 cm	69024
820	Pude med betræk til fodstøtte rest t/LASAL Transporter 6800	40 cm	40 cm	70001
840	Pude med betræk til fodstøtte t/LASAL Transporter 6900	47 cm	56 cm	70002
860	Pude med høj kant og betræk til fodstøtte t/LASAL Transp.6900	47 cm	56 cm	70008
19151	Pude med betræk til fodforlænger - MT5	33 cm	56 cm	
6201	Bælte, L	125 cm	10 cm	70007
6211	Bælte, M	105 cm	10 cm	70006
521	Kileformet pude uden betræk	32 cm	33 cm	65157

Mini LASAL Transporter MT6 og tilbehør

Varenr.	Produkt	Længde	Bredde	HMI-nr.
60600	Mini LASAL Transporter MT6 med fodforlænger	Se side 12 for mål mv.		69036
66301	LASAL MT6 Båd med betræk	90 cm	60 cm	69039
66305	Skummadras til LASAL MT6 Båd	56 cm	25 cm	70129
66400	Duplo Mini pude	106 cm	Top 68 cm Bund 50 cm	69038
66250	Pude til fodforlænger - MT6	27 cm	45 cm	
66221	Bælte, S	85 cm	10 cm	70005



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk  Tlf.: +45 6225 1700
CVR Nr. DK 1437 8677

