



Max 200 kg



Pumpens funktion

Autofirm-funktion

Autofirm-funktionen fylder topmadrasen maksimalt, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter, hvorefter pumpen automatisk vender tilbage til vekseltryk.

Vekslende - Siddende - Statisk

Pumpen har tre funktioner: Vekslende, Statisk og Siddende. Tryk på Skift (**figur 4**) for at veksle mellem de tre funktioner.

Vekslende sørger for lufttryk i forskellige intervaller. Anbefalet cyklostid er 10 minutter (**figur 8**).

Statisk bevarer topmadrassens lufttryk konstant.

Siddende er beregnet til fx lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen. Funktionen betyder, at pumpen øger trykket i madrassen under brugerens bagdel, men forstærker med at veksle.

Hvis brugeren lægges ned uden at funktionen slås fra, vil der stadig være vekseltryk under brugeren til at aflaste og forebygge tryksår.

I tilfælde af hjertestop

Topmadrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Tøm topmadrassen ved at dreje på CPR-ventilen i hovedenden, så ventilen står på OPEN. Træk tilslutningslangerne ud af pumpen. Start hjertemassagen, mens madrassen tømmes!

Driftsforstyrrelser

Alarmknappen på frontpanelet bipper og lyser (**figur 7**) ved manglende strøm eller for lavt tryk. Tjek, at luftslanger og CPR-ventilen er korrekt sat i. Kontakt Cobi Rehab for mere hjælp.

Manuel indstilling af brugervægt

Pumpen indstiller sig automatisk til brugerens vægt, men tryk på Soft-knappen (**figur 1**), hvis der er brug for en blødere topmadras. Tryk på Firm-knappen (**figur 2**), hvis der ønskes en hårdere topmadras.

Rengøring af Cobi Cura X5

Til daglig rengøring af madras og pumpe bruges vand, et mildt rengøringsmiddel og en ren klud.

Madrassen og de forskellige pumpedele kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 og max. 10000 ppm.

Få mere information om rengøring i brugsanvisningen til Cobi Cura X5.



Hent mere information om Cobi Cura X5

Cobi Cura X5 vekseltryk topmadras

Klargøring af topmadras og pumpe

1. Læg topmadrassen direkte ovenpå Cobi skummadras T6. Fastgør stropperne til sengerammen.
2. Tjek, at topmadrassens CPR-ventil er lukket. Ventilen sidder i venstre side i hovedenden.
3. Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af krogene, og slut topmadrassens luftslanger til koblingen på siden af pumpen.
4. Sæt strømstikket i stikkontakten.
5. Tænd pumpen på vippekontakten på pumpens højre side. Tryk bagefter på ON/OFF-knappen på frontpanelet (**figur 6**).
6. Tjek, at Autofirm knappen blinker (**figur 5**). Blinkene stopper, når det maksimale lufttryk er fundet.
7. Vent 20 minutter og læg så brugeren på topmadrassen.

8. Når brugeren ligger på topmadrasen, indstiller pumpen sig automatisk til vekseltryk (Vekslende) og til brugerens vægt. Denne indstilling tager mellem 10-20 minutter. Når indstillingen er klar, stopper lampen mellem Soft- og Firm-knappen på frontpanelet med at blinke, og pumpen afgiver et kort signal.

Lås betjening

Frontpanelet låses efter 30 sekunder uden brug. Tryk 2 sekunder på Lås betjening (**figur 3**) for at aktivere frontpanelet igen.

Håndprøven

Før hånden ind mellem cellerne under brugerens tungeste del (fx bækkenet). Topmadrassen skal være præcis så fyldt, at brugeren ligger/sidder halvvejs ned i topmadrassen.

