




Cobi Cura X5 vekselryk topmadras

Rengørings- og desinfektionsvejledning

Vejledning

Daglig rengøring

1. Fjern snavs og spild fra betrækket, før rengøringen starter. Brug et almindeligt rengøringsmiddel. Rengøringen kan evt. suppleres med en desinfektant. Se afsnit om Desinfektion.
2. Tør betrækket af med en ren klud vredet op i vand.
3. Tør betrækket grundigt af med en ren, tør klud. Et vådt betræk er mere modtageligt for skade og slidtage, derfor skal betrækket være helt tørt, før det tages i brug igen eller lægges væk.

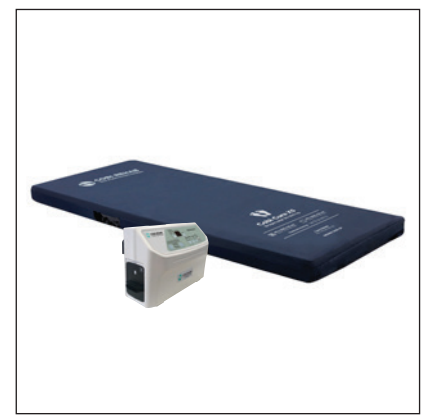

Korrekte rengøringsrutiner kan forlænge levetiden.

Desinfektion

Til overfladedesinfektion af betræk og madras kan der bruges engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %) eller et klorprodukt min. 1000 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection. Bemærk max. 10000 ppm*.)

Madras og betræk tåler vask i vaskemaskine ved 95° C i min. 10 minutter**.

Rengøring og desinfektion af betræk og madras tager udgangspunkt i Statens Serum Instituts seneste infektionshygiejniske retningslinjer for "MRSA i hhv. hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og lignende institutioner".

Cobi Rehab anbefaler ikke desinfektion med fx glutaraldehyd, dampsterilisation, orthohtalaldehyd (OPA), brintoverilte, pereddikesyre og fenoler.

* I henhold til SSI-retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bæretilstand i sundhedssektoren".

** I henhold til "NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren".