

SCHWIMMKISSEN

Für ein besseres Erlebnis im Wasser



LASAL Schwimmkissen bieten:

- Komfort & Sicherheit
- Stabilität im Wasser
- Maximum Mobilität
- Maximum Beweglichkeit
- Maximum Vergnügen

LASAL[®]

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666

Seite 1



SCHWIMMKISSEN

Kissen zur Positionierung im Wasserbecken werden während des Trainings und bei verschiedenen Methoden der Wassertherapie angewendet. Sie wurden speziell für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen entwickelt, finden aber genauso für Personen Anwendung, die eine zusätzliche Unterstützung im Wasser benötigen.


Der große Gleiteffekt des Kissens und das für die Haut angenehme Material sorgen für ein sicheres und angenehmes Erlebnis für den Anwender im Wasser.

Mit einer guten Positionierung im Wasser erreichen Sie:

- Größere Beweglichkeit
- Höhere Stabilität
- Größeren Komfort und Sicherheit

Für den Anwender bedeutet das, sich im Wasser freier zu fühlen.

Therapeuten und Hilfskräften bietet es die Möglichkeit, auch Übungen und Trainingsabläufe durchzuführen, für die sonst zwei Hilfskräfte notwendig wären.

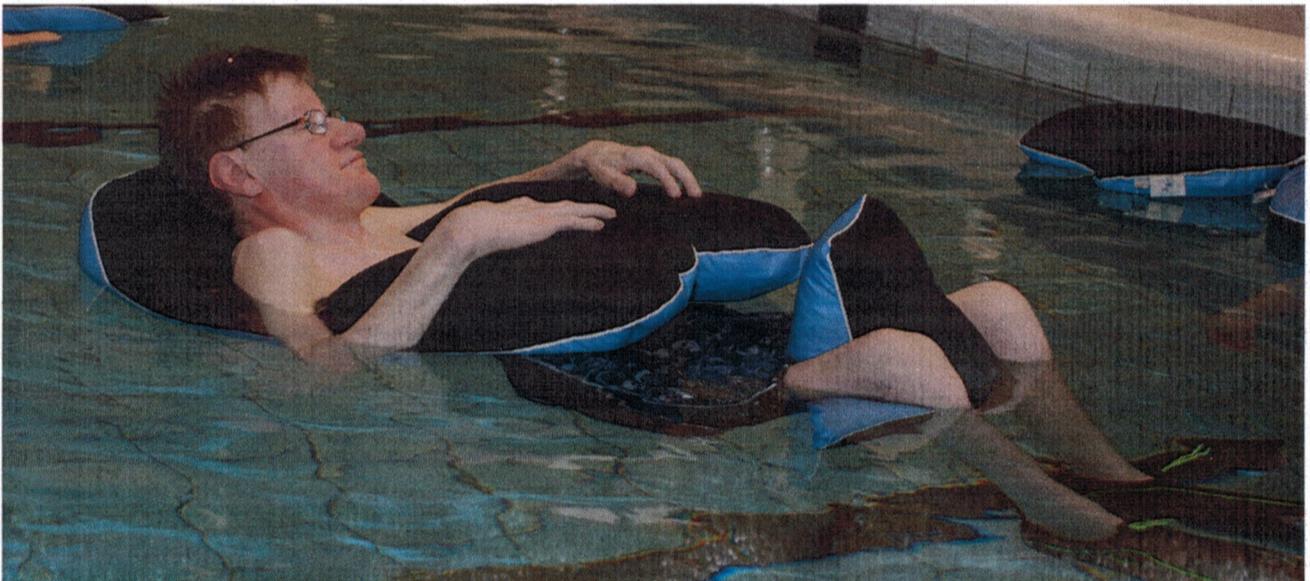

LASAL Schwimmkissen sind auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite blau. Die schwarze Seite ist die angenehmere, die wir daher für die Haut empfehlen.

Trotz der hohen Gleitfähigkeit der LASAL Schwimmkissen dürfen sie nicht als Rettungsweste oder anderes Rettungsmittel betrachtet werden. Anwender von LASAL Schwimmkissen dürfen sich niemals allein oder ohne Aufsicht und nie weiter als eine Armlänge entfernt von der Hilfskraft aufhalten. Besondere Aufmerksamkeit gebührt Kindern unter 3 Jahren und Personen, die nicht allein schwimmen oder sich nicht selbstständig bewegen können.

LASAL[®]

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666

Seite 2



SCHWIMMKISSEN

Halsschwimmkragen




9401, 9411, 9415, 9421

Der Halsschwimmkragen ist für das Training im Wasser in Rückenlage oder aufrecht stehend geeignet.

Den Kragen um den Hals des Anwenders legen und die Vorderseite längs auf der Brust schließen. Anschließend den Gurt um das Kissen direkt unter dem Kinn festziehen. Dies ist eine Hilfe für den Anwender, um im Wasser aufrecht zu stehen und zu vermeiden, dass der Kopf unter Wasser kommt.

Der lange Gürtel wird um den Rücken des Anwenders gelegt, um den Körper in eine schwimmende Position zu bringen.

Der Halsschwimmkragen sollte angelegt werden, bevor der Anwender ins Wasser geht.

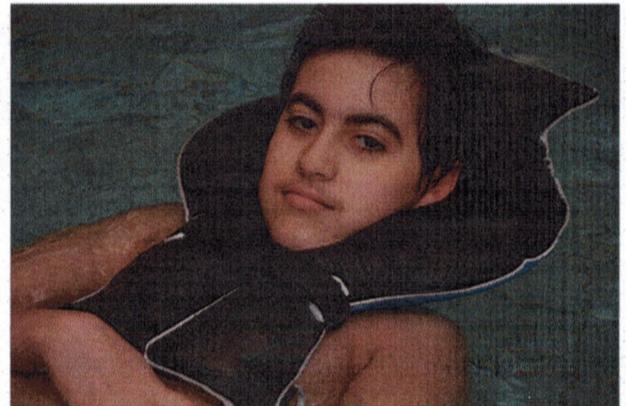

LASAL[®]

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666

Seite 3



SCHWIMMKISSEN

Bananen Schwimmkissen




9101, 9111, 9811

Bananen Schwimmkissen gibt es in mehreren Größen. Sie haben einen besonders großen Gleiteffekt.

Das Kissen wird üblicherweise unter die Achselhöhlen um den Anwender gelegt und kann für Übungen in Rückenlage, Bauchlage oder im Stehen angewendet werden.

Der geübte Schwimmer kann dieses Kissen auch für Gleichgewichtsübungen oder Übungen im Sitzen anwenden.

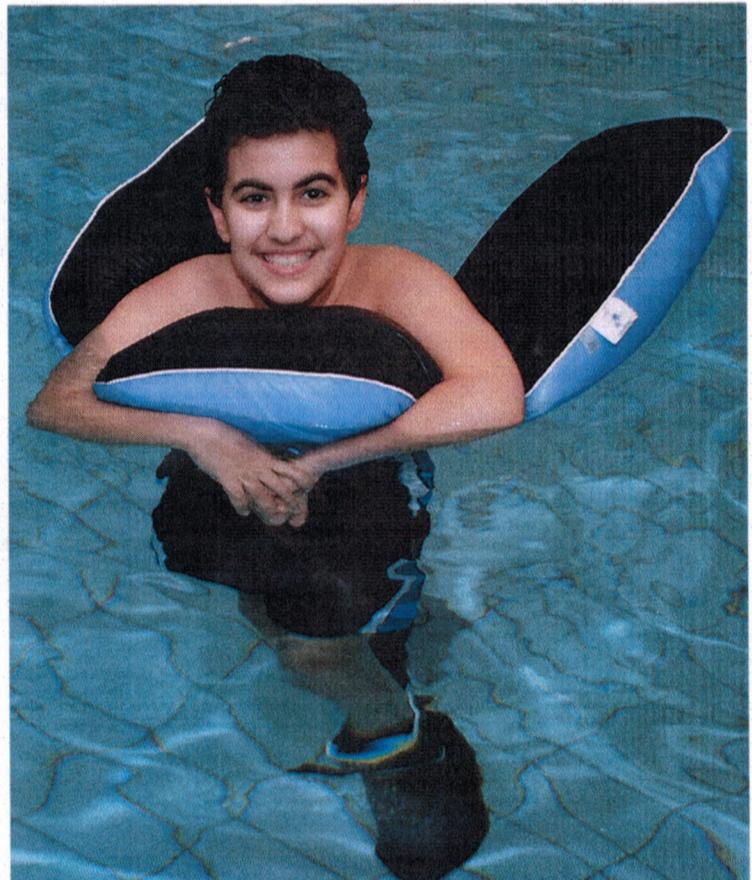

WICHTIG

! Dieses Kissen ist nicht für die Befestigung am Körper geeignet. Mehr erfahren Sie auf Seite 9. !

LASAL[®]

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666

Seite 4



SCHWIMMKISSEN


T-Schwimmkissen



9017, 9027

T-Schwimmkissen dienen als Schwimmhilfe für die unteren Gliedmaßen und sind entweder unter den Kniekehlen oder Unterschenkeln anzubringen.

Personen mit einer gewissen Stabilität im Wasser können das Kissen als Schwimmhilfe in Bauchlage anwenden. Das Kissen wird unter die Achselhöhlen gelegt, wobei der Fuß des T's nach oben zum Gesicht hin weist. Die Flügel des T's wirken im Wasser als Stabilisator und der Fuß des T's als Stütze für den Kopf. Diese Anordnung sorgt für volle Bewegungsfreiheit im Schulterbereich.

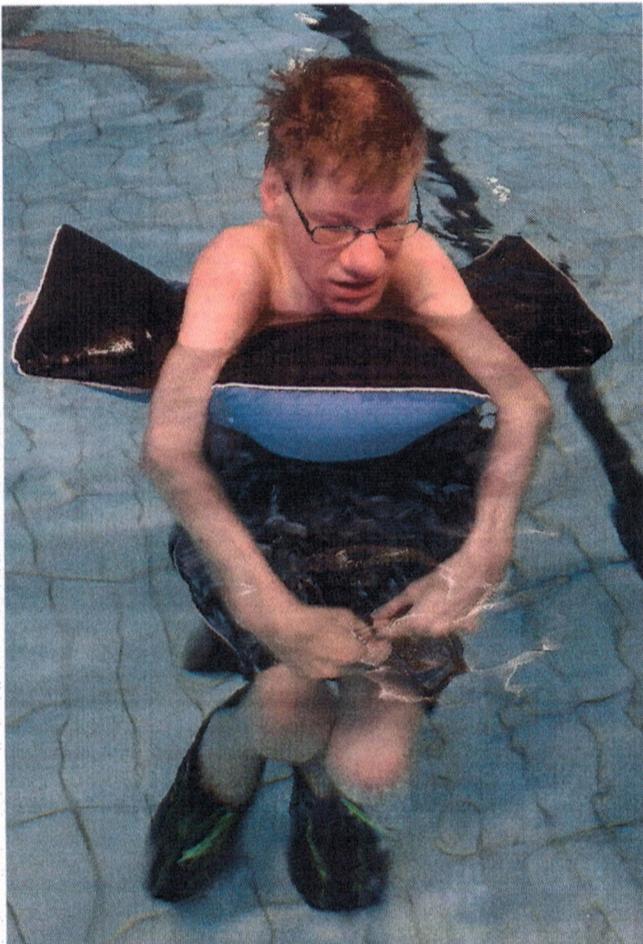

WICHTIG

! Dieses Kissen ist nicht für die Befestigung am Körper geeignet. !

! Mehr erfahren Sie auf Seite 9. !

LASAL®

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • +45 8696 6666

Seite 5

CE

SCHWIMMKISSEN

U-Schwimmkissen



9911

Die U-Schwimmkissen können von Erwachsenen und Kindern benutzt werden und bieten verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Unter dem Nacken in Rückenlage, unter dem Bauch oder den Oberarmen beim Brustschwimmen oder nur für einen zusätzlichen Gleiteffekt der Arme oder Beine.



WICHTIG

Die U-Schwimmkissen ist nicht für die Befestigung am Körper geeignet.
Mehr erfahren Sie auf Seite 9.



Nackenschwimmkragen

Der Nackenschwimmkragen ist mit einem Klettverschluss versehen, mit dem man ihn eng am Kopf/Hals anbringen kann. Der Kragen kann mit anderen Schwimmkissen kombiniert, aber auch einzeln angewendet werden, z. B. wenn Personen nur eine geringe Unterstützung beim Schwimmtraining benötigen.



9311, 9321

LASAL®

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666

Seite 6

CE

SCHWIMMKISSEN



Badeblume



9600, 9610

Die Badeblume erfüllt die gleiche Funktion wie der Badering. Der Anwender kann entspannt in der Blume gleiten bzw. in der Rücken- oder Bauchlage aktiv sein. Die Form der Blätter erleichtert es dem Anwender, die Arme näher am Körper zu halten. In Abhängigkeit von Spastizität und Bewegungsmuster kann die Blume einzeln oder in Kombination mit anderen LASAL-Schwimmkissen angewendet werden.

Die Blume ist in zwei Größen erhältlich.

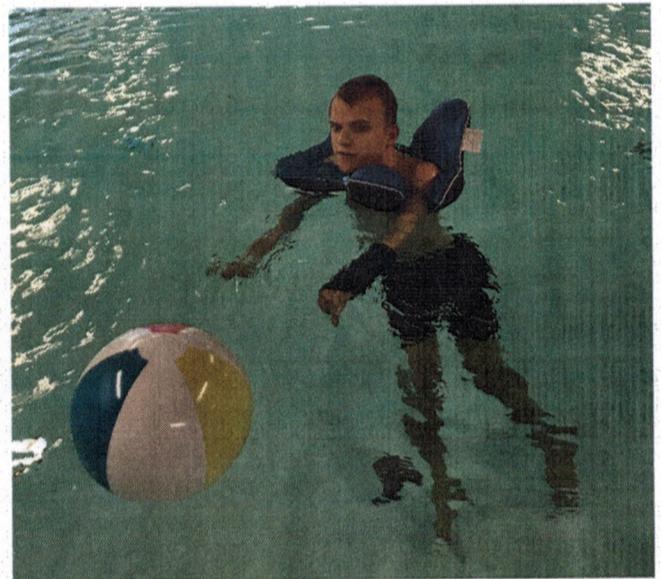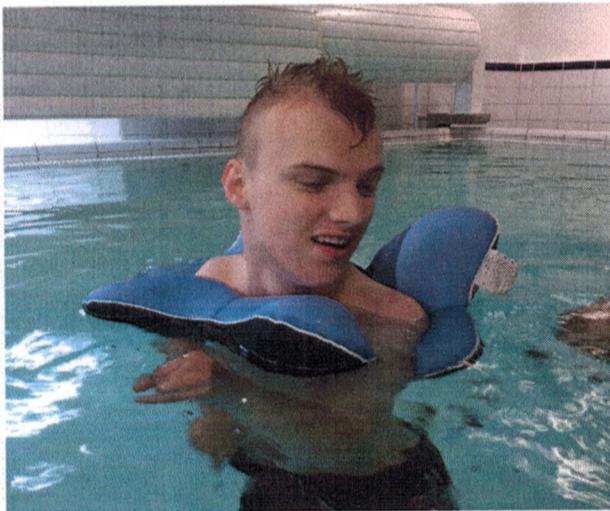

Stabilisator



9620, 9630

Je nach Funktionsniveau kann sich der Anwender entweder sitzend, stehend oder liegend zwischen den Kissen platzieren. Mit dem Stabilisator kann man sich im Wasser in Rücken- oder Bauchlage aktiv bewegen oder das Kissen in gleitender Position als Stabilisator verwenden. Anwendbar in Verbindung mit Gleichgewichtsübungen, oder um die angestrebte Position im Wasser zu erreichen. Kann mit anderen LASAL-Schwimmkissen kombiniert werden. LASAL Schwimmstabilisatoren sind in zwei Größen erhältlich.

WICHTIG

! Dieses Kissen sind nicht für die Befestigung am Körper geeignet. Mehr erfahren Sie auf Seite 9. !

LASAL®

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666

Seite 7

CE

Specifications

Art.-Nr.	Produkt	Länge	Breite	Hals Umfang
9017	T-Schwimmkissen, L	80 cm	54 cm	-
9027	T-Schwimmkissen, S	63 cm	40 cm	-
9101	Bananen Schwimmkissen, L	148 cm	38 cm	-
9111	Bananen Schwimmkissen, M	122 cm	40 cm	-
9811	Bananen Schwimmkissen, S	85 cm	40 cm	-
9311	Nackenschwimmkragen, L	-	21 cm	24 cm
9321	Nackenschwimmkragen, S	-	16 cm	24 cm
9401	Halsschwimmkragen, L	68 cm	47 cm	38 cm
9411	Halsschwimmkragen, M	65 cm	43 cm	32cm
9415	Halsschwimmkragen, S	59 cm	38,5 cm	26 cm
9421	Halsschwimmkragen, XS	54 cm	34 cm	26 cm
9911	U-Schwimmkissen	62 cm	21 cm	-
9600	Badeblume, S	-	74 cm	65 cm
9610	Badeblume, L	-	81 cm	89 cm
9620	Stabilisator, S	66 cm	19/24,5 cm	-
9630	Stabilisator, L	88 cm	24/29 cm	-

Description of Materials

Außenbezug Oberseite: 100 % Polyester

Außenbezug Unterseite: 100 % Polyester-Netzstoff

Füllung: Brandhemmende EPS-Kügelchen (Expandiertes Polystyrol).

Reinigung und Pflege

Nach Gebrauch das Chlor von den Außenseiten des Kissens mit Wasser abspülen. Zum Trocknen das Kissen mit der blauen Seite nach unten legen, sodass das Wasser frei aus dem Kissen herauslaufen kann. Es dauert lange, bis das Kissen vollständig getrocknet ist, weshalb es ausschließlich in „nasser“ Umgebung (nur Chlor) anzuwenden ist.

Entsorgung

Die Kissen können als Restmüll entsorgt werden.



BESONDERS WICHTIGE INFORMATION

Diese Kissen sind nicht für die Befestigung am Körper geeignet. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass der Anwender sie während des Aufenthaltes im Wasser nicht verliert. Dem Anwender oder der Hilfskraft muss es möglich sein, das Kissen festzuhalten, um zu verhindern, dass der Kopf des Anwenders unter Wasser kommt.

LASAL Schwimmkissen sind ausschließlich für die Anwendung in chloriertem Wasser berechnet.

!!! ZU BEACHTEN !!!

Setzen Sie das Kissen keinen scharfen Kanten, rauen Oberflächen und spitzen Gegenständen aus.

Lesen Sie vor Gebrauch des Produktes immer erst die Bedienungsanleitung.

Die Verantwortung für den Badenden, die Gefahr des Ertrinkens oder anderer Schäden obliegt stets dem assistierenden Personal, ungeachtet, ob LASAL-Schwimmkissen angewendet werden oder nicht.

LASAL[®]

LASAL A/S
Industrivej 15 • DK 8881 Thorsø
www.lasal.dk • info@lasal.dk • + 45 8696 6666