

LASAL

- Alle har glæde af gode oplevelser i vandet

November 2017



LASAL Flydepuder giver brugeren:

- Komfort & tryghed
- Stabilitet i vandet
- Maximal mobilitet
- Maximal bevægelighed
- Maximal fornøjelse

FLYDEPUDER



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsoe

E-mail: info@lasal.dk



+45 8696 6666



www.lasal.dk

VAT No. DK 1437 8677

Puder til positionering i vandbassin anvendes under træning og ved forskellige former for vandterapi. De er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men kan også anvendes af personer, der ønsker ekstra støtte i vandet.

Pudernes store flydeeffekt samt materialer, der føles behagelige mod huden, sikrer brugeren en tryk og behagelig oplevelse i vandet.

Med en god positionering i vandet opnås:

- Øget bevægelighed
- Øget stabilitet
- Øget komfort og tryghed

For brugeren betyder det en mere fri oplevelse af at være i vandet. **For terapeuter og hjælpere** forbedrer det mulighederne for at kunne udføre øvelser og træning, hvor der ellers ville være behov for to hjælpere.



LASAL Flydepuder er sorte på den ene side og blå på den anden. Den sorte side er den mest behagelige og vi anbefaler at denne side vendes mod huden.

På trods af LASAL Flydepuders store flydeevne må de ikke betragtes som redningsveste eller andet redningsudstyr. Brugere af LASAL Flydepuder må aldrig opholde sig i vandet alene eller uden opsyn og aldrig længere væk fra hjælperen end en arms længde.

Vær ekstra opmærksom på børn under 3 år og personer, som ikke er i stand til at svømme alene eller bevæge sig ved egen hjælp.

Halsflydekrave



9401, 9411, 9415, 9421

Halsflydekraven er beregnet til rygliggende eller opretstående træning i vandet og forhindrer at brugeren får hovedet under vand. Placér kraven rundet om brugerens hals og luk fronten på langs af brystet. Spænd dernæst stroppen rundt om puden svarende til lige under hagen. Herved får brugeren hjælp til at stå oprejst i vandet og undgår at få hovedet under vand.

Det lange bælte spændes rundt om ryggen på brugeren for at hjælpe kroppen op i en flydende stilling. Halsflydekraven kan med fordel gives på før brugeren går i vandet.



Bananformede flydepuder



9101, 9111, 9811

Bananformede flydepuder findes i flere størrelser og har meget stor flydeeffekt. Puden placeres typisk under armhulen og rundt om brugeren og kan anvendes til ryg-, mave- og stående øvelser.

Den mere øvede svømmer vil også kunne anvende denne pude til balancetræning og siddende øvelser.



VIGTIGT

Denne pude er ikke designet til fastgørelse rundt om kroppen.
Læs mere på side 9.

T-formede flydepuder



9017, 9027

T-puden er velegnet til flydestøtte af underekstremiteterne og placeres enten under knæhaserne eller underbenene.

Til personer med en vis stabilitet i vandet kan puden også anvendes som flydestøtte i maveliggende stilling. Puden placeres da under armhulene og med T's fod pegende opad mod ansigtet. T's vinger virker som stabilisator i vandet og T's fod som støtte for hovedet. Med denne placering er der fuld bevægelsesfrihed i skulderpartiet.



VIGTIGT

Denne pude er ikke designet til fastgørelse rundt om kroppen.
Læs mere på side 9.

U-formet flydepude



9911



Den U-formede flydepude kan bruges af både voksne og børn og har flere anvendelsesmuligheder. Under nakken i rygliggende stilling, under mave eller overarme ved brystsvømning eller blot som ekstra flydeeffekt til arme eller ben.



VIGTIGT

U-formet flydepude er ikke designet til fastgørelse rundt om kroppen.

Læs mere på side 9.

Nakkeflydekrave

Nakkeflydekraven er forsynet med en burrebåndslukning, der gør det muligt at placere kraven helt tæt ind til hovedet/halsen. Kraven kan kombineres med andre flydepuder eller bruges alene af de personer, der blot har brug for en smule støtte under svømmetræning.



9311, 9321

Badeblomst



9600, 9610



Badeblomsten har samme funktion som en badering. Brugeren kan flyde afslappet i blomsten, eller være aktiv i ryg- såvel som maveliggende position. Blomstens blade og faconen gør det nemt for bruger at få armene tættere ind til kroppen. Afhængig af spasticitet og bevægelsesmønster kan blomsten anvendes alene eller kombineret med andre LASAL Flydepuder. Blomsten fås i to størrelser.



Flydestabilisator



9620, 9630

Brugeren placeres mellem puderne, i enten siddende, stående eller liggende stilling afhængigt af funktionsniveau. Med stabilisatoren kan man bevæge sig aktivt rundt i vandet i ryg- eller maveliggende stilling, eller anvende puden som stabilisator i flydende position. Anvendelig i forbindelse med balancetræning eller til at opnå den ønskede position i vandet. Kan kombineres med andre LASAL Flydepuder.

LASAL Flydestabilisator fås i to størrelser.

VIGTIGT

Flydestabilisatoren er ikke designet til fastgørelse rundt om kroppen.

Læs mere på side 9.

Specifikationer

Vare nr.	Produktnavn	Længde	Bredde	Omkreds af halshul	HMI nr.
9017	T-formet flydepude, L	80 cm	54 cm	-	64979
9027	T-formet flydepude, S	63 cm	40 cm	-	64984
9101	Bananformede flydepuder, L	148 cm	38 cm	-	64983
9111	Bananformede flydepuder, M	122 cm	40 cm	-	64981
9811	Bananformede flydepuder, S	85 cm	40 cm	-	64982
9311	Nakkeflydekrave, L	-	21 cm	28 cm	64985
9321	Nakkeflydekrave, S	-	16 cm	25 cm	70141
9401	Halsflydekrave, L	68 cm	47 cm	38 cm	64987
9411	Halsflydekrave, M	65 cm	43 cm	32cm	64988
9415	Halsflydekrave, S	59 cm	38,5 cm	26 cm	64989
9421	Halsflydekrave, XS	54 cm	34 cm	26 cm	64990
9911	U-formet flydepude	62 cm	21 cm	-	64986
9600	Badeblomst, S	-	74 cm	65 cm	72594
9610	Badeblomst, L	-	81 cm	89 cm	72595
9620	Flydestabilisator, S	66 cm	19/24,5 cm	-	72597
9630	Flydestabilisator, L	88 cm	24/29 cm	-	72598

Materialer

Yderbetræk overside: 100% polyester

Yderbetræk underside: 100% polyester netstof

Fyld: Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).

Rengøring og vedligeholdelse

Efter brug skal pudernes yderside skylles rene for klor med rent vand. For at tørre, placeres puderne med den blå side nedad således at vandet frit kan løbe ud af puden. Puderne er længe om at tørre helt og bør derfor udelukkende bruges i "våd" miljø (kun klor).

Bortskaffelse

Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.



MEGET VIGTIG INFORMATION

Disse puder er ikke designet til fastgørelse rundt om kroppen og det er derfor meget vigtigt at sikre at de ikke flyder væk fra brugeren under opholdet i vandet. Derfor skal enten brugeren selv eller hjælperen være i stand til at holde fast i puden og dermed forhindre at brugeren får hovedet under vand.

LASAL flydepuder er udelukkende beregnet til anvendelse i kloret vand.



!!! O B S !!!

Undgå skarpe kanter, ru overfald og spidse genstande mod puderne.



Læs altid brugsvejledningen før produktet anvendes.

Ansvaret for den badende, risikoen for drukning eller andre skader påhviler altid det assisterende personale uanset om LASAL Flydepuder har været anvendt eller ej.



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsoe

E-mail: info@lasal.dk



+45 8696 6666



www.lasal.dk

VAT No. DK 1437 8677