

LASAL



Maj 2018

LASAL - Løsningen på lejring

LEJRING



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
E-mail: info@lasal.dk ☎ +45 8696 6666
CVR Nr. DK 1437 8677

 www.lasal.dk

LASAL Lejringspuder er det helt rigtige valg, når det drejer sig om positionering af personer med hjerneskader, neurologiske patienter eller personer, der i større eller mindre grad har behov for støtte og stabilisering.

En optimal lejrning kan være med til at mindske kontrakturdannelse, forebygge tryksår eller bryde evt. spasticitet. LASAL Lejringspuder er særdeles velegnede på disse områder, da de har en unik tilpasningsevne efter kroppens og underlagets facon.



Formål med lejrning

- **Korrektion og stabilisering af kroppens lemmer i forhold til hinanden og underlaget.**
- **Kontrol af ufrivillige bevægelser for derved at opnå en funktionel lejrning og øget komfort.**

Puderne støtter og aflaster i forskellige positioneringer, men kan også med fordel anvendes til afgrænsning og øget kropsbevidsthed.

Med LASAL Lejringspuder får brugeren en oplevelse af komfort og tryghed og at være behageligt støttet uden at være fastlåst.

For hjælperen er LASAL Lejringspuder et nemt og anvendeligt redskab. Puderne gør det let og hurtigt at ændre lejrningen så ofte som muligt og til fordel for patienten.

Puderne placeres tæt omkring personen og giver en fornemmelse af at få kroppen afgrænset, hvilket virker beroligende.

LASAL Lejringspuder:

- Er formbare og tilpasser sig kropsholdningen
- Støtter og stabiliserer
- Fås i mange former og størrelser, der giver utallige variationsmuligheder
- Reflekterer kropsvarmen, som virker stimulerende på muskler og kredsløb
- Er lette at tilpasse til den ønskede positionering
- Har yderbetræk i bomuld, som er delt op i farvekoder som en hjælp i lejringen
- Er nemme at rengøre

T-pude



T-puden anvendes som abduktionspude mellem benene eller som generel støtte til underbenene. Den kan også anvendes ved mavelejring, hvor den løfter personen op i en tilpas højde fra underlaget, der giver bevægelsesfrihed i skuldrene og derved gør lejringen mere behagelig.

Bananpude



Bananpuden er en universalpude, der giver et væld af anvendelsesmuligheder ved lejrning. Puden kan bruges alene eller kombineret med andre LASAL Lejringspuder alt efter om der er tale om en siddende eller liggende lejrning og hvilken grad af stabilisering der ønskes. Bananpudens fyldning er moderat, hvilket gør den formbar. Fyldet fordeles således, at det passer til den ønskede lejrning.

Bananpuden kan bruges af både børn og voksne til lejrning i en hvilesituation eller f.eks. i forbindelse med træning og terapeutiske øvelser.

Bananpuden er også velegnet til omkransning af brugeren for på denne måde at skabe ro og trykthed.

Trekantpude




Trekantpuden er en forholdsvis fast pude, som kan anvendes som stabilisator langs kroppen i siddende eller liggende stilling eller som udfyldning i sengen. Afhængig af størrelse kan Trekantpuderne med fordel bruges som støtte under knæene, langs underbenene eller under fødderne.

Firkantpude



Firkantpuden er en formbar universalpude som er særdeles velegnet til støtte af hoved, arme, ben og fødder. Firkantpuden er bl.a. velegnet til lejrning af patienter med appopleksi til at opnå aflastning og støtte af den svage side i en mere behagelig lejrning. Firkantpuden fås i flere størrelser og til både børn og voksne.

Halvmånepude

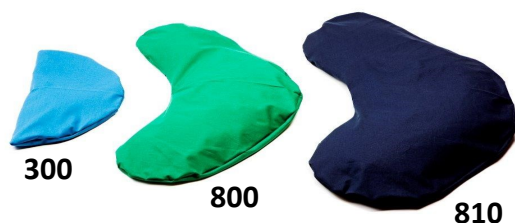

Halvmånepuden anvendes som støtte under arm og hånd eller i svangen i både siddende og liggende stilling. Kan også anvendes som trykaflastning mellem knæ og fødder.

Nakkepude



Nakkepuden sidder tæt ind til halsen hele vejen rundt. Den støtter og stabiliserer hoved- og nakke-region i halvt siddende stilling. Puden er formbar og fyldt kan således presses derhen, hvor der er mest behov for det. Betrækket kan bestilles med lukning med gribebånd, som gør at puden kan lukkes helt tæt ind til halsen.

Nakkepude



De mere U-formede nakkepuder ligger løst på skuldrene og støtter nakke og hoved i liggende og støttet siddende stilling. Nakkepuden kan også bruges til at stabilisere en hemiplegisk arm, siddende eller liggende på siden.

Nakkepude 900 kan med fordel anvendes til mindre børn til at omkranse kroppen og stabilisere den ønskede stilling. Placeret under knæhaser og op langs hoften kan den stabilisere og korrigere hofte- og bækkenregion.

Støttepude



Støttepuden fås i tre størrelser og har en let buttet og aflang facon og er kileformet i højden. Den har mange anvendelsesmuligheder for både børn og voksne. Alle størrelser kan bruges som siddepude f.eks. til balancetræning, hvor den særlige kileform og fordybningen i midten påvirker bækkenets rotation og siddestillingen stabiliseres.

400 og 420 har en størrelse, der gør dem anvendelige som små sækkestole for børn. Siddepuden kan også placeres på et rullebræt eller på gulvet og på den måde udgøre et aktivt træningsredskab eller et legeredskab.

Siddende lejrning af patient med halvsidig lammelse



Støtte af hofter / knæ / fødder



Abduktion af UE



Lejring i aflåst sideleje



30 graders sideleje



Støtte i siddende stilling



Respiratorisk stilling



Maveleje / drænagestilling



Rygleje / afgrænsning



Støtte i kørestol



Sideleje



Maveliggende stilling med T-puder og Halvmånepude



Aflåst sideleje med Bananpude og Nakkepude som støtte under hovedet



Læg mærke til hovedets stilling



Korrekt hovedstilling med støtte fra en lille Halvmånepude bag nakken og Nakkepude 900 til at støtte armene



Svær Scoliosis og kontrakturdannelser



Lejring på ryggen med Bananpuder og T-puder



Svær Scoliosis og lukseret hofte



30 graders lejring med Bananpude, Nakkepude og lille Halvmåne




Puder til træningsøvelser: Lang Siddepude og T-pude



Specifikationer


T-puder

Varenr.	Produktnavn	Farve på yderbetræk	Længde A/B	Bredde A/B	Højde	HMI nr.
6000	T-pude, XL	Blå	98 / 26 cm	61 / 29 cm	11 cm	27886
6010	T-pude, L	Marineblå	83 / 27 cm	56 / 27 cm	10 cm	27885
6015	T-pude, L/M	Turkis	72 / 25 cm	45 / 20 cm	8 cm	64994
6020	T-pude, M	Grøn	63 / 22 cm	40 / 19,5 cm	7 cm	27884
6030	T-pude S	Rød	56,5 / 17,5 cm	37 / 15 cm	7 cm	27883
6035	T-pude, S/XS	Blå	46,5 / 16 cm	32 / 15 cm	5 cm	64995
6040	T-pude, XS	Gul	36 / 13 cm	27 / 12,5 cm	4 cm	27882

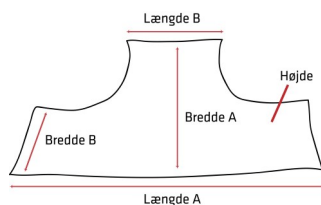

Bananpuder


Varenr.	Produktnavn	Farve på yderbetræk	Længde	Indre længde	Bredde	Højde	HMI nr.
100	Bananpude, L	Gul	-	148 cm	31 cm	10 cm	27865
110	Bananpude, S	Rød	-	144 cm	40 cm	12 cm	27866
150	Slangeformet pude	Grøn	320 cm	-	30 cm	9 cm	27867

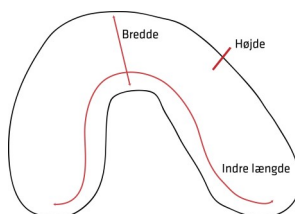

Specifikationer


Trekantpuder

Varenr.	Produktnavn	Farve på yderbetræk	Længde	Bredde	Højde	HMI nr.
200	Trekantpude, L	Marineblå	94 cm	24,5 cm	22 cm	27870
210	Trekantpude, M	Gul	66 cm	20 cm	17,5 cm	27869
220	Trekantpude, S	Blå	39,5 cm	12 cm	10 cm	27868
230	Trekantpude, M/S	Rød	55 cm	16 cm	14 cm	64993

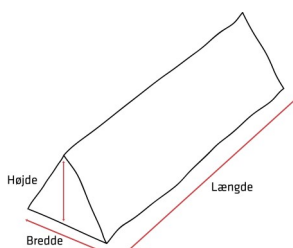

Firkantpuder


Varenr.	Produktnavn	Farve på yderbetræk	Længde	Bredde	Højde	HMI nr.
700	Firkantpude, S	Rød	59,5 cm	29,5 cm	5,5 cm	27874
710	Firkantpude, L	Grøn	73 cm	42 cm	5 cm	27875
720	Firkantpude, lang	Gul	110 cm	41 cm	10 cm	27876
730	Firkantpude	Blå	35 cm	22 cm	3 cm	69984
740	Firkantpude, XS	Gul	40 cm	10 cm	3 cm	29374
750	Firkantpude	Marineblå	80 cm	40 cm	8 cm	

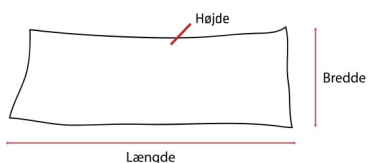

Specifikationer


Halvmånepuder

Varenr.	Produktnavn	Farve på yderbetræk	Længde	Indre længde	Bredde	Højde	HMI nr.
300	Halvmånepude, S	Blå	47 cm	-	22,5 cm	4 cm	27873
800	Halvmånepude	Grøn	-	79 cm	33 cm	7 cm	27872
810	Halvmånepude, tyk	Marine	-	86 cm	40 cm	7 cm	27871

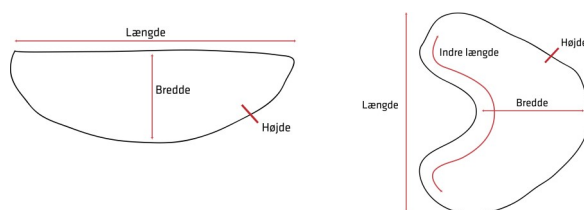

Nakkepuder

Varenr.	Produktnavn	Farve på yderbetræk	Halshullets omkreds	Bredde	Højde	HMI nr.
310	Nakkepude, voksen	Marine	24 cm	21 cm	7 cm	65004
320	Nakkepude, barn	Grøn	23 cm	16 cm	5 cm	69983


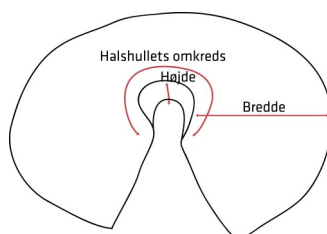


Fås med lukning med gribebånd.

Specifikationer


Nakkepuder

Varenr.	Produkt navn	Farve på yderbetræk	Indre længde	Ydre længde & længde	Bredde	Højde	HMI nr.
900	Barnenakkepude, S	Rød	62 cm	109 cm	33 cm	4,5 cm	65001
910	Junior nakkepude, U-facon, L	Blå	60 cm	114 cm	21 cm	6 cm	65002
920	Junior nakkepude, U-facon, S	Marine	54 cm	90 cm	15 cm	4 cm	65003

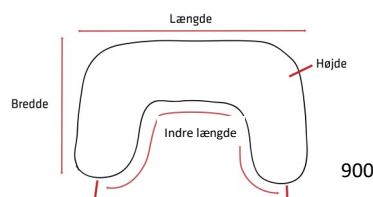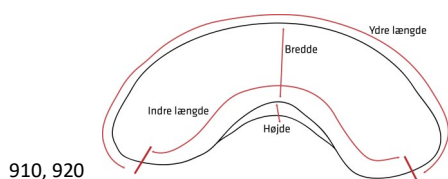

Støttepude/Siddepude

Varenr.	Produkt navn	Farve på yderbetræk	Længde	Bredde	Højde A/B	HMI nr.
510	Buttet støttepude	Blå	34 cm	24 cm	14 / 5,5 cm	27877
400	Siddepude, høj	Rød	73 cm	50 cm	29 / 13 cm	27878
420	Siddepude, lang	Gul	104 cm	50 cm	40 / 18,5 cm	27879

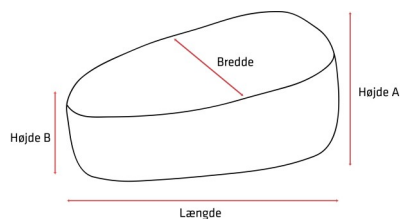

Ekstra betræk kan bestilles separat til alle puderne.

Materiale

Yderbetræk: 100% ÖKO TEX certificeret bomuld.
Inderbetræk: PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil.
Fyld: Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).

Rengøring og vedligeholdelse

Yderbetrækket kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme. Polyesterbetrækket kan aftørres med sprit, éngangsklude med klor (max 1000 ppm) eller almindelige rengøringsprodukter og med vand. Selve puden tåler ikke kemisk rensning og må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse opløsningsmidler kan opløse polystyrenkuglerne.

Bortskaffelse

Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Trods høj brugerkomfort og maximal trykfordeling er puderne ikke antidecubitus produkter.

VIGTIGT

Undgå skarpe kanter og spidse
genstande mod puderne.



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø

E-mail: info@lasal.dk ☎ +45 8696 6666 🇩🇰 www.lasal.dk

CVR Nr. DK 1437 8677