



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Swing kørestol

Hjælp til naturlig ro og tryghed hos urolige brugere med gyngestolens stimulering af den vestibulære sans.

Til immobile brugere med ukontrollerede bevægelser og motorisk uro

Til brugere med gang- og standfunktion

Til max 125 kg



Medical device

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indhold

1. Sikkerhed	2
2. Anvendelse	2
3. Mål og specifikationer	2
4. Kørestolens dele	2
5. Tilpasningsmuligheder	2
6. Tilpasning af puder	2
7. Kørestolens anatomi	2
8. Vedligeholdelse og rengøring	2
9. Garanti	2
10. Bortskaffelse	2

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Swing kørestol må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af kørestolen. Ved forkert betjening kan brugeren komme til skade.

Bruges Swing kørestol til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, øges risikoen for at beskadige kørestolen.

Brugsanvisningen skal læses grundigt, før Swing kørestol tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af Swing kørestol.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

1.1 Sikkerhedsvejledninger

Personale skal vurdere, om brugeren af sikkerhedsmæssige årsager skal fastspændes i Swing kørestolen under transport i huset.

Hverken bruger eller personale må stå på fodpladen.

2. Anvendelse

2.1 Generelt

Swing kørestolen bruges til voksne immobile brugere med ukontrollerede bevægelser og motorisk uro samt bevægelseshæmmede med

gang- og standfunktion. Swing egner sig til brug på plejecentre, institutioner og på hospice.

2.2 Konstruktion

Swing minder i sin konstruktion om kørestolene Kelvin og Cumulix. Modsat de to andre kan Swing frem og tilbage ved hjælp af brugerens bevægelser. Swing er med andre ord en kørende gyngestol.

I bundrammen sidder der to solide bladfedre, som kan justeres sammen med kørestolens højde, så de passer til brugerens gyngemønster.

Bremser på kørestolen kan stoppe kørestolens gyng bevægelser.

Muligheden for at højdejustere kørestolen gør den meget anvendelig til brugere med gang- og standfunktion. Med indstilling til lav siddehøjde kan denne type brugere selv komme ind og ud af kørestolen.

2.3 Effekt

Aktivering af en gyngestol er en bevægelse, der for mange er automatisk. Den rytmiske stimulation har god indflydelse på "midtlinje-problematikker", som ses hos fx apopleksiramte og brugere med andre balanceproblemer.

Forskellige former for input kan dæmpe motoriske uro. Det kan være omslutningen af kroppen qua Swing kørestolens fyldte puder eller den gyngende bevægelse fra kørestolen.

Hvert enkelt input giver stimuli, som fortæller kroppen, hvor den er i rummet. Det er denne viden til kroppen, der bidrager med ro og tryghed hos brugeren.

Muskelspændinger hæmmes, og den motoriske funktion fremmes, når fødderne er stabilt placeret på fodpladen, da det sikrer vægtbæring over kroppens led ved gyngende bevægelser.

2.4 Fleksibelt modulsystem

Swing kørestolen er opbygget af to pudegrupper; en komplet sædeindsats og en komplet lægpude- og fodpude-indsats. Flexarme kan monteres i hver side af kørestolen. Flexarmene understøtter brugerens arme og skaber tryghed, ro og komfort.

Mængden af fyld (latex og små Krøyer-kugler) i hver eneste pude kan justeres, så den passer præcis til det sted på kroppen, hvor der er behov for støtte.

Swing kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse

kørestolen. Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med konsulenter fra Cobi Rehab.

Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 og hør mere om gentilpasninger og specialløsninger.

⚠ Placeres en bruger i Swing kørestolen, som vejer mere end 125 kg, kan kørestolen vælte eller blive beskadiget.

3. Mål og specifikationer

Brugervægt max.	125 kg
Kørestolens vægt	Ca. 39 kg
Sædetilt bagud	Nej
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpemotor kan eftermonteres	Nej
Indstillelig skubbebøjle	Nej
Indstillelig i knæ- og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med Krøyer-kugler

4. Kørestolens dele

4.1 Generelt

Nogle af de bolte og fingerskruer, der skal løsnes for at kunne indstille Swing kørestolen, sidder gemt væk under pudeindsatserne.

Husk at kontrollere, at alle fingerskruer og bolte er forsvarligt spændt efter indstilling af kørestolen.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.

4.2 Placering af indstillingsmuligheder

Se hvor de forskellige indstillingsmuligheder er placeret på kørestolen.



5. Tilpasningsmuligheder

Nakkestøtte

Ved hjælp af nakkestøttens bolte er det muligt at stille dybde, vinkel og højde på nakkestøtten.

Edison nakkestøtte

Swing kørestolen fås også med Edison nakkestøtte, som er nem at tilpasse med det multijusterbare greb. Nakkestøtten kan tilpasses i lodret, sideværts samt i fremadrettede positioner.

Knævinkel

Knævinklen kan justeres ved at løsne fingerskruen i siden (markering nr. 8, side 6). Når

den rette knævinkel er fundet, strammes boltene på begge sider igen.

Vinkeljustering af fodplade

Fodpladen justeres ved at løsne boltene på siden af fodpladen (markering nr. 3, side 6). Når den rette vinkel er fundet, strammes boltene igen.

Længdejustering af fodpladen


Fodpladen længdejusteres ved at løsne skruerne (markering nr. 4, side 6). Når længden er fundet, strammes skruerne igen.

6. Tilpasning af puder

Alle puder på kørestolen kan åbnes og fyldes eller tømmes, men vær forsigtig, da fyldet nemt flyver ud. Det anbefales at lave en tragt af papir, som fyldet hældes igennem og ned i puden.

⚠ Fjernes for meget af fyldet, får brugeren ikke tilstrækkelig trykaflastning eller støtte. Er der for meget fyld i puden, kan der opstå modtryk.

7. Kørestolens anatomi

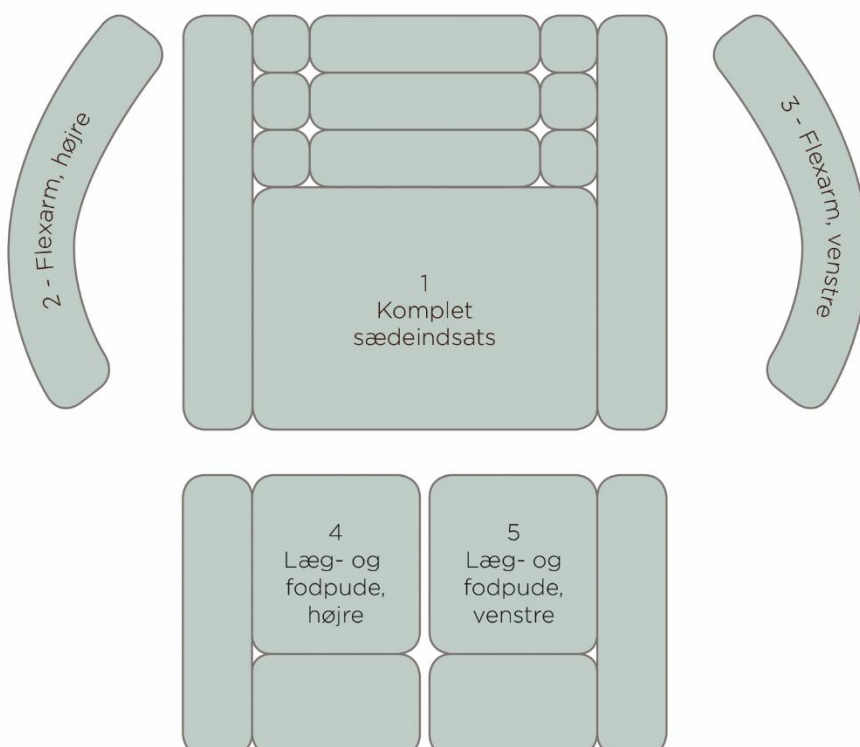

1. Komplet sædeindsats
2. Flexarm, højre
3. Flexarm, venstre
4. Læg- og fodpude, højre
5. Læg- og fodpude, venstre

8. Vedligeholdelse og rengøring

Kørestol

Swing kørestolen kan bruges både indendørs og udendørs. Bliver Swing kørestolen våd, kan den tørres af med en tør klud.

Er stellet snavset, kan det tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand. Det gælder også hjulene.

Puder

Puderne kan aftørres ved behov med en klud opvredet i mildt sæbevand.

Betræk

Der kan tilkøbes stretchcover betræk til nakkestøtte, kørestol og Flex arme samt et komfortbetræk til selve kørestolen.

Begge typer betræk kan vaskes ved 60° C og tørretumbles.

Desinfektion

Puderne kan også desinficeres ved behov med engangs- klude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %) eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max 10000 (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Swing kørestolen er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på kørestolen ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Swing kørestolen er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering.

Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Swing kørestolen er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.

10. Bortskaffelse

Cobi Rehabs produkter kan ved korrekt brug og vedligeholdelse holde i rigtig mange år. Produkterne kan også gentilpasses nye brugere.

Produkter, der ikke længere er i brug, bortskaffes på miljøforsvarlig vis. Kontakt evt. kommunen for yderligere information om bortskaffelse.



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUCENT

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
NL-7007 CJ Doetinchem
Holland

Life-mobility.com

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522

cobirehab.com