



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

Reden Transporter

Mobilt hjælpemiddel, der anvendes til positionering af bevægelseshæmmede personer.

Reden giver mulighed for varierede lejringsmuligheder i hvile- og aflastningssituationer.

Reden er beregnet til indendørs brug.

Til børn og voksne maks. 90 kg.

Brugervejledning



Medical device

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indhold

1.2 Brug lift	4
1.1 Belastning	4
1. Sikkerhed	4
1.3 Transport i bil	5
1.7 Brug af bæltter	5
1.5 Puderammen	5
1.6 Bremse og hjul	5
1.4 Bespænding under transport	5
1.8 Klemmerisiko	6
1.9 Vær ekstra opmærksom	6
2.3 Mange muligheder i ét hjælpemiddel	7
2.2 Mobilt hjælpemiddel	7
2.1 Belastning og brugervægt	7
2. Anvendelse	7
3.2 Kontrol	8
3.1 Klargøring	8
3. Ibrugtagning af Reden	8
2.5 Værd at bemærke om indsatspuderne	8
2.4 Indendørs brug	8
4.2 LED Indikator	9
4.1 Anvendelse	9
4. Opladning og brug af batteriet	9
4.3 Opladning	10
5.1 Håndbetjening	10
5. Indstillingsmuligheder	10
5.2 Højdejustering	11
5.3 Længdejustering af vognen	11
5.4 Styrehåndtaget	12
5.6 Bremsesystemet – justering	12
5.5 Bremsning – fremgangsmåde	12
6.1 Modul Indsatspude	13
6. Indsatspuder og lejringspuder	13
7. Madras med lejringspuder	14
8. Montering af bælte	15
9.2 Rengøring af puder	15
9.1 Rengøring af vogn	15
9. Vedligeholdelse	15
10. Fejlfinding	16
9.3 Øvrige	16

11. Reservedelsliste.....	17
12. Specifikationer	18
13. Garanti.....	18



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.

1. Sikkerhed

ADVARSEL

Reden Transporter må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Transporter. Ved forkert betjening kan brugeren komme til skade.

Bruges Reden Transporter til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, øges risikoen for at ødelægge transporteren.

Brugsanvisningen skal læses grundigt, før Reden Transporter tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med 

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af Reden Transporter.


Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

1.1 Belastning


 Bruger og evt. hjælpeudstyr må tilsammen ikke overskride maks.. vægten på 120 kg.

Reden er kun beregnet til én bruger med en maks. brugervægt på 90 kg.

1.2 Brug lift

 Brug om muligt lift, når brugeren forflyttes til og fra Reden. Ved brug af mobillift, skal Reden hæves i position således at mobilliftens "ben" går fri af løftearmen under vognen.

Vær opmærksom på, at brugeren ligger korrekt placeret på indsatspuden i Reden.

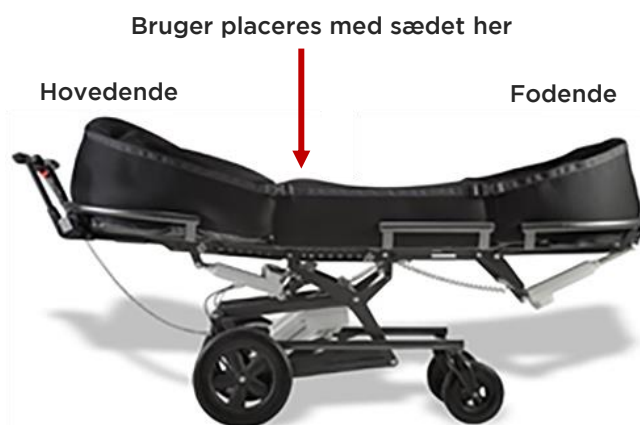

1.3 Transport i bil

Brug lift eller rampe ved på- og aflæsning, hvis Reden skal transporteres i motoriseret køretøj.


Brugeren må aldrig opholde sig i Reden under transport af denne. Heller ikke hvis Reden er

godt fastspændt under transport. Reden er ikke kollisionstestet. ⚠

1.4 Bespænding under transport

Reden er forsynet med seks bespændinger, der anvendes til at fastgøre vognen til bunden af transportmidlet.

Følg generelle sikkerhedskrav omkring fastgøring af hjælpemidler i transportmidler.

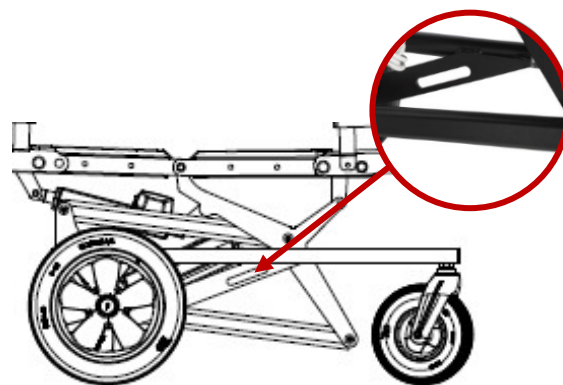

Bespændingerne er placeret på siden, foran på bundrammen og bagpå på bundrammen.

1.5 Puderammen

Indsatspuden placeres i puderammen/rælingen. Puderammens øvre rygdæl, sædedelen samt fodstøttens nedre del er forsynet med en bøjle, som fastholder puden/madrassen.

Puderammen/rælingen er ikke beregnet til at sidde eller ligge på. Fodstøtten er heller ikke beregnet til at sidde på.

1.6 Bremse og hjul

Reden er forsynet med bremse på baghjulene, men ikke på forhjulene. Det betyder, at vognens forende kan dreje og flytte sig. Derfor må bruger eller plejepersonale ikke læne sig op ad vognens sider, heller ikke når bremsen er aktiveret.

Bremsen er en kørebremse. Den er ikke kraftig nok til at kunne bremse og parkere vognen på skrånende underlag.

Bremsen betjenes via grebet monteret på styrehåndtaget. Alle fire hjul er med punkterfrie dæk.

1.7 Brug af bælte

⚠ Reden leveres med et bælte, der skal bruges under transport, og når kørestolen står stille. Bælte anbefales også til brugere, der ligger stille og ikke flytter meget rundt på sig selv.

Til urolige brugere eller brugere med ufrivillige bevægelser anbefales det at bruge to bælte monteret over kryds, når brugeren er placeret i Reden.

Reden egner sig ikke til brugere, der er mobile og kan forflytte sig ved egen hjælp.

Bæltet fastgøres til Redens topramme og ikke til bundrammen.

1.8 Klemmerisiko

⚠ Der må ikke være personer, genstande eller andet mellem eller under puderammens og løftearmens bevægelige dele, mellem topvange og bundramme og ej heller omkring aktuatorerne.

Hæv ikke Reden, når den er placeret under et bord eller andet. Reden kan gå i stykker og brugeren kan blive klemt og komme til skade



1.9 Vær ekstra opmærksom

⚠ Sørg for, at brugerens hænder, arme, ben og fødder ikke banker ind i udstyr eller forbigående personer. Pas også på ved smalle passager eller døråbninger. Vær endvidere ekstra opmærksom på følgende:

- Løft aldrig Reden fra gulv/terræn ved at holde i fodstøtten og/eller kørehåndtaget.
- Undgå, at køre Redens forhjul hårdt ind i kanter og lignende. Det kan ødelægge hjul og forhjulsgaffel - og i værste fald knække ophænget.
- Flyt kun Reden med bruger, når puderammen er sænket i position. Det giver den bedste stabilitet og fuldt udsyn i kørselsretningen.
- Lad altid Reden være bremset, når den ikke er i brug.
- Parkér aldrig Reden med brugeren på skrånende terræn. Bremsen er ikke effektiv på glatte og stejle overflader.
- Aktivér altid blokeringsbremsen, når brugeren ligger i Reden
- Aktivér altid blokeringsbremsen, når der hæves eller sænkes dele på Reden
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i Reden.
- Brug ikke Reden, mens den oplades.
- Efterlad aldrig en bruger i Reden på skrånende terræn.

2. Anvendelse

Reden er et mobilt hjælpemiddel, der anvendes til positionering af bevægelseshæmmede personer, som har behov for varierende lejringsmuligheder i hvile- og aflastningssituationer.

Reden med indsatspude anvendes til at sikre brugeren optimal komfort hvad enten der er tale om siddende eller liggende stilling, rygleje såvel som sideleje.

2.1 Belastning og brugervægt

Brugervægten må max. være 90 kg. Den angivne vægtgrænse på max 90 kg skal overholdes for at undgå skader på vognen.

Det anbefales at bruge lift til forflytning af personer til og fra Reden.

Reden er ikke egnet til personer, der kan forflytte sig ved egen hjælp.



Minimumslængde



Maksimumslængde

2.2 Mobilt hjælpemiddel

Reden er forsynet med firehjul med punkterfrie dæk. De forreste hjul er monteret i en drejelig forgaffel og kan dreje 360° om en lodret akse,

hvilket gør Reden let at manøvrere rundt. Baghjulene er fastmonteret om en vandret akse. Baghjulene kan bremses.

2.3 Mange muligheder i ét hjælpemiddel

Reden har flere indstillingsmuligheder. Den er fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte bruger. Reden kan:

- Længdejusteres i sæde og ryg og tilpasses til børn og voksne.
- Justeres i højden, så den passer til brugerens behov og/eller hjælperens arbejdsstilling.
- Skabe gode sidde- og liggestillinger med indsatspuderne, der sikrer tryghed og stabilitet.
- Indstilles i rygdelen og fodstøtten, fra vandret leje til 60° siddende stilling.
- Være et alternativ til kørestol, seng, madras, sække stol etc.
- Være et socialt redskab, da hvilesituationen ikke behøver at foregå et stationært sted.

2.4 Indendørs brug

Reden er beregnet til indendørs brug. Reden kan i enkelte tilfælde bruges udenfor i mindre omfang og kun på fladt terræn som fx terrasser og lignende.

Reden kan ikke bruges som transportmiddel udendørs over længere afstande, da den ikke er designet til brug i ujævnt, kuperet eller skrånende terræn eller i vand.

2.5 Værd at bemærke om indsatspuderne

For at yde den størst mulige støtte og komfort til brugeren skal indsatspuderne i rammen være lige høje. Det betyder, at en evt. højdeforskel skal udlignes.

Indsatspuderne er fyldt med latex og Krøyer-kugler. Blandingen kan godt synke sammen over

tid. Derfor følger der med købet af Reden en ekstra pose fyldblanding, som skal bruges til at udligne højdeforskelle. Kontakt gerne Cobi Rehab for mere information om tilpasning af indsatspuder til brugeren.

3. Ibrugtagning af Reden

3.1 Klargøring

Start med at sikre, at Reden ikke er beskadiget eller har mangler. Oplad batteriet i 10 timer ved tilslutning til stikkontakt. Se vejledning om opladning side 10.

Reden må aldrig bruges ved temperaturer under +5° C eller over +40 ° C. Hvis Reden har været opbevaret i meget kolde eller meget varme

omgivelser, skal den stå et døgn i stuetemperatur, inden den tages i brug.

Rengør Reden med en tør, blød klud inden vognen tages i brug.

Læs hele manualen igennem inden Reden tages i brug.

3.2 Kontrol

Kontrollér at:

- Puderammens længde passer til indsatspuden.
- Bremsemekanismen er uskadt og fungerer korrekt, og at baghjulene blokeres.
- Hjulene er uden synlige fejl og mangler.
- Kørehåndtaget sidder fastmonteret og er justerbart.
- Bevægelige dele (udtræk, ramme, styr og grebet på den lodrette styrestang) løber let og er ikke helt eller delvist blokeret.
- Batteriet er opladet og ladekablet er taget ud af stikkontakten og rullet sammen.
- Håndbetjeningens knapper virker og kan justere Redens højde, ryghældning og benhældning.

Reden er nu klar til at tages i brug.

4. Opladning og brug af batteriet

De elektriske funktioner på Reden betjenes af SMPS systemet fra LINAK. Systemet er designet til sundhedssektoren og er kendetegnet ved forbedret levetid, høj slidstyrke og ved at være vandtæt, støjsvagt og miljøvenligt.

Systemet består af kontrolboks med netkabel, et lithiumbatteri, tre motorer og en håndbetjening.

4.1 Anvendelse

Redens hæve- og sænkefunktion samt vinklingen af ryg- og fodstøtte styres ved hjælp af håndbetjeningens taster. Batteriet forsyner

aktuatorer såvel som håndbetjening med strøm til disse funktioner.

4.2 LED Indikator



CA40 er udstyret med en trefarvet LED indikator, der fortæller om enheden drives af el-net eller batteri.

Tilsluttet til elnettet	
LED farve	Angivelse af betjening
Grøn	Tilsluttet elnettet, <u>ikke</u> aktiveret med håndbetjeningen. Systemet fungerer korrekt og er klar til normal betjening.
Orange	Advarsel! Tilsluttet elnettet, <u>ikke</u> aktiveret med håndbetjeningen. Systemet er defekt og <u>må ikke</u> betjenes.
Gul	Advarsel! Tilsluttet elnettet, aktiveret med håndbetjeningen. Systemet fungerer korrekt.
Gul	Tilsluttet elnettet, <u>ikke</u> aktiveret med håndbetjeningen. Systemet er defekt og <u>må ikke</u> betjenes.

Ikke tilsluttet elnettet, men med batteri backup	
LED farve	Angivelse af betjening
Orange	Batteridrift, aktiveret med håndbetjeningen. Systemet fungerer korrekt.
Intet LED-lys	Batteridrift, <u>ikke</u> aktiveret med håndbetjeningen. Eller enheden er ikke tilsluttet elnettet.

4.3 Opladning


- ⚠ Et næsten afladet batteri afgiver en bib-lyd, når tasterne på håndbetjeningen aktiveres. Sæt straks batteriet til opladning. Brug aldrig et næsten afladet batteri.
- Opladningstid er 10 timer, tilsluttet stikkontakt.
- Driftstiden er ca. 5 timer ved fuld opladning af et fuldt ydedygtigt batteri.
- Hav faste rutiner omkring opladning. Sæt fx Reden til opladning om natten. Batteriet kan ikke overoplades.
- Ladekablet skal være rullet sammen, når Reden er i brug. Det mindsker risikoen for skader på personer og køretøj.
- Ved langtidsopbevaring af Reden skal batteriet genoplades fuldt hver 12. måned, da det ellers kan gå i stykker pga. selvafladning.
- Opbevar batteriet indendørs og tørt. Batteriet må ved transport og opbevaring ikke udsættes for temperaturer under -10°C eller over $+40^{\circ}\text{C}$.
- Ved brug skal temperaturen ligge mellem $+5^{\circ}\text{C}$ til $+30^{\circ}\text{C}$.
- Alle LINAK-produkter har en forventet levetid på 4 år. Levetiden afhænger af anvendelsen.
- LINAK-produkter bør rengøres med jævne mellemrum for støv og skidt. De bør kontrolleres for mekaniske skader og slidslidte dele bør udskiftes.

5. Indstillingsmuligheder

5.1 Håndbetjening

Redens hæve- og sænkefunktioner aktiveres ved hjælp af håndbetjeningen.

Knappernes funktioner:

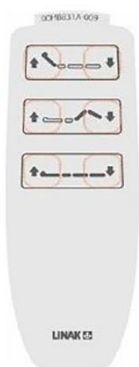


Øverste: Rygindstilling

Mellemste: Fodstøttens vinkel

Nederste: Højdeindstilling over gulvhøjde

Brug krogen til at hænge håndbetjeningen på styret, når håndbetjeningen ikke er i brug.

5.2 Højdejustering

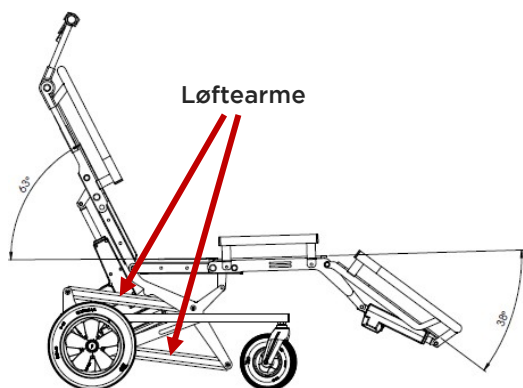

Reden kan justeres trinløst ved hjælp af løftearme samt elektrisk styreenhed og batteri, aktuatorer og betjeningsenhed. Redens hæve- og sænkefunktion, puderammens rygdelen og fodstøtten styres med håndbetjeningen.

I yderpositionerne stopper hæve- og sænkefunktionen automatisk.


! Vær opmærksom på, at nederste løftearm ikke støder på noget ved kørsel over forhindringer.

Brug rampe, hvis vognen skal læsses ind i et motoriseret køretøj.


5.3 Længdejustering af vognen

Rammen til indsatspuden kan længdejusteres i sæde- og rygdelen.

Der er tre positionsmuligheder for rygdelen og tre positionsmuligheder for sædedelen, hvilket i alt giver ni længdeindstillinger.

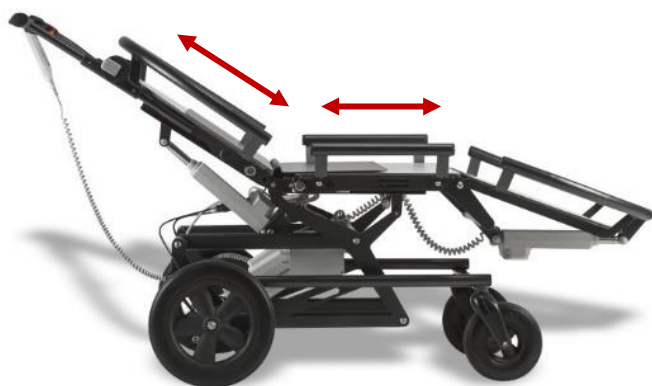

1. Fjern indsatspuden.

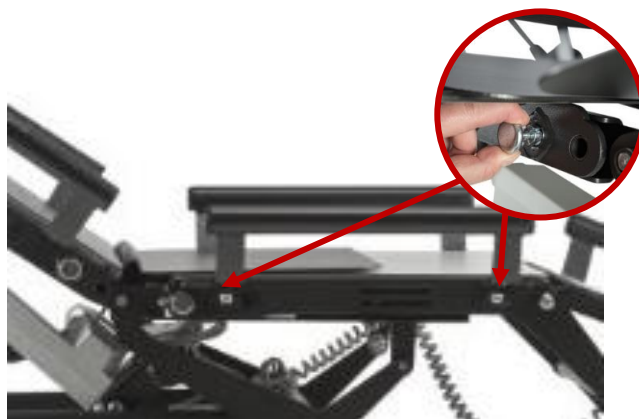

2. På rammens underside er der i begge sider placeret en positioneringsbolt til sæde- og rygdelen. Boltene drejes i ulåst position.




3. Tag fat i rammen og træk ud eller skub ind til ønsket position. Boltene i begge sider skal igen låses. Træk eller skub igen rammen indtil der høres et klik. Rammen er nu låst.

5.4 Styrehåndtaget

Redens styrehåndtag kan højdeindstilles på to måder. Ved hjælp af håndbetjeningen og ved stepvis vinkling af selve håndtaget.

På hver side af den lodrette styrestang er der placeret et greb (kaldet knæled), som kan løsnes, hvis håndtagets vinkel skal indstilles.

⚠ Styrehåndtaget må ikke bruges som håndtag, når Reden kører over dørtrin eller lign. forhindringer. Det kan knække.

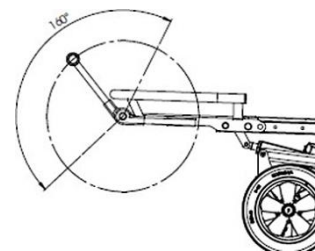

5.5 Bremsning - fremgangsmåde

Bremserne er monteret på de bagerste hjul, og det er kun de to hjul, der kan bremses. Bremsegrebet på styrehåndtaget er forsynet med lås og fungerer som en parkeringsbremse. Bremsen aktiveres ved at klemme bremsehåndtaget, så hjulene blokeres. Løsn bremsen ved at holde den røde plastdel inde. Det frakobler bremsen.

⚠ Selvom Reden er forsynet med bremse på baghjulene, kan vognens forende stadig dreje og flytte sig, når baghjulsbremserne er aktiveret. Derfor må bruger eller plejepersonale ikke læne sig op ad vognens sider.



5.6 Bremsesystemet - justering

Bremsesystemet justeres ved at dreje justeringsskruen. Træk ned i bremsekablet og drej bagefter med uret (skrues indad). Det reducerer bremseeffekten. Drejes der mod uret (skrues udad) øges bremseeffekten.

Kontrollér, at bremsekablet ikke sidder i klemme mellem rillen på justeringsskruen og bremsehuset. Rillerne må ikke være ud for hinanden.



6. Indsatspuder og lejringspuder

6.1 Modul Indsatspude



Indsatspuderne til Reden fås i forskellige mål og modeller. De er fremstillet i behagelige materialer og har aftageligt og vaskbart yderbetræk.



Inderst er indsatspuderne forsynet med et vandafvisende og antibakterielt polyesterbetræk.

Puderne er forsynet med en anti-skrud bund, der sikrer, at de bliver liggende. Der er ikke brug for ekstra stropper og spænder til fastgørelse.

Modul Indsatspuden er opbygget af tre moduler og kan sammenlignes med en sækkestol. Modulerne er formbare og tilpasser sig efter brugeren og underlaget. Det giver støtte og komfort siddende som

liggende til brugere med scoliose eller andre svære deformiteter.

Rygmodulet er inderst bygget op af to separate puder. Modul A (den mindste pude) har en mere fast fyldning til støtte af hoved og nakke. Modul B har en mindre fyldning, der gør den mere fleksibel. Modul B kan formes efter brugerens facon og behov.

Brugeren kan placeres i enten rygleje eller sideleje. Brug altid lift ved forflytninger til og fra transporteren.



Reden er ikke forsynet med en sengehest. Brug derfor altid bælte, når der er en bruger i transporteren.



Form indsatspuden inden brugeren placeres i Reden. På den måde kommer brugeren dybt ind i materialet og får den bedste støtte.



Eksempel på vandret rygleje med Lasal halvmånepude til støtte af arme. Modul Indsatspuden former sig efter brugeren og støtter krop, ben og fødder.



Eksempel på sideleje. Lejringspuder støtter hovedet, arme og det øverstliggende ben.

7. Madras med lejringspuder

Madrasen består af en Tempraflex viskoelastisk skummadras, hvorpå brugerens leje bygges op med løse lejringspuder. Her kan der etableres en individuel lejrning for brugeren. Lejringspuderne kan også bruges til lejrning i brugerens seng.

Tempraflex madrassen fås i tre længder, og den er forsynet med et vandafvisende og

antibakterielt polyesterbetræk inderst. Madrassen er også forsynet med en anti-skrid bund, så den bliver liggende i rammen. Ekstra stropper og spænder til at fastgøre madrassen er derfor ikke nødvendige.



Yderbetrækket er på den øverste del, svarende til ryggen, forsynet med stropper til fastgørelse af lejringspuder.



Stropper og bæltet holder bruger og lejringspuder på plads i den ønskede stilling.



Afhængig af stilling og brugerens behov for støtte, placeres de løse lejringspuder på madrassen, så der skabes en rede.



Mobilia lejringsserien til Reden giver i kombination med LASAL-puderne de bedste muligheder for individuel lejrning.

Mobilia lejringspuder er fyldt med EPS-kugler i et polyesterbetræk, som er vandafvisende og antibakterielt. Puderne fås med aftageligt og vaskbart betræk.



Kilepude



Nakkepuf



Gouda kilepude



Trekantpude

8. Montering af bælte

Reden er ikke forsynet med sengeheste. Brug derfor altid et til to bælte til brugeren afhængigt af, hvor meget brugeren bevæger sig. Bæltet placeres hen over hoften eller over kryds, hvis der bruges to bælte.



Bælte placeres over hoften på brugeren og fastgøres som vist nedenfor.



9. Vedligeholdelse

9.1 Rengøring af vogn

Reden rengøres på linje med seng og kørestol.

Rengør aldrig Reden, når brugeren ligger i.

Rengør Reden med en blød klud og vand, eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel eller lignende.

Hæv Reden helt op, så den vipbare puderramme er mere end 45° og fodstøtten er løftet 20°. På den måde er alle overflader er tilgængelige.

Aktivér blokeringsbremsen, når Reden rengøres.

Rengør hjul og hjulophæng, hvis de er blevet beskidte.

Undgå at bruge Reden i regnvejr. Tør den af, hvis den bliver våd.

Brug aldrig stærke rengøringsmidler og lign. på Reden.

9.2 Rengøring af puder

Indsatspuden uden betræk er fremstillet af 100% PU- belagt og brandhæmmet polyester. Rengør puden med en blød klud og vand evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Brug gerne sprit.

Yderbetrækkene fås i to udgaver:

Gråt single jersey:

Bio-baseret, bi-elastisk, vandafvisende, hudvenlig, ÖKO TEX Certificeret og brandhæmmet. Vaskes ved 60° C.

Sort Spacer:

100% polyester, ÖKO TEX Certificeret og brandhæmmet. Vaskes ved 40° C.

Begge betræk på Modul Indsatspuderne og madras er forsynet med anti-skrid bund.

Se produktguiden for mere information om puder og betræk.

9.3 Øvrige

Desinfektion

Brug en 75-80° spritopløsning til desinfektion af puderamme, andre metaldele og indsatspudden.

Smøring

Det er ikke nødvendigt at smøre Reden.

Reparation

Ved reparation af Reden gælder de generelle sikkerhedsforskrifter og følgende:

-Ved udskiftning af sliddele og/eller ved behov for andre reservedele kontakt Cobi Rehab.

-Brug aldrig uoriginale reservedele eller tilbehør (undtaget puder), da dette kan påvirke produktets godkendelse, levetid, sikkerhed og EMC.


-Reservedelene bestilles ud fra Cobi Rehab reservedelsliste (se side 16).

10. Fejlfinding

Problem	Tjek	Hvis ja	Nej
Hæve/sænkefunktionen eller vippemekanismen fungerer ikke	Er batteriet opladet?		Oplad det.
	Er der noget i klemme?	Fjern det.	
	Er håndbetjeningen synligt skadet?	Skift til en anden håndbetjening.	
	Sidder alle stik korrekt placeret i kontrolboksen?		Sæt dem korrekt i.
Hvis intet af ovenstående løser problemet, kontakt Cobi Rehab.			
Bremsen fungerer ikke	Er kablet intakt?		Justér bremsen. Se pkt. 5.6.
Hvis intet af ovenstående løser problemet, kontakt Cobi Rehab.			
Forhjul drejer ikke rundt	Er der løse bolte?	Efterspænd dem.	
	Er hjulophænget løst?	Efterspænd det.	
	Er der beskadigede dele?	Kontakt Cobi Rehab.	
	Sidder der noget i klemme?	Fjern det.	
	Er hjulophænget løst?	Efterspænd det.	
Hvis intet af ovenstående løser problemet, kontakt Cobi Rehab.			
Baghjul drejer ikke rundt	Er bremsen aktiveret?		Justér bremsekablet. Se pkt. 5.6.
	Er alle dele intakte?		Reparér eller udskift defekte dele. Se pkt. 9.3.
Hvis intet af ovenstående løser problemet, kontakt Cobi Rehab.			

11. Reservedelsliste

Pos. Nr.	Best.nr.	Reden	Antal
2	163020	Aktuator Linak LA40 Bruges til løft, rygvip og benvip	3 stk
3	163000	Kontrolboks Linak CA40 inkl. netkabel	1 stk
-	163001	Lithium batteri	1 stk
-	163002		1 stk
11	163044	Gummi for håndtag	2 stk
17	163030	Forhjul Ø200mm ekskl. gaffel og leje	2 stk
18	163031	Hjulgaffel til forhjul m. leje (venstre/højre)	2 stk
16 & 19	163040 (hø) 163041 (ve)	Baghjul Ø300mm med tromlebremse	2 stk
22	163050	Laminatplade - ryg	1 stk
22	163052	Laminatplade - fodstøtte	1 stk
27	163051	Laminatplade - sæde	1 stk
35	163045	Knæled til justering af styrehåndtaget - højre	1 stk
35	160346	Knæled til justering af styrehåndtaget - venstre	1 stk
34	163042	Bremsegreb	1 stk
Ej. III.	163010	Håndbetjening LINAK HB83 3-vejs	1 stk

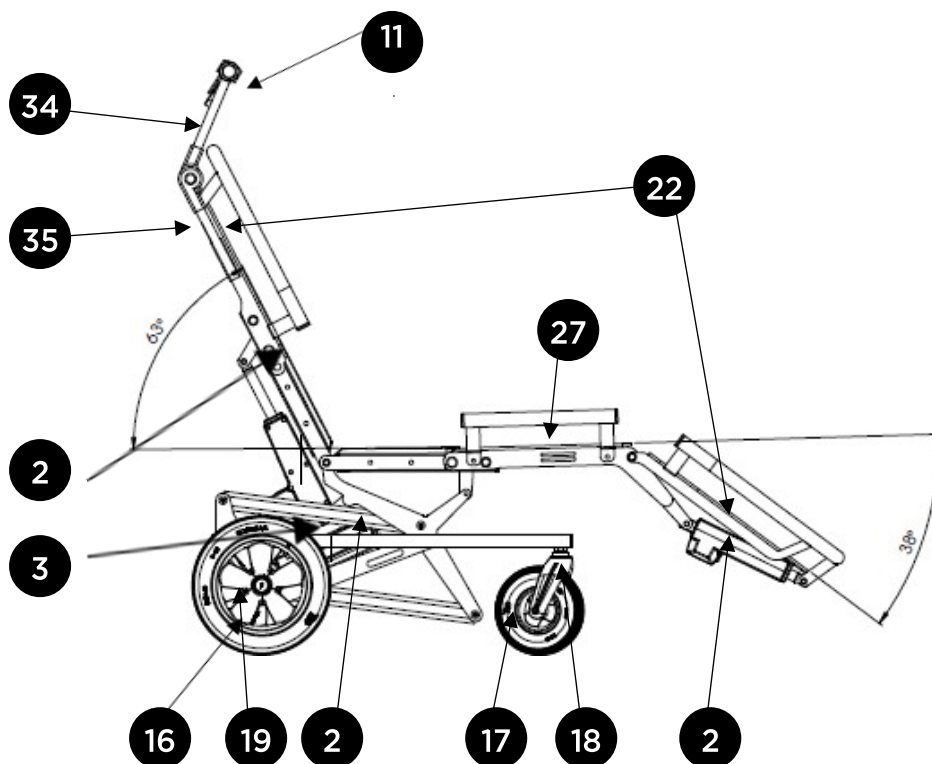

12. Specifikationer

Maks. længde med styrehåndtag og fodstøtte fuldt udtrukket	2150 mm
Maks. bredde af Reden målt over puderammens bøjle	720 mm
Højde af puderammen målt fra gulv til øverst på bøjlen	
Laveste position	500 mm
Højeste position	735 mm
Puderammens længde (justerbar)	
Min længde	1460 mm
Maks. længde	1830 mm
Maks. liggemål fuldt udtrukket:	
med Madrassen (personhøjde maks. 172 cm)	1835 mm
med Modul Indsatspude (personhøjde maks. 180 cm)	1930 mm
Hjulafstand mellem for- og baghjul målt fra midt aksel til midt aksel	720 mm
Totalvægt uden indsatspude	55 kg
Bæreevne: Sikkerhedsafprøvet til	120 kg
Brugsvægt (maks. personvægt) anbefalet	90 kg
Forhjul diameter	200 mm
Baghjul diameter	300 mm
Aktuator, motor, løft, rygvip og benvip - LINAK LA40-100 24V	Load 4000 N
Kontrolboks - LINAK CA40 - SMPS - IPX6	24 V
Lader indbygget i kontrolboks. For opladning tilslut:	100V/240V
Håndbetjening LINAK HB83 3-vejs	
<i>Minimumsmål fx ved nedpakning til transport: Vognen er klappet helt sammen og sænket til laveste position. Ryggen er maks. hævet, fodstøtte i laveste position og styrehåndtag er skubbet maks. fremad.</i>	<i>Længde: 1340 mm Bredde: 720 mm Højde: 1070 mm</i>

13. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Reden Transporter er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på kørestolen ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Reden Transporter er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale

- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Reden Transporter er blevet håndteret på en u hensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

FORHANDLER/PRODUCENT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com