



Lasal Reden

Anvendelse

Redens hæve- og sænkefunktion samt vinklingen af ryg- og fodstøtte styres ved hjælp af håndbetjenings taster. Den anbefalede brugervægt er max. 90 kg. Reden er ikke beregnet til udendørs brug.

Anvendelse af håndbetjening

Brug af Redens hæve- og sænkefunktioner.



Øverste: Rygindstilling.

Mellem: Fodstøttens vinkel.

Nederste: Højdeindstilling over gulvhøjde.

LED Indikator

CA40 har en trefarvet LED indikator, som viser om Reden kører på batteri eller får strøm via en stikkontakt.

Tilsluttet til en stikkontakt	
LED farve	Angivelse af betjening
Grøn	Tilsluttet stikkontakt, ikke aktiveret med håndbetjeningen. Systemet er klar til normal betjening.
Orange	Tilsluttet stikkontakt, ikke aktiveret med håndbetjeningen. Systemet er defekt. Må ikke betjenes.
Gul	Tilsluttet stikkontakt, aktiveret med håndbetjeningen. Systemet fungerer.
Gul	Advarsel! Tilsluttet stikkontakt, ikke aktiveret med håndbetjeningen. Systemet er defekt. Må ikke betjenes.
Batteri back-up uden tilslutning til el-nettet	
LED farve	Angivelse af betjening
Orange	Batteridrift, aktiveret med håndbetjening. Systemet fungerer.
Intet LED-lys	Batteridrift, ikke aktiveret med håndbetjeningen. Enheden er ikke tilsluttet el-nettet.

Opladning af Reden

Batteriet skal tilsluttes en oplader, hvis det afgiver en bib-lyd, ellers ødelægges batteriet.

- Sæt batteriets ledning i stikkontakten. Opladningstiden er 10 timer.
- Reden må ikke benyttes under opladning.
- Et fuldt opladt batteri holder i op til fem timer.
- Rul ledningskablet sammen inden brug af Reden.
- Hvis Reden ikke er i brug, skal batteriet stadig oplades hver 12. måned.
- Indfør faste rutiner for opladning.

Forflytning til og fra Reden

Brug lift, når brugeren forflyttes til og fra Reden. Ved brug af mobillift skal Reden hæves så mobilliftens "ben" går fri af løftearmen under vognen.

Klemmerisiko


Pas på, at bruger eller tøjdele ikke kommer i klemme i Redens bevægelige dele.

Transport af Reden under kørsel

Brug lift eller rampe, hvis Reden skal transporteres fra ét sted til et andet. Under transport må Reden **ikke** benyttes af brugeren.

Fastspænding under transport

Reden er forsynet med seks bespændinger, der bruges til at fastgøre vognen til bunden af transportmidlet. Se tegningen herunder.

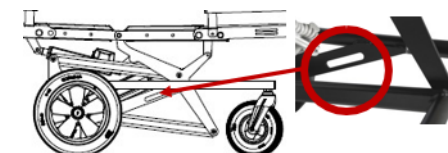



Længdejustering af Reden

Rammen kan længdejusteres i sædedelen og i rygdelen. Der er i alt ni indstillinger.

Sådan længdejusterer du:

- Fjern indsatspuden.
- Tag fat på undersiden af rammen, hvor der på hver side er placeret positioneringsbolte. Drej boltene i ulåst position.
- Træk og skub ud til ønsket position. Drej boltene tilbage i låst position og træk i rammen til der høres et "klik". Se billedet herunder.
- Reden er nu klar til brug.



Montering af bælte

Brug altid bælte, når brugeren opholder sig i Reden. Brug et eller to bælte, afhængigt af brugerens motoriske uro.

Placer bæltet hen over hoften og over kryds ved to. Se billedet herunder.

Bæltet fastgøres rundt om rammen eller i rillerne under sædet.



Indstilling af styrehåndtaget

Styrehåndtaget er monteret på puderrammen. På hver side af den lodrette styrestang er der placeret et greb, som kan løsnes, så håndtagets vinkel kan indstilles.

Håndtering af Reden via styrehåndtaget

Vip ikke Reden bagover, når den skal hen over fx en rampe. Vippet kan ødelægge styrehåndtaget.

Anvendelse af Redens bremsesystem

Bremsegrebet på styrehåndtaget er forsynet med lås og fungerer som en parkeringsbremse. Bremsen aktiveres ved at klemme på bremsehåndtaget. Frakobl bremsen ved at holde den røde plastdel inde.

Vigtig information

Hæv ikke Reden, hvis den er placeret under et bord eller lignende. Det kan medføre skade på Reden og/eller brugeren.

