



Lasal lejringspude

Rengørings- og desinfektionsvejledning

Korrekte rengøringsrutiner kan forlænge pudens levetid.



Daglig rengøring af pude uden betræk

1. Fjern snavs og spild fra pude før rengøringen starter.
2. Tør puden af med en ren klud vredet op i vand med et mildt rengøringsmiddel.
3. Tør puden grundigt af med en ren, tør klud. Puden skal være helt tør, før den tages i brug igen eller lægges væk.

Desinfektion og vask

Til overfladedesinfektion af pude bruges der engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %) eller et klorprodukt 1000-1200 ppm* (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Hygiejnebetræk og hvidt bomuldsbetræk kan vaskes ved 95° C og tørretumbles.**

Farvede bomuldsbetræk kan vaskes ved 60° C og tørretumbles. Farvede betræk vil falme med tiden.

Lasal lejringspuden kan ikke vaskes. Maskinvask vil ødelægge fyldet i puden.

Når de forskellige typer af betræk maskinvaskes, skal lynlåsen lynes, da den ellers kan tage skade.

Rengøring og desinfektion af betræk og lejringspude tager udgangspunkt i Statens Serum Instituts seneste infektionshygiejniske retningslinjer for "MRSA i hhv. hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og lignende institutioner".

* I henhold til SSI-retningslinjer "NIR for desinfektion i sundhedssektoren" og "NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bæretilstand i sundhedssektoren".

** I henhold til "NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren".