



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRODUKTARK

XXL-Rehab Arbejdsstol

Stærk og funktionel arbejdsstol udviklet til den bariatriske bruger.

Arbejdsstolen er beregnet til brugere, der vejer op til 275 kg. Arbejdsstolen anvendes på institutioner, plejecentre, arbejdspladser og i private hjem.



- Elektrisk højdejustering
- Trykaflastende sæde
- Stærk konstruktion
- Vægtkapacitet op til 275 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Konstruktion

XXL-Rehab Arbejdsstol er udstyret med et trykaflastende sæde og ryglæn, der kan indstilles i vinkel og dybde. Sammen med den elektriske højdejustering betyder det en bariatrisk arbejdsstol med en komfort udover det sædvanlige.

XXL-Rehab Arbejdsstolen kommer med en stærk krydsramme konstruktion, en manuel

håndbremse (ikke afbilledet) placeret ved højre armlæn samt stabile og kraftige hjul med velkørende lejer.

Ryglænet er forstærket og monteret på to parallelle rør, der kan indstilles i vinkel og dybde. Armlænene kan slås ned og har trinløs, sikret indstilling.

Højdejustering

XXL-Rehab Arbejdsstol er udstyret med elektrisk højdejustering med dobbelte cylindre, som gør hejset ekstra stærkt. Bruger kan således uden problemer løfte sædehøjden, mens stolen stadig er i brug. Den elektriske højdejustering har et løftespænd på 20 cm, hvilket sikrer korrekt arbejds højde ved arbejds-, køkken- eller

spisebord. El-hejset betjenes let med et tryk på knap placeret under armlænet.

Med elektrisk hejs af sædet og velkørende hjul kan brugeren nemt forflytte sig rundt og op, hvilket understøtter muligheden for et aktivt liv.

Betræk

Arbejdsstolen leveres med gråt, kraftigt møbelbetræk, som er smudsafvisende og

brandhæmmende. Cobi Rehab anbefaler tilkøb af inkontinensbetræk.

Vedligeholdelse af betræk

Daglig rengøring af betræk og stel kan gøres med en hårdt opvreden klud.

Betrækket kan vaskes med tekstilrens.

Vedligeholdelse af stel og elektrisk højdejustering

Den elektriske højdejustering skal jævnligt børstes rent for støv og snavs. Kør sædet op til højeste stilling og gør derefter rent med en støveklud.

Brug ikke vand og opløsningsmiddel i forbindelse med rengøring af el-hejset.

Kontakt Cobi Rehab for yderligere vedligeholdelse af arbejdsstolen.

Desinfektion

Sædet og ryg skal skiftes ud ved overgang til ny bruger.

Det sker for at undgå krydskontamination.

Transport

XXL-Rehab arbejdsstolen kan transporteres, som den er, fra et brugssted til et andet.

Arbejdsstolen tåler at blive løftet i armlænene.

Arbejdsstolen kan ikke bruges som sæde i motoriseret køretøj.

Kontakt Cobi Rehab, hvis arbejdsstolen skal demonteres.

Opbevaring

XXL-Rehab arbejdsstolen bør opbevares mørkt og dækket af et lagen eller andet cover.

 Tjek jævnligt, at arbejdsstolen ikke er blevet våd eller beskadiget under opbevaring.

XXL-Rehab bør opbevares i temperaturer mellem -10°- 50° C.

Specifikationer	
Brugervægt max.	275 kg
Stelbredde	56 cm
Sædebredde	62 / 72 cm
Sædedybde	40 / 45 / 50 cm
Sædehøjde	44-64 / 51-79 cm
Rygbredde	46 / 66 cm
Ryghøjde	43 cm
Armlæn trinløs indstilling	25-35 cm
Armlæn breddeindstillelige	Ja
Vægt	Ca. 40 kg
Sammenklappelig	Nej
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Grå
Ramme	Pulverlakeret stål
Løftesystem	Heavy-duty aktuator
Hjul	100 mm grå polyuretan
Betræk	100% polyester
Lader	Type 2240-12V
Lader input	230V
Batterier (2 styks.)	FGV 20721 12 V 7,2 Ah
Generelle krav og prøvningsmetoder iht.	DS/EN12182:2012
ISO- klassifikation	ISO 18 09 03 - 12
Risikoklasse	I
UDI-DI	Ikke offentliggjort
Grundlæggende UDI	Ikke offentliggjort
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse	Ja
Model navn	Real 9200 Twin EL
Forventet levetid	10 år
Godkendt efter følgende standarder	EN 1335-2, EN 1335-3, IEC 60601-1-2
Tekstilerne er godkendt efterfølgende standarder	EN 1021-1, EN 1021-2

Model	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Arbejdsstol	62 cm	40 cm	44 - 64 cm	0190-062-040	47605
XXL-Rehab Arbejdsstol	62 cm	45 cm	44 - 64 cm	0190-062-045	105800
XXL-Rehab Arbejdsstol	62 cm	50 cm	44 - 64 cm	0190-062-050	105801
XXL-Rehab Arbejdsstol	62 cm	40 cm	51 - 79 cm	0190-062-140	105802
XXL-Rehab Arbejdsstol	62 cm	45 cm	51 - 79 cm	0190-062-145	105804
XXL-Rehab Arbejdsstol	62 cm	50 cm	51 - 79 cm	0190-062-150	105803
XXL-Rehab Arbejdsstol	72 cm	40 cm	44 - 64 cm	0190-072-040	47618
XXL-Rehab Arbejdsstol	72 cm	45 cm	44 - 64 cm	0190-072-045	105805
XXL-Rehab Arbejdsstol	72 cm	50 cm	44 - 64 cm	0190-072-050	105806
XXL-Rehab Arbejdsstol	72 cm	40 cm	51 - 79 cm	0190-072-140	105807
XXL-Rehab Arbejdsstol	72 cm	45 cm	51 - 79 cm	0190-072-145	105808
XXL-Rehab Arbejdsstol	72 cm	50 cm	51 - 79 cm	0190-072-150	105809