



## PRODUKTARK

# Lasal lejringspuder

### Løsningen på lejrning.

Lasal lejringspuder er udviklet til lejrning af brugere inden for følgende patientkategorier: demens, geriatri, neurologi, palliation og smerte.

Lejringspuderne bruges på fx plejecentre, institutioner, hospice og i private hjem.



- Trykfordelende effekt.
- Anti-bakterielt forsejlet pudeoverflade.
- Mange lejringsmuligheder i hver enkel pude.
- Vaskbare betræk.
- Giver taktile og proprioceptive stimuli.
- Mere end 25 forskellige puder i serien.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

## Anvendelse

Lasal lejringspuder bruges af børn og voksne som støtte og aflastning i liggende eller siddende stilling i fx sengen, kørestolen, sofaen eller på gulvet.

Puderne er formbare og tilpasser sig kroppens form. Derudover vil puderne også reflektere brugers kropsvarme. Når kropsvarmen reflekteres, virker det stimulerende på muskler og kredsløb.

Pudernes tætte berøring ind mod kroppen giver en følelse af ro og tryghed, og det er nemt at ændre på pudernes form undervejs.

Bemærk, at Lasal lejringspuder ikke er et dokumenteret antidecubitus produkt, trods den høje komfort og trykfordeling.



Bananpude L langs maven og mellem lårene.  
Firkantpude L mellem underbenene.

## Konstruktion

Lasal lejringspuder findes i en bred vifte af faconer og størrelser. Kombinationen af de små polystyrenkugler i en fleksibel inderpude betrukket med fx et yderbetræk i bomuld gør, at puderne former sig individuelt efter brugeren og underlaget.

Lasal lejringspuder er formbare og glider derfor ikke, som en almindelig pude kan gøre.

Der findes to yderbetræk. Et farvet betræk i bomuld til lejrning med farvekoder og et gråt hygiejnebetræk.

Bomuldsbetrækket er åndbart, vaskbart og anti-bakterielt behandlet. Hygiejnebetrækket er ligeledes vaskbart og mug- og svamperesistent.



Bananpude S bag om ryggen og under armen.  
Bananpude L foran kroppen og mellem lårene.  
Firkantpude L mellem underbenene.

## Beroligende effekt

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også bruges til mindskning af spasticitet og give taktile stimuli.

Taktile stimulering hjælper og har en betydning for fx mennesker med demens, idet den afgrænsende fornemmelse af kroppen giver en beroligende effekt.



Tyk halvmånepude i skødet. Halvmånepude bag nakken. T-pude M mellem lårene.

## Rengøring og vedligeholdelse

### Daglig rengøring af pude

Tør puden af med en ren klud vredet op i vand med et mildt rengøringsmiddel. Pudene skal være helt tør, før den tages i brug igen eller lægges væk.

### Desinfektion og vask

Til overfladedesinfektion af inderpuden bruges engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %)

eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Bomuldsbetrækket vaskes på 60° C og kan tørretumbles. Det kryber cirka 5% og kan falme med tiden. Hygiejnebetrækket vaskes på 95° C og tørretumbles.

Lasal lejringspuder kan ikke vaskes. Maskinvask vil ødelægge fyldet i pudene.

## Lasal lejringspuder



U-formet nakkepude, barn, S  
Str. 62/109x33x4,5 cm  
HMI: 65001, Varenr.: 0305-901-000

Nakkepude, barn  
Str. 23x16x5 cm  
HMI: 69983  
Varenr.: 0305-321-000



Halvmånepude, S  
Str. 47x22,5x4 cm  
HMI: 27873  
Varenr.: 0305-301-000



Halvmånepude  
Str. 79x33x7 cm  
HMI: 27872  
Varenr.: 0305-801-000



Halvmånepude, tyk  
Str. 86x40x7 cm  
HMI: 27871  
Varenr.: 0305-811-000



U-formet nakkepude, junior, S  
Str. 54/90x15x4 cm  
HMI: 6500, Varenr.: 0305-921-000



Nakkepude, voksen  
Str. 24x21x7 cm  
HMI: 65004  
Varenr.: 0305-311-000



U-formet nakkepude, junior, L  
Str. 60/114x21x6 cm  
HMI: 65002, Varenr.: 0305-911-000



Trekantpude, L  
Str. 94x24,5x22 cm  
HMI: 27870  
Varenr.: 0305-201-000



Trekantpude, M  
Str. 66x20x17,5 cm  
HMI: 27869  
Varenr.: 0305-211-000

Trekantpude, M/S  
Str. 55x16x14 cm  
HMI: 64993  
Varenr.: 0305-231-000



Trekantpude, S  
Str. 39,5x12x10 cm  
HMI: 27868  
Varenr.: 0305-221-000



T-pude, XS  
Str. 36/13x27/12,5x4 cm  
HMI: 27882  
Varenr.: 0305-6041-000



T-pude, S, Str. 56,5/17,5x37/15x7 cm  
HMI: 27883, Varenr.: 0305-6031-000



T-pude, M, Str. 63/22x40/19,5x7 cm  
HMI: 27884, Varenr.: 0305-6021-000



T-pude, L/M, Str. 72/25x45/20x8 cm  
HMI: 64994, Varenr.: 0305-6016-000



T-pude, L, Str. 83/27x56/27x10 cm  
HMI: 27885, Varenr.: 0305-6011-000



T-pude, XL, Str. 98/26x61/29x11 cm  
HMI: 27886, Varenr.: 0305-6001-000



Siddepude, lang  
Str. 104x50x40/18,5 cm  
HMI: 27879  
Varenr.: 0305-421-000

Firkantpude, L  
Str. 73x42x5 cm  
HMI: 27875  
Varenr.: 0305-711-000



Firkantpude, S  
Str. 59,5x29,5x5,5 cm  
HMI: 27874  
Varenr.: 0305-701-000



Firkantpude, XS  
Str. 40x10x3 cm  
HMI: 29374,  
Varenr.: 0305-741-000



Firkantpude  
Str. 35x22x3 cm  
HMI: 69984  
Varenr.: 0305-731-000

Firkantpude, Lang  
Str. 110x41x10 cm  
HMI: 27876  
Varenr.: 0305-721-000

Buttet støttepude  
Str. 34x24x14/5,5 cm, HMI: 27877  
Varenr.: 0305-511-000

Siddepude, høj  
Str. 73x50x29/13 cm, HMI: 27878  
Varenr.: 0305-401-000



Bananpude, S, Str. 144x40x12 cm  
HMI: 27866, Varenr.: 0305-111-000

Slangeformet pude, Str. 320x30x9 cm  
HMI: 27867, Varenr.: 0305-151-000

Bananpude, L, Str. 148x31x10 cm,  
HMI: 27865, Varenr.: 0305-101-000

## Specifikationer

Kuglemateriale	Krøyer-kugler af ekspanderet polystyren. Flammehæmmet.
Inderpude	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Bomuldsbetræk	100% Öko-Tex perlebomuld. Anti-bakterielt behandlet. Ej flammehæmmende.
Hygiejnebetræk	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Rengøring af inderpude	Puden tåler ikke maskinvask, men kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel eller desinficeres.
Vask af betræk	Bomuldsbetrækket vaskes på 60° C og kan tørretumbles. Det kryber cirka 5% og kan falme med tiden. Hygiejnebetrækket vaskes på 95° C og kan tørretumbles.
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
ISO-klassifikation	09 07 06 - 02
Forventet levetid	2 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100014N5

---

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på **cobi@cobi.dk** eller **7025 2522**.

---

## Bestilling af Lasal lejringspuder med betræk

På oversigten side 3 finder du en oversigt over alle Lasal lejringspuder med deres HMI-nummer og varenummer. Varenummeret gælder kun selve inderpuden. Varenumre på hygiejnebetræk ender på 010, mens bomuldsbetræk ender på 020.

Se eksempel på bestilling her:

Firkantpude, Lang, HMI-nummer 27876, Varenummer 0305-721-000

Firkantpude, Lang, Hygiejnebetræk, Varenummer 0305-721-010

Firkantpude, Lang, Bomuldsbetræk, Varenummer 0305-721-020

Ring din bestilling ind på **7025 2522** eller send os en mail på **cobi@cobi.dk**.

---