

# LASAL



August 2017

## LIG GODT HOS TANDLÆGEN

# DENTAL



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø

E-mail: [info@lasal.dk](mailto:info@lasal.dk)



+45 8696 6666



[www.lasal.dk](http://www.lasal.dk)

CVR Nr. DK 1437 8677

## GØR DET TIL EN KOMFORTABEL OPLEVELSE AT GÅ TIL TANDLÆGEN



Uanset om der er tale om et helt almindeligt tandlægetjek eller en længerevarende behandling, er det vigtigt at ligge godt og komfortabelt i tandlægestolen. Når vi ligger behageligt, kan vi bedre slappe af både fysisk og psykisk.

Vores patienter kommer med mange behov og udfordringer. Med LASAL Dentalpuder kan vi skabe et komfortabelt leje, der passer til patienten.



Det kan have en afgørende betydning for patienten, at der etableres en komfortabel og støttende liggestilling under opholdet i tandlægestolen.



Eksempel: En spastisk person kan støttes i en stilling, hvor spastisiteten og ufrivillige bevægelser minimeres.

Nogle patienter har brug for ekstra støtte selv til et kortvarigt ophold i tandlægestolen.

LASAL Dentalpuder er udviklet til dette formål. Alle puder er lette at forme og kan nemt tilpasses patient og stol.

I serien findes puder, der støtter hoved, nakke, arme, ryg, lænd og ben. Kombinationsmulighederne er mange og kan tilpasses børn såvel som voksne.

LASAL Dentalpuder er udviklet i samarbejde med Mun-H Center i Odontologi i Göteborg, Sverige, og vores svenske forhandler.

## PUDER TIL STØTTE AF HOVEDET

I serien findes 5 varianter til støtte af enten hovedet, nakken eller begge dele. Der kan være tale om korrigerende støtte eller ekstra fyldning og med det formål at placere hovedet i den mest komfortable stilling i forhold til behandlingen.

### Nakkepuf

En fast pude, der placeres under nakken og giver støtte fra siderne.



### U-formet nakkepude

En formbar pude, der placeres under nakken og giver støtte og omkranser.



### Symmetrisk og asymmetrisk hovedstøttepude

En fyldig pude som fås i 2 versioner.

Symmetrisk pude placeres under hovedet til at løfte og støtte hovedet i en ønsket stilling.

Asymmetrisk pude placeres ligeledes under hovedet, løfter og støtter ift. korrigerende af hovedkontrol



### Halvmåneformet nakkepude

En lille formbar pude, som bruges hvor der kun er brug for minimal støtte eller løft. Kan også kombineres med andre hoved-/nakkepuder.



## PUDER TIL STØTTE AF ARMENE

### Favner til voksen og barn

En formbar pude, der placeres med det smalleste stykke bag nakke/skuldre og pudens "arme" omkranser bruger bag om skuldrene, ned langs armene og lukkes foran.



Puden omkranser overkroppen og giver en tryk fornemmelse. Samtidig sørger favneren for at brugeren kan slappe af i begge arme fra nakke til fingerspidser uden at armene falder ud til siden.



Eksempel: En person, der generelt er utryk ved besøget hos tandlægen, kan have megen gavn af favneren, der trykt og beskyttende omfavner overkroppen.

## PUDER TIL STØTTE AF BENENE

### Benafslapperen - voksen og barn

En formbar pude udformet som et T. Placeres under underben og fødder og T'et placeres mellem knæene. Ved at trække puden længere op mod patienten, minimeres hoft og benvinkel og derved mindskes spændinger og evt. lændesmerter. Ligeså er det muligt ved hjælp af puden at korrigere evt. skævheder af ben og hofteregion.



Benafslapperens aftagelige betræk er forberedt til en montererem, der sikrer at puden ikke glider ned af stolen.

## PUDER TIL STØTTE AF BENENE

### Underbenspude

Anvendes sammen med benafslapper, voksen.

Placeres ovenpå benafslapperen og stabiliserer underben, ankler og fødder og hindrer at disse glider udad.



### Firkantpude

Placeres under knæhaser eller anvendes sammen med benafslapper og underbenspude som ekstra støtte af fødderne. Kan også anvendes til ben kombineret med benafslapperen.



Eksempel: Den ældre dame med lændesmerter kan tilbydes ekstra støtte under benene således lænden får kontakt med underlaget og på den måde får en bedre komfort.

### Sædepude

Giver en stabil positionering af barnet siddende/liggende i tandlægestolen. Hvor tandlægestolen kan føles for stor til det mindre barn, kan puden hjælpe til at stabilisere sæde og ryg og udligne eventuelle skævheder og asymmetrier.



## MATERIALE

Inderbetræk:	PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil.
Montagerem:	100% polyester
Fyld:	Brandhæmmede EPS perler (Ekspanderet Polystyren).
Aftagelige betræk:	<b>Hygiejnebetræk</b> i PU-belagt brandhæmmet polyestertekstil. <b>ØKO-betræk</b> i hudvenlig singlejersey (Lenzing/Tencel) med polyurethan belagt bagside.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

**Selve puden** tåler ikke kemisk rensning og må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler, da visse opløsningsmidler kan opløse polystyrenkuglerne. Maskinvask frarådes, da EPS-perlerne smelter ved temperaturer over 70° C. Puderne aftørres i med vand tilsat alm. rengøringsmidler eller sprittes af.

**Hygiejnebetrækket** kan maskinvaskes ved 95° C og tørres i tørretumbler.

**ØKO-betrækket** kan kan maskinvaskes ved 60° C og tørres i tørretumbler ved svag varme.

Det anbefales at vaske og tørre begge slags betræk med andre ikke belagte tekstiler.

Remmen på Benafslapperen fjernes inden vask.

## VALG AF BETRÆK

**Til arbejdsfeltet omkring hoved og overkrop** kan puderne anvendes uden betræk, men for at forlænge deres levetid anbefaler vi at anvende dem med det aftagelige betræk i PU-belagt polyester. Betrækket er glat og nemt at aftørre. Det tåler desuden vask ved høje varmegrader (se ovenfor).

**Til puderne til sæde, ben og fødder** kan der vælges mellem polyesterbetrækket eller et ØKO-betræk i hudvenlig singlejersey, som er absorberende og ikke så glat. Bruges hvor der ikke er behov for afspritning (vaskes som ovenfor anført).

## BORTSKAFFELSE


Puder og betræk bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.




## VIGTIGT

Undgå skarpe kanter og spidse  
genstande mod puderne.




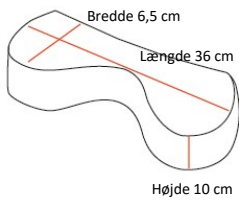


707001 - pude  
707004 - hygiejnebetræk

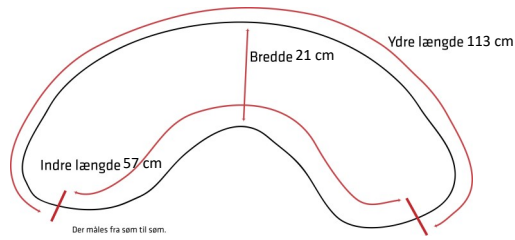


707101 - pude  
707104 - hygiejnebetræk

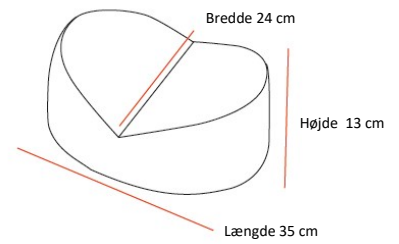


707211 - symmetrisk pude  
707214 - hygiejnebetræk

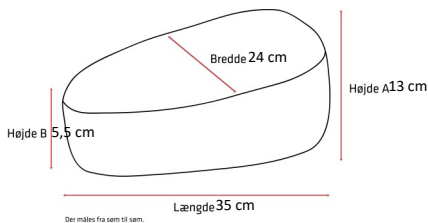


707201 - asymmetrisk pude  
707204 - hygiejnebetræk

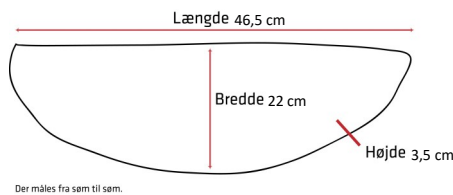


707301 - pude  
707304 - hygiejnebetræk

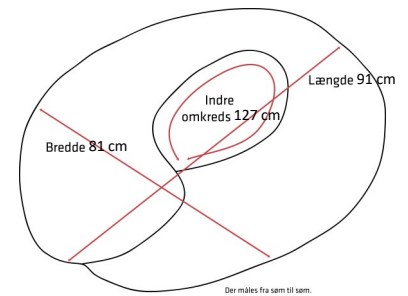


707401 - pude (voksen)  
707404 - hygiejnebetræk

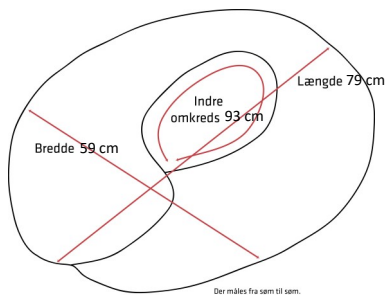


707421 - pude (barn)  
707424 - hygiejnebetræk

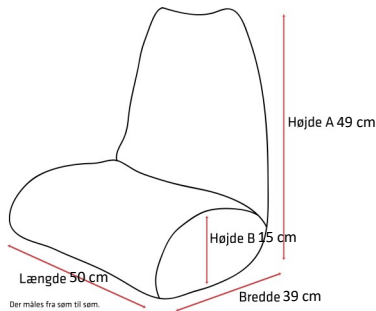


707821-04 - pude med hygiejnebetræk  
707821-09 - pude med singlejerseybetræk  
707824 - hygiejnebetræk  
707829 - singlejerseybetræk

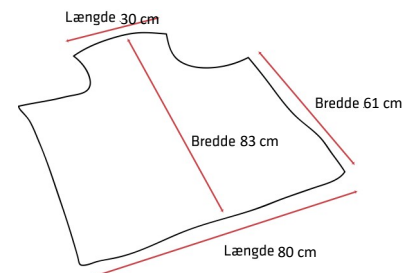


707601-04 - pude med hygiejnebetræk (voksen)  
707601-09 - pude med singlejerseybetræk  
707604 - hygiejnebetræk  
707609 - singlejerseybetræk

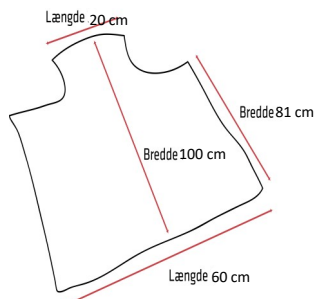

707621-24 - pude med hygiejnebetræk (barn)  
707621-29 - pude med singlejerseybetræk  
707624 - hygiejnebetræk  
707629 - singlejerseybetræk

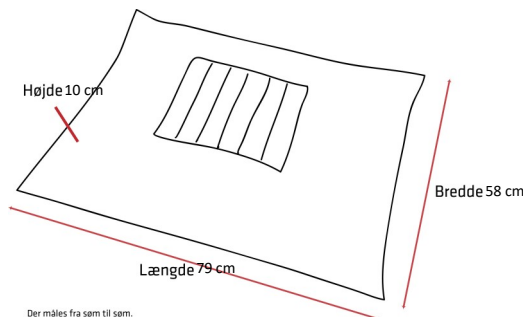

707701-04 - pude med hygiejnebetræk  
707701-09 - pude med singlejerseybetræk  
707704 - hygiejnebetræk  
707709 - singlejerseybetræk

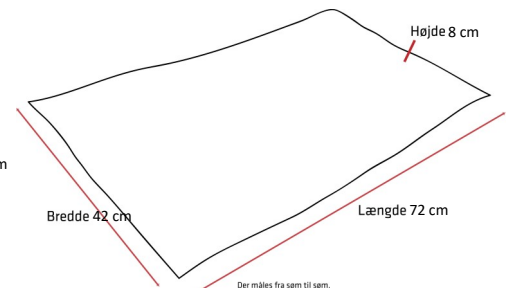

707501-04 - pude med hygiejnebetræk  
707501-09 - pude med singlejerseybetræk  
707504 - hygiejnebetræk  
707509 - singlejerseybetræk