



PRODUKTARK

Lasal dentalpuder

Lig godt hos tandlægen.

Dentalpuder er udviklet til at sikre et komfortabelt leje i tandlægestolen for forskellige typer af patienter med behov for en støttende liggstilling under behandlingen.

Bruges på tandlægeklinikker.



- Nemme at tilpasse patient og stol.
- Vaskbare betræk i forskellige materialer.
- Mange lejringsmuligheder i hver enkel pude.
- Udviklet i samarbejde med Mun-H i Odontologi i Göteborg, Sverige.
- Kan minimere ufrivillige bevægelser og spasticitet hos patienten.
- 12 forskellige puder til både børn og voksne i serien.



Anvendelse

Lasal dentalpuder bruges enkeltvis eller i kombination til at give mest mulig støtte, stabilisering og tryghed i forbindelse med besøg hos tandlæge.

For patienter med fysiske og psykiske udfordringer (fx reumatiske sygdomme, neurologiske eller psykiatriske lidelser), kan det være svært at sidde behageligt og/eller roligt i en tandlægestol. Derfor har Cobi Rehab udviklet dental-serien.

For andre patienter handler det om tryghed og afgrænsning af kroppen for bedre at kunne slappe af og være i behandlingssituationen. Uanset hvad er formålet at undgå en ukomfortable stilling, som kan føre til utryghed og muskelspændinger, hvilket igen kan besværliggøre behandlingsprocessen.

Produktbeskrivelse

Lasal dentalpuder findes i flere faconer og størrelser. Kombinationen af små polystyrenkugler i et fleksibelt betræk og med et yderbetræk i polyester eller singlejersey gør, at puderne former sig individuelt efter brugeren og tandlægestolen.

Lasal dentalpuder er formbare og glider ikke som en almindelig pude kan gøre. I serien findes der fire slags puder, der støtter hovedet, én pude i to størrelser til støtte af armen og fire puder til fx støtte af ben.

Til alle puder fås et aftageligt hygiejnebetræk i polyester. Til enkelte puder fås også et betræk i 100% bio-baseret og hudvenligt singlejersey (Lenzing/Tencil).

Valg af betræk

Til arbejdsfeltet omkring hoved og overkrop anbefaler vi dentalpuder med hygiejnebetræk, der kan vaskes ved meget høj varme.

Puderne, der lægges på stolens sæde og puder til at støtte af ben og fødder kan dækkes af begge slags betræk. Fordelen ved et ØKO-betræk i dette område er, at betrækkets overflade sikrer, at det ikke glider rundt på tandlægestolens overflade.

Rengøring og vedligeholdelse

Tør dentalpuderne af med en ren klud vredet op i vand med et mildt rengøringsmiddel. Dentalpuderne skal være helt tør, før den tages i brug igen eller lægges væk.

Desinfektion og vask

Til overfladedesinfektion af inderpuden bruges engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %) eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).



U-formet nakkepude med hygiejnebetræk.



Favner pude (voksen) med hygiejnebetræk, Benafslapperen (voksen) med hygiejnebetræk, firkantpude med jerseybetræk.




Favner pude (barn) med hygiejnebetræk, Halvmånepude med hygiejnebetræk, Sædepude (barn) med jerseybetræk.

Hygiejnebetrækket vaskes på 95° C og kan tørretumbles. ØKO-betrækket kan vaskes på 60° C og kan tørretumbles på svag varme. Undgå skyllemidler med opløsningsmidler.


Lasal dentalpuder kan ikke vaskes. Maskinvask vil ødelægge fyldet i puden.

Lasal Dentalpuder


Der måles fra søm til søm.

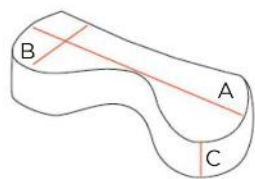


Nakkepuf
A Længde 36 cm
B Bredde 6,5 cm
C Højde 10 cm

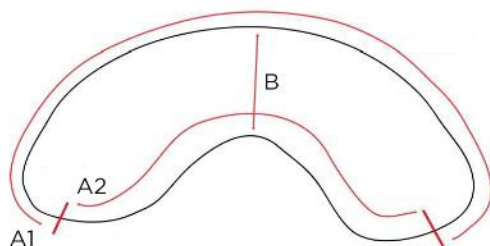


U-formet nakkepude
A1 Ydre længde 113 cm
A2 Indre længde 57 cm
B Bredde 21 cm

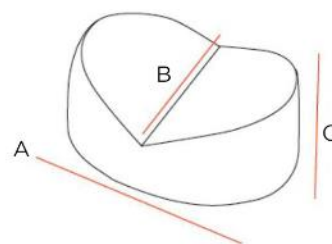


Hovedstøttepude,
symmetrisk
A Længde 35 cm
B Bredde 24 cm
C Højde 13 cm

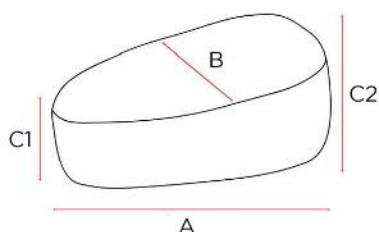


Hovedstøttepude,
asymmetrisk
A Længde 35 cm
B Bredde 24 cm
Højde C1 5,5 cm, C2 13 cm

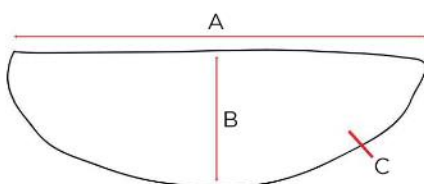


Halvmånepude
A Længde 46,5 cm
B Bredde 22 cm
C Højde 3,5 cm

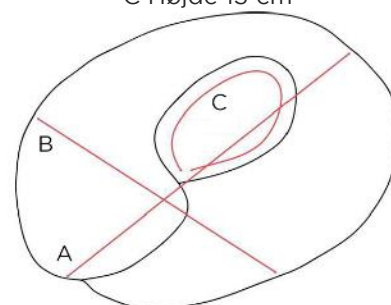


Favn timer (voksen)
A Længde 91 cm
B Bredde 81 cm
C Indre omkreds 127 cm

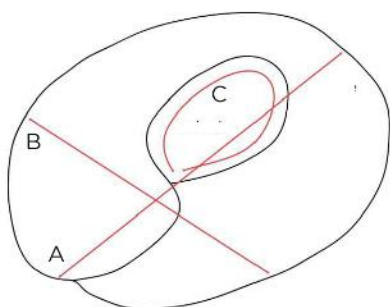


Favn timer (barn)
A Længde 79 cm
B Bredde 59 cm
C Indre omkreds 93 cm

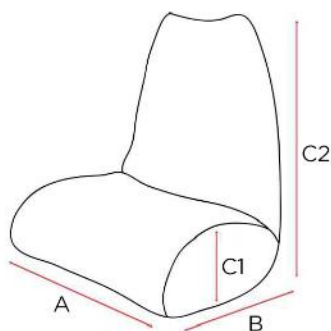


Sædepude
A Længde 50 cm
B Bredde 39 cm
C1 Højde 15 cm, C2 Højde 49 cm

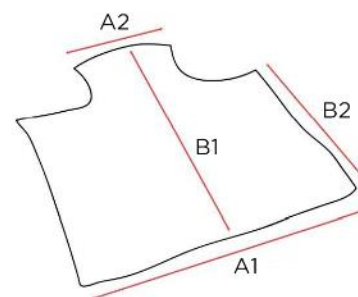


Benafslapperen (voksen)
A1 Længde 80 cm, A2 Længde 30 cm
B1 Bredde 83 cm, B2 Bredde 61 cm

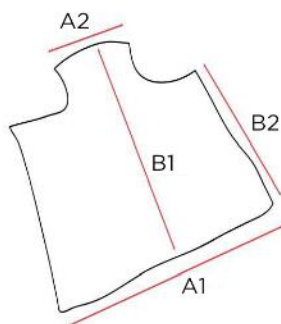

Benafslapperen (barn)
A1 Længde 60 cm, A2 Længde 20 cm
B1 Bredde 100 cm, B2 Bredde 81 cm

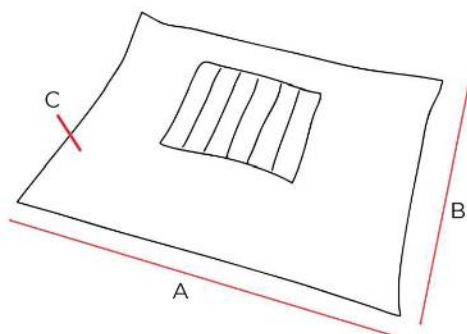

Underbenspude
A Længde 79 cm
B Bredde 58 cm
C Højde 10 cm

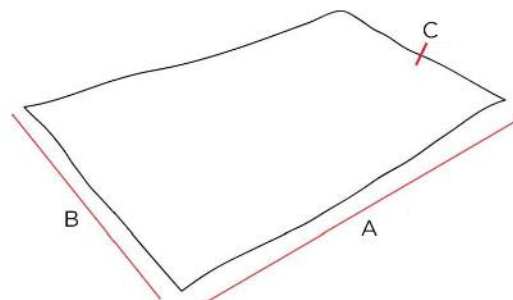

Firkantpude
A Længde 72 cm
B Bredde 42 cm
C Højde 8 cm

Specifikationer

Kuglemateriale	Brandhæmmende EPS-perler (ekspanderet polystyren)
Inderpude	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Hygiejnebetræk	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
ØKO-betræk	Hudvenlig singlejersey (Lenzing/Tencil) med polyurethan belagt inderside.
Rengøring	Puden tåler ikke maskinvask. Rengøres med et mildt rengøringsmiddel eller desinficeres.
Vaskbare betræk	Ja.
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
ISO-klassifikation	09 07 06 - 02
Forventet levetid	3 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100014N5

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på **cobi@cobi.dk** eller **7025 2522**.

Bestilling

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Farve	Varenummer
Nakkepuf	36	6,5	10		0319-7001-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7001-010
U-formet nakkepude	57/113	21			0319-7101-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7101-010
Hovedstøttepude, asymmetrisk	35	24	5,5/13		0319-7201-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7201-010
Hovedstøttepude, symmetrisk	35	24	13		0319-7211-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7211-010
Halvmånepude	46,5	22	3,5		0319-7301-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7301-010
Favner, voksen	91	81	127 (indre omkreds)		0319-7401-010
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7401-010
Favner, barn	79	59	93 (indre omkreds)		0319-7421-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7421-010
Firkantpude	72	42	8		0319-7501-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7501-010
Singlejerseybetræk				Grå	0319-7501-015
Benafslapperen, voksen	30/80	61/83			0319-7601-015
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7601-010
Singlejerseybetræk				Grå	0319-7601-015
Benafslapperen, barn	20/60	81/100			0319-7621-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7621-010
Singlejerseybetræk				Grå	0319-7612-015
Montagerem til benafslapper					0319-7606-000
Underbenspude, voksen	79	58	10		0319-7701-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7701-010
Singlejerseybetræk				Grå	0319-7701-015
Sædepude, barn	50	39	15/49		0319-7821-000
Hygiejnebetræk				Grå	0319-7821-010
Singlejerseybetræk				Grå	0319-7821-015



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522

cobirehab.com