



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Cobi Sky positioneringsmadras

- til de svære positioneringer

Cobi Sky positioneringsmadras er udviklet til at sikre stor trykfordeling, stabilitet, komfort og fuld understøttelse.

Cobi Sky positioneringsmadras bruges på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen til svækkede brugere med neurologiske symptomer, stærke smerter eller ustabile frakturer med brug for dyb og trykaflastende lejring.

Brugervægt fra 30-110 kg.



- Modellerbar madras til mikropositionering.
- Let at installere, ingen pumpe.
- Tryksårsforebyggende og -aflastende.
- Skumramme, der sikrer stabilitet.
- Strækbart og åndbart inkontinensbetræk.
- Perforeret midterlag, der sikrer optimal ventilation.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Cobi Sky positioneringsmadras

Konstruktion - madras

Cobi Sky er en helmadras med flere lag. Det øverste lag (under de to betræk) består af et betræk bestående af små Krøyer-kugler. Betrækket er syet i kanaler, hvilket gør, at indholdet i hver enkel kanal kan skubbes rundt. Det betyder, at madrassen kan formes præcist til den lejring som bruger har behov for.

Bruger synker med andre ord ned i madrassen, hvilket sikrer optimal støtte og trykaflastning, samtidig med at det mindsker risikoen for tryksår.


Under laget med kanaler og Krøyer-kugler er der et fjedrende midterlag med perforeringer, der sørger for optimal ventilation af madrassen.

Anvendelse

Skub fyldet rundt

Cobi Sky imødekommer tryksårsudfordringer uden at gå på kompromis med stabiliteten.


Det skyldes blandt andet madrassens opbygning med kanaler, der kan skubbes rundt. På den måde kan madrassen formes præcist til de behov som bruger har.

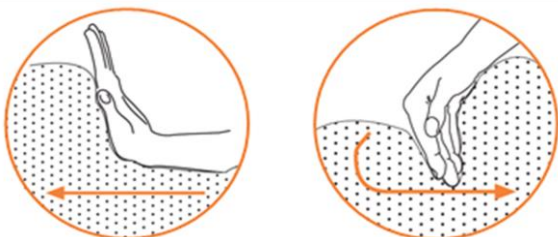

Positionering med fordybning

I tilfælde af allerede eksisterende liggesår kan der etableres en fordybning ved at skubbe rundt på kuglefyldningen. Lav en hul med hånden under det punkt, hvor trykket skal aflastes.

Hullet kan efterfølgende glattes ud igen, når der ikke længere er behov for aflastning af fx hæl.

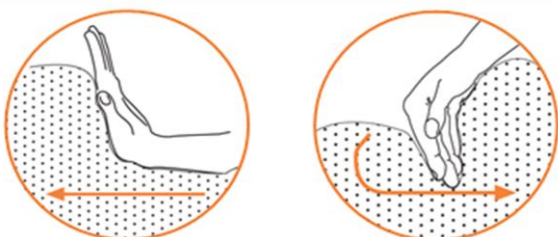

En skumramme rundt om og under de to lag sikrer stabilitet, når brugeren sidder på kanten af sengen.

Betræk

Det grå yderbetræk til skummadrassen er et inkontinensbetræk, som er strækbart, åndbart og vaskbart. Det grå betræk dækker hele madrassen og lynes med lynlås.

Yderbetrækket sidder løst, hvilket tillader plejepersonale at skubbe og forme fyldet i madrassen uden at betrækkets stramhed ophæver fyldets placering og funktion.

Det hvide inderbetræk er et ultratyndt, fleksibelt og strækbart lycrabetræk.

Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring af den heldækkende yderbetræk kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring. Yderbetrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Det grå yderbetræk kan vaskes med i vaskemaskine ved 60° og tørres i tørretumbler ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke stryges.

Det hvide inderbetræk har en levetid på 8 vaske. Inderbetrækket vaskes i en vaskepose i vaskemaskine på 60° C. Inderbetrækket må ikke tørres i tørretumbler, men skal hænges op.

Transport

Cobi Sky er udstyret med fire bærehåndtag. To på hver side. Hold i bærehåndtagene ved flytning eller transport. Cobi Sky må ligge rullet sammen i kortere perioder. Sammenrulningsrem medfølger.

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller 7025 2522, hvis du ønsker mere information, undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.

Specifikationer	
Brugervægt	30-110 kg
Længde	2000 mm
Bredde	850 mm
Højde	150 mm
Madrassens vægt	13 kg
Anvendelig direkte på (indstillelig) sengebund	Ja
Brandhæmmende madras	Ja
Inkontinensbetræk	Ja
Allervernligt vask- og desinficerbart betræk	Ja
Brandhæmmende yderbetræk	Ja
Beregnet til sårkategori	1-4
Yderbetræk gråt	44% polyamid, 56% polyuretan
Madras	Polyamid stof, ekspanderet polystyren kugler og polyester fibre
Skummadras ramme	Polyuretanskum, polyesterfibre
ISO-klassifikation	04 33 06-05
Forventet levetid	5 år
Produktark findes på website, hvor det kan skaleres op til stor størrelse ved synshandicap	
Generelle krav og prøvningsmetoder i henhold til	DS/EN12182:2012
Grundlæggende UDI -DI	5740000108669
Risikoklasse	I

Model	Længde	Bredde	Højde	Varenummer	HMI-nummer
Cobi Sky madras inkl. gråt yderbetræk	2000 mm	850	150	2100-085-200	125288
Reservedele					
Gråt top- og bundbetræk (lynet sammen)				2100-999-010	
Skummadras med fiberlag				Kontakt	
Krøyer-kugle madrasedel				Cobi Rehab	
Hvidt inderbetræk				på telefon	
Aftageligt han-del spænde				7025 2522	



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com