



BROSCHYR

Cobi positioneringskuddar

Positioneringskuddar som kan öka livskvaliteten hos personer med minskad rörlighet.

Cobi positioneringskuddar är utvecklade för att användas till personer inom följande kategorier: bariatri, demens, geriatri, neurologi, smärta och palliativ vård.

Används till exempel på omsorgsboenden, sjukhusvård, hospice och i privata hem.



- Tryckfördelande effekt.
- Anti-bakteriellt förseglad yta på kudden.
- Många positioneringsmöjligheter i varje kudde.
- Tvättbara överdrag.
- Ger taktil och proprioceptiv stimuli.
- Utvecklade av Cobi Rehab i samarbete med specialister inom demens och neurologi.



Användning

Cobi positioneringskuddar används för att lösa olika positioneringsproblem beroende på användarens specifika behov. Cobi positioneringskuddar är designade i samarbete med specialister inom demens och neurologi.

Cobi positioneringskuddar kan användas där det finns behov för en tryckfördelning och stabil positionering av personer med minskad rörlighet. Det kan vara på omsorgsboenden, sjukhus, hospice och i privata hem. Kuddarna är avsedda att användas av utbildad omvårdspersonal.

Kuddarna är lämpliga att använda för positionering av personer inom områden som bariatri, demens, geriatri, neurologi, smärta och palliativ vård. Gemensamt för dessa personer är att många är i riskzonen för att utveckla vävskada och trycksår.

Konstruktion

Vid utformningen av Cobi positioneringskuddar har, bland annat, stor vikt lagts vid att kuddarnas utformning tillåter en kroppsnära placering vid användaren.

Kuddarnas tyngd är delaktig i att säkra en kroppsnära placering. Kuddarnas stabilitet gör att de stannar kvar där de placeras så att positioneringen av personen förblir stabil.

Kuddarna är fyllda med små Krøyer-kulor, PU-skum, komfort skum och gummigranulat. Det finns två överdrag, hygienöverdrag och jerseyöverdrag.

Båda överdragen ångandas, är tvättbara, antibakteriellt behandlade och elastiska.

Lugnande effekt

Utöver att öka tryckfördelningen kan kuddarna också användas för att minska spasticitet och ge taktill stimulering.

Taktill stimulering hjälper till exempel dementa i och med att det hjälper att avgränsa kroppen och har en lugnande effekt.

Rengöring och underhåll

Daglig rengöring av kuddar

Torka av kuddarna med en ren och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Kudden ska vara helt torr innan den används igen eller lagras.

Desinfektion och tvätt

För att desinficera ytan på kudden använd en engångstrasa med etanol (t.ex. Wet Wipe 70 %) eller en klorprodukt 1000-1200 ppm (t.ex. Wet Wipe Chlorine Disinfection).



Cobi U-kudde följer överkroppen. Cobi Cylinderkudde under knäna. Cobi Fenkudde under underbenen.



Stor Cobi huvudkudde under underbenen och hälar.




Cobi Flexikudde längs framsidan av kroppen.

Tillbehör som hygienöverdrag och jerseyöverdrag kan tvättas i 60° C och torktumlas.

Cobi positioneringskuddar kan inte maskintvättas. Maskintvätt förstör fyllningen. När överdragen tvättas ska blixtlåsen stängas för att förhindra att blixtlåset skadas.

Cobi positioneringskuddar

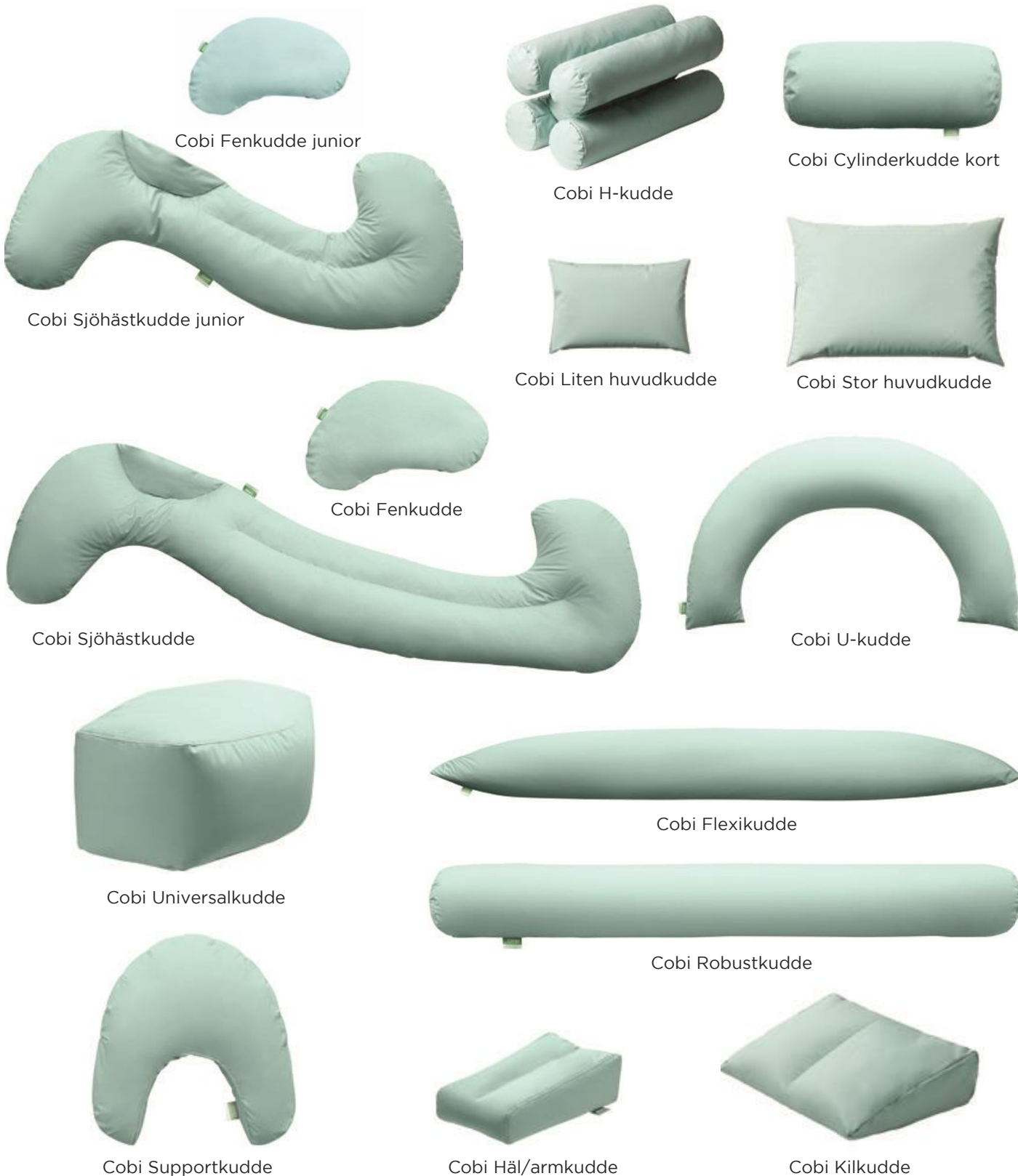

Cobi Rehab hjälper gärna till med utprovningar.
Kontakta oss på info@cobirehab.se eller 08-702 97 74.

Specifikationer

Fyllning	3mm Krøyer-kulor av expanderat polystyren, 5 mm kulor av expanderat polypropylene, granulat, skummaterial (PU-skum och comfort skum). Fördelning och innehåll är anpassat för varje kudde typ.
Tyg innerkudde	Vätsketät och andningsbart. Polyamid impregnerat med PU och anti-bakteriellt behandlat.
Hygienöverdrag	Vätsketät och andningsbart. Polyamid impregnerat med PU och anti-bakteriellt behandlat. Brandhämmande.
Jerseyöverdrag	Bomull (ØKO-TEX® Standard 100) och modakryl.
Rengöring	Båda överdrag är tvättbara och tål torktumling. Cobi positioneringskuddar klarar ej maskintvätt, men kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel eller desinficeras.
Lagring	Utsätt inte kudden för hög värme, långvarig och intensivt solljus eller annan strålning.
ISO-klassificering	ISO 09 07 06 - 02
Förväntad livslängd	2 år
Grundläggande UDI-DI	5740000100014N5

Specifikation

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Artikelnummer
Cobi positioneringskuddar komplett med väska					0400-000-000
Cobi Cylinderkudde kort	75 mm	25 mm	25 mm	1,7 kg	0400-064-000
Cobi Flexikudde	194 mm	27 mm	15 mm	3,7 kg	0400-068-000
Cobi Robustkudde	200 mm	28 mm	28 mm	6 kg	0400-070-000
Cobi Häl/armkudde	40 mm	28 mm	11 mm	0,5 kg	0400-060-000
Cobi Universalkudde	58 mm	39 mm	22 mm	1,7 kg	0400-054-000
Cobi Sjöhästkudde	186 mm	51 mm	12 mm	5 kg	0400-056-000
Cobi Sjöhästkudde junior	127 mm	27 mm	12 mm	2,5 kg	0400-057-000
Cobi Fenkudde	64 mm	34 mm	8 mm	0,6 kg	0400-058-000
Cobi Femkudde junior	60 mm	30 mm	8 mm	0,5 kg	0400-059-000
Cobi U-kudde	88 mm	94 mm	17 mm	2,7 kg	0400-072-000
Cobi Supportkudde	55 mm	54 mm	12 mm	1,2 kg	0400-050-000
Cobi Huvudkudde liten	39 mm	25 mm	8 mm	0,3 kg	0400-048-000
Cobi Huvudkudde stor	58 mm	40 mm	13 mm	0,9 kg	0400-049-000
Cobi H-kudde	51 mm	30 mm	30 mm	1,8 kg	0400-074-000
Cobi Kilkudde	40 mm	50 mm	14 mm	1,1 kg	0400-066-000
Cobi Armkudde vänster	20 mm	7 mm	60 mm	0,9 kg	0400-052-000V
Cobi Armkudde höger	20 mm	7 mm	60 mm	0,9 kg	0400-052-000H