



COBI REHAB®
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

Cobi Cura X10 vekseltrykmadras

Cobi Cura X10 vekseltrykmadras med Auto X10 pumpe til forebyggelse og behandling af tryksår.

Anvendes til brugere, der er alment svækkede eller tryksårstruede.

Kombinationsmadrassen bruges på plejecentre, sygehuse og i
hjemmeplejen.

Fra 20 til 200 kg.



Scan eller klik på koden og find
produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner
om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indhold

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaringer	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	6
5. Pumpens funktioner	7
6. Før madrassen tages i brug	8
7. Ibrugtagning	9
8. Vedligeholdelse	10
9. Bortskaffelse	11
10. Garanti	11
11. Specifikationer.....	12
12. Tjekliste for problemløsning	14
13. Warning code reference	15
14. Tilbehørstabel.....	16

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Cobi Cura X10 må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af madrassen. Ved forkert betjening kan brugeren komme til skade.

Bruges Cobi Cura X10 til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, øger det risikoen for at beskadige produktet.

Brugsanvisningen skal læses grundigt, før Cobi Cura X10 tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af Cobi Cura X10.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Sæt eller læg ikke noget oven på pumpen. Sørg for, at ledningen er under sengerammen, og at den ikke ligger i vejen for hjulene eller andet, der kan skade ledningen.

Dæk kun madrassen med ét lag. Det tillader vanddamp at trænge igennem betrækket. Brug kun åndbart inkontinensbetræk på madrassen.

Undgå at benytte pumpen nær flammer, lightere eller cigaretter på grund af risikoen for antændelse. Pumpen suger luft fra omgivelserne. Derfor kan cigaretrøg eller lignende skade delene i pumpen.

Madras og Pumpe bør desinficeres grundigt, hvis delene skal bruges af en anden bruger. Det sker for at undgå krydskontamination. Se afsnittet om rengøring.

Læg ikke tunge genstande eller andre typer madrasser oven på madrassen.

Skil ikke pumpen ad, hvis den går i stykker. Kontakt i stedet Cobi Rehab.

Belast ikke madrassen med unødigt vægt på et lille område.

Lad ikke dyr og børn lege/hoppe på madrassen.

Madrassen skal matche den korrekte højde på sengehesten. Sengehesten skal være højere end madrassen, ellers kan brugeren falde ned fra sengen.

Kontakt Cobi Rehab ved alle former for service og reparation.

2. Symbolforklaringer

Følgende symboler findes i brugervejledningen og/eller på produktets label.	
	Vær opmærksom!
	Dobbeltisoleret (klasse II).
	Overensstemmelseserklæring ifølge forordning for medicinsk udstyr, EU 2017/745
IPXX	Ingrees Protection Ratings Guide.
	Type BF udstyr.
	Skal bortskaffes ved korrekt affaldshåndtering.
	Serienummer
	Europæisk repræsentant
	Producent
	Medicinsk udstyr
Madraslabe er placeret i venstre fodende. Pumpelabe er placeret bagpå pumpen. Se eksempler på vaskelabe, madrassprint og pumpelabe herunder.	

Denne labe er placeret i venstre fodende

COBI CURA X10
83 x 200 x 19 cm

Varenummer:
2700-083-200

HMI nummer:
114858

Brugervægt:
20-200 kg

Vaskeanvisning:

Produktionsdato:
Oktober 2019

Medical Device

COBI REHAB
The Positioning Company
+ 45 70 25 25 22

COBI REHAB
The Positioning Company

Cobi Cura X10
Brugervægt 20-200 kg

☒ 83 x 200 x 19 cm Varenr. 2700-083-200 HMI nr. 114 858	☐ 85 x 200 x 19 cm Varenr. 2700-085-200 HMI nr. 112 300
☐ 88 x 200 x 19 cm Varenr. 2700-088-200 HMI nr. 114 863	☐ 90 x 200 x 19 cm Varenr. 2700-090-200 HMI nr. 112 424

Vaskeanvisning:

Cobi Rehab
Tlf. 70 25 25 22

DENNE SIDE OP

Produktionsår 2019

(01) 0 0851675 00715 9 (11) 200518 (21) 7809457314

UD211-213 (Cobi Auto X10)

Input Rating: AC 230V/50Hz, 0.12A

Fuse Rating: T1AL 250V

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Langenhagen

Cobi Rehab
Fuglebakvej
1D DK-2770 Kastrup
Denmark

Air Kinetic Technologies Corp.
No.3, Gongye 5th Rd., Pingzhen Dist.,
Taoyuan City 324,Taiwan
2020-5-18

3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Cobi Cura X10. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Cobi Cura X10.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Cobi Cura X10's UDI-nummer fremgår af labelen på pumpen.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

3.1 Indikationer

Cobi Cura X10 vekseltrykmadras er udviklet til forebyggelse og behandling af tryksår stadie 1-4.

Madrassen kan bidrage til forbedring af blodcirkulationen og til at nedsætte trykket i kontaktområdet.

Kontraindikationer

Brugere med ustabile frakturer må ikke ligge på en Cobi Cura X10 vekseltrykmadras.

Konsultér altid en læge eller terapeut, før en bruger tildes en Cobi Cura X10.

4. Anvendelse

Cobi Cura X10 bruges blandt andet på sygehuse, plejecentre og i hjemmeplejen.

Her bruges madrassen til brugere, som er alment eller midlertidigt svækket af sygdom/operation og derfor mere sengeliggende end normalt.

Cobi Cura X10 er specialudviklet til forebyggelse af tryksår og til behandling af tryksår stadie 1-4. Madrassen er beregnet til brugere, der vejer mellem 20-200 kg.

Cobi Cura X10 kan genbruges og er nem at rengøre.

Husk grundig desinficering ved overgangen til ny bruger for at undgå krydskontamination.

4.1 Cobi Cura X10 - madrassen

Madrassen består af 20 luftceller lavet i et forstærket plastmateriale. Cellerne er 13 cm høje. Under cellerne er der en 6 cm tyk, luftfyldt undermadrass. Undermadrassen sikrer, at brugeren ikke ligger direkte på sengebunden i tilfælde af strømsvigt. Samlet højde er 19 cm.

Den elektroniske vekseltrykspumpe sørger for, at luften skiftevis pumpes ind eller tømmes ud af de 20 celler. Det vil sige, når celle 1, 3, 5 osv. fyldes med luft, tømmes celle 2, 4, 6 osv. langsomt, hvorefter cyklussen vender. Tidscyklussen kan indstilles manuelt, hvis der ønskes andet end 10 minutters interval.

Vekseltrykket flytter presset på brugerens væv. Det bidrager til forbedring af blodcirkulationen og til forebyggelse af tryksår.

Ved strømsvigt holder madrassen luften i 24 timer. Brugeren kommer ikke i forbindelse med sengebunden i løbet af de 24 timer.

Madrassens luftceller kan udskiftes enkeltvis. Cellerne holdes på plads ved hjælp af trykknapper. De midterste celler er perforerede. Det sikrer luftgennemtrængningen og mindsker varmeophobning.

Madrassens bund er slidstærk og fastgøres til sengerammen med kraftige stropper.

Alle madrassens dele kan udskiftes ved behov.

Madrassen er kompatibel med de fleste sengerammer på hospitaler, institutioner, plejecentre med mere.

4.2 Cobi Cura X10 - betrækket

Betrækket er aftageligt, åndbart, strækbart i fire retninger og anti-bakterielt behandlet på overfladen.

Betrækket er beskyttet mod væskeindtrængning og er flammehæmmende. Betrækket kan vaskes, tørretumbles og desinficeres.

Betrækket er forsynet med lynlås på fire sider. Lynlåsen er dækket af et overlap af betrækket.

5. Pumpens funktioner

5.1 Indstillinger

Automatisk indstilling af vægt - figur 1 + 2

Når brugeren ligger på madrassen, beregner pumpen automatisk brugerens vægt. Når beregningen er klar, lyser det rigtige kilointerval op. Tryk på Soft-knappen, hvis der er brug for en blødere madras. Tryk på Firm-knappen, hvis der ønskes en hårdere madras.

Lås betjening - figur 3

Frontpanelet låses efter 30 sekunder uden brug. Tryk 2 sekunder på Lås betjening for at aktivere frontpanelet igen.

Skift - figur 4

Tryk på Skift for at skifte mellem indstillingerne Vekslende, Statisk og Siddende.

Aktivering af Vekslende starter madrassens vekseltrykfunktion.

Aktivering af Statisk frakobler vekseltrykfunktionen.

Funktionen Siddende er beregnet til brugere, som sidder op det meste af tiden, fx lunge- og hjertesygde brugere.

*Værd at vide om funktionen Siddende:
Funktionen betyder, at pumpen øger trykket i madrassen under brugerens bagdel, men fortsætter med at veksle.*

Hvis brugeren lægges ned, uden at funktionen slås fra, vil der stadig være vekseltryk under brugeren til at aflaste og forebygge tryksår.

Autofirm - figur 5

Autofirm-funktionen bruges til pleje i sengen. Funktionen fylder madrassen med den maksimale mængde luft, hvilket letter pleje og forflytning. Trykket holder i 20 minutter.

Bagefter vender pumpen automatisk tilbage til vekseltryk. Tryk på Autofirm-knappen for at afbryde funktionen.

ON/OFF - figur 6

Tænd på ON/OFF-knappen, når pumpen er tilsluttet strømforsyningen, og vippekontakten, på pumpens højre side, er slået over på 1.

Audiovisuel alarm - figur 7


Hvis madrassen mangler strøm eller trykket er for lavt, vil alarmknappen bippe og lyse op. Tjek, at slangerne sidder korrekt i pumpen, og at CPR-ventilen er lukket. Alarmen stopper først med at bippe, når strømstikket sidder i kontakten.

Alarmen kan slås manuelt fra ved at trykke på .

Skal madrassen frakobles strømmen, fordi hele sengen skal flyttes, skal vippekontakten på siden trykkes ned for at undgå aktivering af alarmen.

Cyklus tid - figur 8

Pumpen er automatisk sat til at veksle trykket i de 20 celler hvert 10. minut. Tidsintervallet kan ændres ved tryk på timeglasset (Cyklustid).

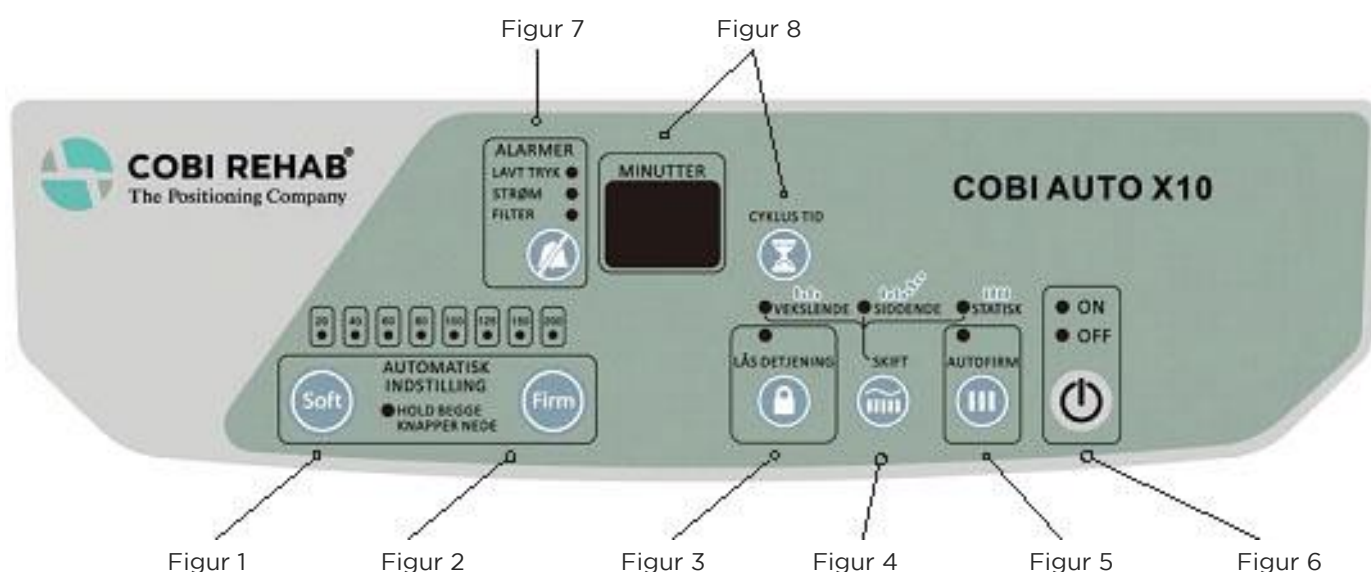

5.2 Funktioner på pumpen

Sikring

Sikringsholderen kan åbnes, hvis der skal laves vedligeholdelse eller service.

Monteringskroge

Pumpen kan ved hjælp af krogene hænge på næsten alle slags sengegavle.


Luftfilter

Cobi Rehab anbefaler, at filteret udskiftes minimum én gang om året for at sikre, at pumpen arbejder optimalt.

6. Før madrassen tages i brug

6.1 Klargøring af madras og pumpe

1. Læg madrassen direkte på sengebunden, så cellerne vender opad, og fodsymbolet på betrækket er placeret i fodenden.
2. Fastgør madrassen til sengebundens hjørner ved hjælp af stropperne.
3. Tjek, at sengens elevationsfunktion virker, efter madrassen er blevet spændt fast til sengebunden.
4. Hæng pumpen på sengegavlen ved hjælp af krogene.
5. Tjek, at madrassens CPR-ventil i venstre side af hovedenden er lukket.
6. Tilslut madrassens luftslanger til koblingerne på pumpens udtag og sæt strømstikket i stikkontakten.
7. Tænd pumpen på vippekontakten (Power ON/OFF) på pumpens højre side og tryk på ON/OFF-knappen på frontpanelet.
8. Tjek, at Autofirm knappen blinker (figur 5). Autofirm knappen stopper med at blinke, når det maksimale lufttryk er fundet.
9. Vent 20 minutter og læg så brugeren på madrassen. Husk kun løstsiddende faconlagner på madrassen.
10. Når brugeren ligger på madrassen, indstiller pumpen sig automatisk til vekselryk (Vekslende) og til brugerens vægt.

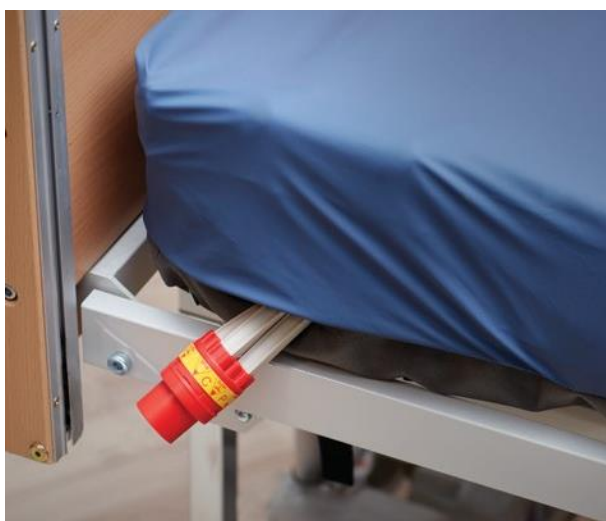

7. Ibrugtagning

7.1 Tilpasning til bruger

Pumpen indstiller sig automatisk til brugerens vægt, men tryk på Soft-knappen, hvis der er brug for en blødere madras. Tryk på Firm-knappen, hvis der ønskes en hårdere madras.

Tallet, der fremgår af feltet Minutter på frontpanelet, angiver vekseltryksintervallet. Den anbefalede vekseltryksinterval (også kaldet cyklustid) er 10 minutter.

7.2 Håndprøven

Plejepersonale/terapeuter bør altid kontrollere luften under brugeren. Før hånden ind i madrassen oven på cellerne under brugerens

tungeste del (fx bækkenet). Kontrollér, at brugeren ikke rører undermadrassen. Brugeren skal være sunket halvvejs ned i madrassen.

7.3 I tilfælde af hjertestop

Madrassen skal være flad, hvis der skal gives hjertemassage. Hurtig tømning af madrassen sker ved at dreje på CPR-ventilen i hovedenden, så

ventilen står på OPEN. Bagefter trækkes luftslangerne ud af pumpen. Start hjertemassagen, mens madrassen tømmes!

7.4 Transport

Hvis madrassen og/eller sengen skal flyttes, slukkes der på vippekontakten, før strømskiftet hives ud af stikkontakten. Derefter trækkes luftslangerne ud af pumpen. Madrassen holder nu på luften i ca. 24 timer.

Når pumpen igen tilsluttes strømforsyningen, skal den individuelle tilpasning til brugeren gentages.

Madrassen er udstyret med fire håndtag. To på hver side. Hold i håndtagene, når madrassen skal flyttes.

7.5 Opbevaring (inkl. langtidsopbevaring)

Madrassen leveres med en bæretaske, som kan anvendes ved transport og opbevaring på depot, når madrassen ikke er i brug.

Bæretasken kan vaskes i maskine ved 60° C og tørretumbles.

 Ved langtidsopbevaring skal Cobi Cura X10 være udrullet og opbevaret mørkt i temperaturer fra 5° - 25° C.

 Tjek jævnligt, at madrassen ikke er våd eller defekt.

8. Vedligeholdelse

8.1 Rengøring af betræk og madras

 Madrassen kan rengøres med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring.

Madrassen kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Betrækket og madrasbunden kan maskinvaskes ved 95° C.

Betrækket kan tørretumbles ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke stryges.

Betræk og madras skal være helt tørre, før de kan tages i brug igen.

8.2 Rengøring af strømforsyning, strømkabel og slanger

 ADVARSEL

Sluk altid for strømforsyningen inden rengøring.

 Tør de udvendige overflader på strømforsyningen, strømkablet og slanger af med en fugtig klud med vand og et rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

De forskellige dele kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Sprøjt ikke væske direkte på selve pumpen.

Brug ikke basiske og ætsende midler eller midler indeholdende ammoniak, fenoler eller acetone.

Alle dele i Cobi Cura X10 skal desinficeres grundigt, når madras og pumpe overgår til en ny bruger. Det sker for at undgå krydskontaminering og infektioner.

Lokale rengørings- og desinfektionsprocedurer skal overholdes.

Kontakt Cobi Rehab i tilfælde af kontamination med fx blod eller kropsvæsker i luftcellerne.

8.3 Vedligeholdelse af luftfilter

Fjern det lille luftfilter på bagsiden af pumpen ved at åbne filterlågen.

Filteret kan renses med mild sæbe og vand. Filteret sættes på plads, når det er helt tørt.

Filteret i pumpen bør udskiftes én gang om året, og hvert andet år i kompressoren. Det forlænger pumpens levetid.

8.4 Returnering af madras til service

Madrassen er ikke servicefri. Service og reparationer skal udføres af en autoriseret tekniker. Alle dele skal være rengjorte og

desinficerede, før de sendes afsted til service hos Cobi Rehab. Ikke rengjorte madrasser returneres uden service.

9. Bortskaffelse

Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på miljøforsvarlig vis. Kontakt

kommunen for vejledning om korrekt bortskaffelse.

10. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at produktet er fejlfrit, når det leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Cobi Cura X10 og Auto X10 pumpen ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Cobi Cura X10 er et år fra købsdato og dækker både madras og pumpe. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at madras og pumpe er blevet håndteret på en ureglementeret måde.

Ved skade på grund af uhensigtsmæssig brug, faktureres der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags ved brug af Cobi Cura X10.

 Mangel på vedligeholdelse kan skade produktet, forkorte levetiden eller påvirke ydeevnen af madras og/eller pumpe.

10.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras, skal indberettes til Cobi Rehab.

10.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

11. Specifikationer

Generelt	
Brugervægt	20-200 kg
Beregnet til sårkategori	1-4
ISO-klassifikation	04 33 06-05
Generelle krav og prøvningsmetoder i henhold til	DS/EN12182:2012
Estimeret holdbarhed	7 år
Miljøforsvarlig bortskaffelse	Aflever madrassen og pumpen til genanvendelse, da størstedelen af Cobi Cura X10 kan genbruges.
Grundlæggende UDI	471987314APAMJB
Risikoklasse	I
Manualen findes på website, hvor den kan skaleres op	Ja
Madrassens serienummer er påsyet madraslablen	Ja
Pumpens serienummer findes på bagsiden af pumpen	Ja
Eksterne kilder til varme og kulde (fx sollys eller andre miljøfaktorer) kan have indvirken på madrassens/pumpens overflade temperaturer.	Ja

Madras	
Længde	200 cm
Bredde	83/85/88/90 cm
Højde	19 cm
Vægt	8/9 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Lyntømningsfunktion	Ja (CPR-ventil)
Autofirm funktion	Ja
Cellemateriale	100% TPU
Madrasbase materiale	Polyester-PU
Brandhæmmende madras	Ja. Overholder BS 7175:1989 Crib 5

Betræk	
Aftageligt, allergivenligt, vask- og desinficerbart inkontinensbetræk	Ja
Madrasbetræk	PU-coated Polyester
Brandhæmmende betræk	Ja. Overholder DS/EN ISO 12952-1 og 2:2010 og BS 7175:1989 Crib 5

Pumpe	
Pumpens mål	32 x 24 x 13 cm
Pumpens vægt	2,8 kg
Lydsvag	Ja
Lydniveau	22 dB ved måling
Pumpe	ABS Flammeresistent, UL94
Audiovisuel alarm ved lufttab	Ja
Audiovisuel alarm ved strømtab	Ja
Strømkabel	5 m
Sikring	Ja. T1A/250V
Strøminput	AC220-240V/50 Hz
Strømforbrug	Normal brug: 15W
Temperaturkrav til pumpe i brug	5 - 45° C
Temperaturkrav til opbevaring	-25° - 70° C
Klassifikation pumpe	Elektrisk beskyttelse Klasse II, Type BF dobbelt isoleret med/uden funktionel jording
Apparatbeskyttelse	IP21
Elektromedicinsk udstyr	Overholder DS/EN 60601-1:2006, samt Amendment 1 og 12
Beskyttelse for elektromedicinsk udstyr til anvendelse i hjemmet	IEC 60601-1-11
Produceret under kvalitetskontrol	ISO13485

12. Tjekliste for problemløsning

Problem	Inspektionsprocedure	Mulige løsninger
Pumpen virker ikke.	Tjek, at strømstikket sidder korrekt i stikkontakten.	Sæt strømstikket korrekt i stikkontakten.
	Tjek, at vippekontakten er på ON position.	Sæt vippekontakten på ON position.
	Tjek, om HFI-relæet er slået fra.	Sluk for pumpen. Tjek den relevante sikring og skift om nødvendigt. Tjek pumpens sikring. Start pumpen op igen.
	Pumpen reagerer ikke på mulige løsninger.	Kontakt Cobi Rehab.
Pumpen kører, men madrassen bliver ikke pustet op eller/og Brugeren går igennem madrassen eller/og Madrassen vender ikke tilbage til naturlig form, når brugeren er flyttet.	Tjek, at CPR-ventilen er korrekt lukket.	Luk CPR-ventilen.
	Tjek, at luftslangerne er korrekt sat sammen med pumpens koblinger.	Når luftslangerne tilsluttes korrekt til koblingen, lyder der et klik.
	Tjek, at brugerens vægt er korrekt angivet.	Justér brugerens vægt op eller ned på frontpanelet, til det korrekte tryk er nået.
	Tjek luftfilteret for støv.	Rens eller udskift filteret.
	Løft madrassens betræk op, og tjek, at alle luftceller er korrekt tilsluttede.	Sørg for, at alle luftceller er korrekt sluttet til luftslangerne.
	Løft madrassens betræk op og tjek, at luftslangerne ikke er vredet eller knækkede, eller at luftstrømmen i slangen på anden måde er hindret.	Tjek og justér luftslangernes stilling.
	Tjek, at luftcellerne ikke er i stykker eller revnede.	Erstat med originale reservedele eller kontakt Cobi Rehab.
Pumpenedbrud giver brugeren tryksår.	Kontakt brugerens læge, terapeut eller hjemmepleje med det samme.	Kontakt brugerens læge, terapeut eller hjemmepleje med det samme.

13. Warning code reference

PRIORITY HIGH ↓ LOW	WARNING CODE	INDICATOR LED	AUDIBLE OUTPUT MODE	WARNING DESCRIPTION	REMARKS
0	N/A	N/A	ONCE	Key Tone from Functional Buttons	Key Tone
1		Power Failure	ONCE	Shutdown	Shutdown
2		ALL LED	ONCE	All Indicators On	Power-On
3	N/A	N/A	ONCE	No Display	State/Mode Switching
4		Auto Firm	ONCE	Inflation Ended	Mattress Inflation Completion
5		Auto Firm	ONCE	Auto-Firm Ended	Auto-Firm Completion
6		Static	ONCE	Static Ended	Static Completion
7	N/A	Power Failure	REPEAT (Cycle 4 sec.)	No Display	Power Failure Alarm
8		Low Pressure	REPEAT (Cycle 4 sec.)	Inflation Failure	Power-On Inflation Failure Alarm
9		Low Pressure	REPEAT (Cycle 4 sec.)	Auto-Firm Failure	Auto-Firm Failure Alarm
10		Low Pressure	REPEAT (Cycle 4 sec.)	Low Pressure	Low Pressure Overtime Alarm
11		Turning Pressure	REPEAT (Cycle 4,5 sec.)	Turning Pressure Failure	Turning Pressure Low Pressure Overtime Alarm
12		Service	REPEAT (Cycle 4,5 sec.)	High Pressure	High Pressure Overtime Alarm
13		Service	REPEAT (Cycle 4,5 sec.)	High Temperature	High Ambient Temperature Alarm
14		Service	REPEAT (Cycle 4,5 sec.)	Air Valve 1 Failure	Air Valve 1 Positioning Failure Alarm
15		Service	REPEAT (Cycle 4,5 sec.)	Air Valve 2 Failure	Air Valve 2 Positioning Failure Alarm
16		Service	REPEAT (Cycle 15 sec.)	Low Battery	Low Battery Alarm
17		None	NONE	Lift-Up High	Lift-Up Angle >45° (315°)
18		None	NONE	Lift-Up Low	Lift-Up Angle >20° (315°)
19		Service	REPEAT	Service Indicator	
20		None	NONE	Calibration Uncompleted	Calibration Uncompleted
21		None	NONE	Calibration Completed	Calibration Completed

14. Tilbehørstabel

Tilbehør	Længde	Bredde	Højde	Varenummer
Betræk til Cobi Cura X10	200 cm	83 cm	19 cm	2700-999-019
Betræk til Cobi Cura X10	200 cm	85 cm	19 cm	2700-999-020
Betræk til Cobi Cura X10	200 cm	87 cm	19 cm	2700-999-021
Betræk til Cobi Cura X10	200 cm	90 cm	19 cm	2700-999-022
Hurtigpumpe til Cobi Cura X10 (ekskl. CPR-ventil og studsudtag)				2700-999-100
CPR-ventil Cobi Cura X5 og X10				2700-999-029
Studsudtag komplet til Cobi Cura X5 og X10				2700-999-058



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



FABRIKANT

AKTC

Airkinetic Technologies Corp.
NO. 3, Gongye 5th RD.,
Pingzhen District, Taoyuan
City 324, Taiwan
tel: 886-3-4194567

aktc.com.tw

DISTRIBUTØR

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
cobi@cobi.dk

cobirehab.com