



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

4-punkt stok

Stærk og funktionel 4-punkt stok udviklet til den bariatriske bruger.

4-punkt stok er beregnet til brugere, der vejer op til 270 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	5
5. Indstilling	5
6. Langtidsopbevaring	6
7. Rengøring og vedligeholdelse	6
8. Bortskaffelse.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Bestilling.....	8

1. Sikkerhed



ADVARSEL

4-punkt stok må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af 4-punkt Stok. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før 4-punkt Stok tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af 4-punkt Stok.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis stokken er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller uheldige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.




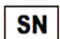














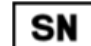



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

4-punkt stok må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af stokken. Forkert indstilling kan skade brugeren.

4-punkt stok kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 270kg

2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på stokken. Eksempel på label kan ses herunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab 4 point cane 0201-000-000			270 KG
	0050808		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af 4-punkt stok. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om 4-punkt stok.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

4-punkt stoks UDI-nummer fremgår af labelen på stokken.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anvendelse

4-punkt stok er en ekstra forstærket stok med en 4-punkts base, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for brugere, der vejer op til 270 kg.

⚠ 4-punkt stok kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 270 kg.

4-punkt stok bruges på hospitaler, i plejeboliger og private hjem. 4-punkt stok kan bruges indendørs og udendørs.

Konsulter altid en terapeut før, der anvises en 4-punkt stok til en bruger.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af produktet.

5. Indstilling

Stokken er udstyret med to udløserknapper på stokkens skaft til højdeindstilling.

Før brug skal højden på stokken justeres ved at trykke på de to udløserknapper.

⚠ 4-punkt stok må ikke bruges, før de to udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt på plads.

Inderrøret kan løsne sig, hvis ikke clipsen sidder korrekt. Det kan betyde, at inderrøret kan glide ned yderrøret.

6. Langtidsopbevaring

4-punkt stok bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

7. Rengøring og vedligeholdelse

7.1 Rengøring og desinficering

4-punkt stok kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

4-punkt stok kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Desinficer altid 4-punkt stok, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå

krydskontamination. Lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

De to udløserknapper skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af de to udløserknapper som anvist kan forårsage funktionsfejl.

8. Bortskaffelse

Når 4-punkt stok ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at 4-punkt stok er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på stokken ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for 4-punkt stok er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

Garantien omfatter ikke:

- sliddele.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af 4-punkt stok, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at 4-punkt stok er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse kan skade produktet, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke 4-punkt stok ydeevne.

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

Maksimum brugervægt	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	1,5 kg
Base mål	15 x 22 cm
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 16 - 03
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102858
Grundlæggende UDI	5740000100010MV
Overfladetemperaturen på 4-punkt stok kan stige eller falde, hvis stokken udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

11. Bestilling

Model	HMI-nummer	Varenummer
4-punkt stok	42617	0201-000-000



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com