

Tumle kudden

Bruksanvisning kortversion

Denna bruksanvisning avser Tumle kudden och tillbehör med artikelnummer som börjar med 0305- och slutar med -000, -120, -010, -015, -020. Artikelnumret finns angivet på produktetiketten.

TUMLE kudden består av en vattentät innerkudde i polyuretanbelagd polyester och är fylld med polystyrenkulor. Som tillbehör finns bomullsöverdrag, hygienöverdrag och EKO överdrag.

TUMLE kudden tillsammans med bomullsöverdrag är testad och godkänd enligt brandtest ISO 12952-1.

TUMLE kudden tillsammans med hygienöverdrag är testad och godkänd enligt brandtest ISO 12952-1 och ISO 12952-2.

För rengöring torkas innerkudden av med vanligt förekommande rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. Kudden får inte sänkas ner i vatten.

Desinfektion på innerkudde och hygienöverdrag sker med vanligt förekommande desinfektionsmedel innehållande tensider, till exempel Ytdesinfektion eller Virkon.

Det är viktigt att ytan bearbetas (gnuggas) för bästa effekt.

Kontrollera desinfektionsmedlets egna rekommendationer gällande handhavande.

Var uppmärksam på att inte använda desinfektionsmedel eller rengöringsmedel som har ett PH värde över 11,4.

Använd ej lösningsmedel eller produkter innehållande lösningsmedel.

Bomullsöverdrag kan maskintvättas upp till 60° C och torktumlas.

Vid tvätt över 60°C kan färgen blekas och tyget kan krympa upp till 5%. Tvätta bomullsöverdraget tillsammans med liknande färger.

Hygienöverdraget tål tvätt och torktumling upp till 95°C och alla industriella maskintvättmedel. Använd INTE sköljmedel. Hygienöverdraget har en beläggning för att stå emot väta. Vid maskintvätt rekommenderas att man tvättar tillsammans med textilier utan denna beläggning för tillräcklig transport av vatten.

EKO överdrag kan maskintvättas upp till 60° C.

Den vita innerkudden får INTE tvättas i tvättmaskin. Undvik skarpa kanter och föremål mot kuddarna.

Trots hög komfort och mycket god tryckfördelning är TUMLE kudden inte en antidecubitusprodukt.

Var noga med att kuddarna inte blockerar andningsvägarna.

Kuddar och tillbehör är märkta med artikelnummer, produktnamn, tvättanvisningar och streckkod, samt anger år och månad för tillverkning.

Kudden med tillbehör kan deponeras som vanligt hushållsavfall.

MATERIAL

Fyllning: polystyrenkulor

Innerkudden: Polyuretanbelagd polyester som ångandas utan att släppa igenom vätska. Mögel och svampresistent. Allergitestat.

Bomullsöverdrag: 100% GOTS certifierad bomull

Hygienöverdrag: samma material som innerkudden

EKO överdrag: PU belagd cellulosaväv

Tumlekudden har ISO-kod 044827 och 090706-02

UDI-DI: 5740000100014N5



Viktig information om Tumlekudden

Tumlekudden ger ett enkelt, flexibelt och stabilt sätt att positionera en person under dygnets alla timmar.

Tumlekudden är i första hand till för personer som har svårt för att själv ändra sin ställning. Det är viktigt att assistera dessa personer så att de kan variera sin viloställning över hela dygnet. Muskler och leder behöver variation för att inte stelna till. Tumlekudden är också bra att använda till personer som är väldigt spända, har problem med smärta, felställningar, är sneda i kroppen och/eller oroliga.

Med hjälp av Tumlekudden kan man ge en person en bekväm och stabil ställning i så naturlig position som möjligt.

Det är viktigt att se till en persons hela dygn när man positionerar. För att orka sitta uppe en hel dag krävs det en natt med god sömn. Ibland kan det vara viktigare att titta på hur en person ligger på natten för att få till ett bra sittande på dagen.

Tumlekudden finns i många olika modeller och storlekar och passar både till barn och vuxna. Fyllningen i Tumlekudden består av mycket små kulor. Det är enkelt att placera Tumlekudden på önskat ställe. Kulorna gör att kudden automatiskt och individuellt formar sig efter personen och underlaget. Mängden fyllning i Tumlekudden är väl avvägt för att kudden ska kunna anpassa sig till person och underlag och vara flexibel i många olika situationer. Om man skulle vilja ha mer fyllning på ett specifikt ställe kan man skaka Tumlekudden så att fyllningen flyttar på sig. Önskar man finjustera fyllningsmängden kan man göra det genom att dra med handen över Tumlekudden för att flytta fyllningen. Tänk på att en för fylld kudde gör att en person inte sjunker ner tillräckligt i kudden utan blir liggande upp på kudden, vilket medför att man inte får en så bra avlastning.

Tumlekuddens överdrag är i Oeko-tex certifierad bomull. Bomullen gör att Tumlekudden känns behaglig mot huden och får Tumlekudden att ligga kvar där den blir placerad. Vi rekommenderar att Tumlekudden alltid används tillsammans med bomullsöverdraget.

Tumlekuddens material och konstruktion medverkar för att få en stabil kudde som till viss del är elastisk utan att det medför att kudden kan tryckas undan på grund av att materialet ger efter.

Tumlekudden är ett komplement till rätt inställd rullstol och säng inklusive lämplig sittdyna och madrass. Tänk på att personers behov av positionering och Tumlekuddar kan ändras över tid. Tala med ansvarig person om det upplevs att något har förändrats.

Alla personer behöver röra sig och det är fortsatt viktigt när en person helt eller delvis förlorar förmågan att viljemässigt röra sig.

Behovet av att lägesändra finns fortfarande kvar även när man använder Tumlekuddar.

När man använder TUMLE kudden är huvudsyftet att få en bra och skön viloställning genom att ge förutsättningar för en avlastad och avslappnad position.