



GEBRAUCHSANLEITUNG

Bariatrischer Gehstock

Starker und funktionaler Gehstock, der für den bariatrischen Benutzer entwickelt wurde.

Der bariatrische Gehstock ist für Benutzer mit einem Körpergewicht von bis zu 270 kg ausgelegt.



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit	3
2. Symbolerklärung	4
5. Einstellung	5
3. Allgemeines.....	5
4. Verwendung	5
6. Langfristige Aufbewahrung	6
8. Entsorgung.....	6
7. Reinigung und Hinweise zur Bedienung.....	6
9. Garantie	7
10. Spezifikationen	8
11. Bestellung.....	8

1. Sicherheit



WARNUNG

Der bariatrische Gehstock darf nicht ohne gründliche Einweisung durch geschultes Personal oder durch Personen, die im Umgang mit dem bariatrischen Gehstock unterwiesen wurden, benutzt werden. Die unsachgemäße Verwendung des bariatrischen Gehstocks kann zu Verletzungen des Benutzers führen.

Die Gebrauchsanleitung muss vor der Verwendung des bariatrischen Gehstocks sorgfältig gelesen werden. Beachten Sie insbesondere die mit  gekennzeichneten Sicherheitshinweise.

Cobi Rehab übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden am Produkt oder für Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des bariatrischen Gehstocks entstehen.

Kontaktieren Sie Cobi Rehab umgehend, wenn der bariatrische Gehstock beschädigt ist oder Mängel aufweist. Verwenden Sie niemals eigene Ersatzteile.

Cobi Rehab kann nicht für Schäden oder unangemessene Situationen verantwortlich gemacht werden, die durch Reparaturen entstehen, die ohne die schriftliche Genehmigung von Cobi Rehab durchgeführt wurden.



SICHERHEITSHINWEISE

Der bariatrische Gehstock darf nur von geschultem Personal oder von Personen, die in den Gebrauch des Gehstocks eingewiesen wurden, eingestellt werden. Eine falsche Einstellung kann dem Benutzer Schaden zufügen.

Der bariatrische Gehstock kann brechen oder beschädigt werden, wenn er von einem Benutzer mit einem Gewicht von über 270 kg verwendet wird.

Der bariatrische Gehstock darf erst benutzt werden, wenn die beiden Entriegelungsknöpfe der Höhenverstellung vollständig eingerastet sind. Das Innenrohr kann sich lösen, wenn die Entriegelungsknöpfe nicht korrekt eingerastet sind. Dies kann dazu führen, dass das Innenrohr im Außenrohr herunterrutschen kann.

2. Symbolerklärung

Die folgenden Symbole finden Sie in der Gebrauchsanleitung oder auf dem Produktetikett.	
	Warnung!
	Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
	Cobi-Artikelnummer
	Seriennummer
	Produktionsjahr
	Hersteller
	Medizinprodukte, Klasse 1
	Benutzergewicht
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung
Die CE-Kennzeichnung ist auf dem bariatrischen Gehstock angebracht. Ein Beispiel für diese Kennzeichnung ist unten zu sehen.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Walking cane 0200-000-000			270 KG
	0050808		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Allgemeines

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen über die Zielgruppe und den Gebrauch des bariatrischen Gehstocks. Die Gebrauchsanleitung enthält auch eine Liste mit den Spezifikationen.

Die aktuellste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Website. Prüfen Sie, ob die jetzt vorliegende Version die neueste ist.

Wenn Sie eine Gebrauchsanleitung in einer größeren Schriftgröße benötigen, steht Ihnen das Produktblatt im PDF-Format auf cobirehab.com zur Verfügung, bei dem die Schriftgröße skalierbar ist.

Sie können sich jederzeit über die Telefonnummer +45 7025 2522 an Cobi Rehab wenden, wenn Sie weitere Informationen über den bariatrischen Gehstock wünschen.

Cobi Rehab behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die UDI-Nummer des bariatrischen Gehstocks ist auf dem Etikett des Gehstocks angegeben.

Produktsicherheitshinweise und Produktrückrufe finden Sie auf der Website <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Verwendung

Beim bariatrischen Gehstock handelt es sich um einen extra verstärkten Gehstock, der speziell entwickelt wurde, um Benutzern mit einem Gewicht von bis zu 270 kg Unterstützung und Sicherheit beim Gehen zu bieten.

⚠ Der bariatrische Gehstock kann brechen oder beschädigt werden, wenn er von einem Benutzer mit einem Gewicht von über 270 kg verwendet wird.

Der bariatrische Gehstock wird in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Privathaushalten eingesetzt.

Der Bariatrische Gehstock kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

Lassen Sie sich immer von einem Therapeuten beraten, bevor Sie einem Benutzer einen bariatrischen Gehstock zuweisen.

Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen in Verbindung mit der Verwendung des bariatrischen Gehstocks.

5. Einstellung

Der bariatrische Gehstock ist mit zwei Entriegelungsknöpfen am Stockenschaft zur Höhenverstellung ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Gebrauch die Höhe des bariatrischen Gehstocks ein, indem Sie die beiden Entriegelungsknöpfe drücken.

⚠ Der bariatrische Gehstock darf erst dann benutzt werden, wenn die beiden

Entriegelungsknöpfe der Höhenverstellung vollständig eingerastet sind.

Das Innenrohr kann sich lösen, wenn der Clip nicht korrekt sitzt. Dies kann dazu führen, dass das Innenrohr im Außenrohr herunterrutschen kann.

6. Langfristige Aufbewahrung

Der bariatrische Gehstock sollte im Dunkeln und bei Temperaturen zwischen -10 °C und +50 °C aufbewahrt werden.

7. Reinigung und Hinweise zur Bedienung

Der bariatrische Gehstock kann mit Wasser und einem herkömmlichen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Prüfen Sie die beiden Entriegelungsknöpfe regelmäßig und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

⚠ Wenn die beiden Entriegelungsknöpfe nicht wie vorgeschrieben geprüft werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Desinfektion

Bariatrische Gehstöcke können auch mit z. B. Wet Wipe 70 % oder einem chlorhaltigen Produkt mit einer Chlorkonzentration von 1000-1200 ppm desinfiziert werden.

⚠ Desinfizieren Sie den bariatrischen Gehstock vor jedem Benutzerwechsel. Dies ist wichtig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Etwaige lokal geltende Vorschriften zur Reinigung und Wartung sind unbedingt einzuhalten.

8. Entsorgung

Wenn der bariatrische Gehstock nicht mehr verwendet wird, muss er umweltgerecht entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Cobi Rehab oder Ihre Gemeinde, um weitere Informationen zur Entsorgung zu erhalten.

9. Garantie

Cobi Rehab garantiert, dass der bariatrische Gehstock bei Lieferung frei von Mängeln ist. Sollte der Gehstock wider Erwarten beim Erhalt Mängel aufweisen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an Cobi Rehab.

Die Garantiezeit für den Gehstock beträgt ab Kaufdatum ein Jahr und deckt Fabrikationsfehler oder Mängel zum Zeitpunkt der Lieferung ab. Die Rechnung dient als Garantienachweis.

Die Garantie gilt nicht:
- für Produkte, bei denen die Seriennummer, Chargennummer o. ä. entfernt oder wesentlich beschädigt wurde.

- für Produkte, die durch nicht autorisiertes Personal repariert wurden.

Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:
- Verschleißteile.

9.1 Unbeabsichtigtes Ereignis

Jeder Vorfall, der in Verbindung mit der Verwendung des bariatrischen Gehstocks auftritt, muss Cobi Rehab gemeldet werden.

9.2 Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer ist es wichtig, dass vor der weiteren Verwendung eine Gesamtprüfung des Produkts vorgenommen wird.

Nach Ablauf der erwarteten Lebensdauer kann Cobi Rehab keine Garantie für die Eignung und Sicherheit des Produkts übernehmen, da Cobi Rehab keinen Einfluss darauf hat, wie das Produkt verwendet und abgenutzt wird.

Die Garantie gilt nicht, wenn Cobi Rehab feststellt ist, dass der bariatrische Gehstock in unsachgemäßer Weise behandelt wurde.

Bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch werden sowohl der Service als auch die verwendeten Ersatzteile in Rechnung gestellt.

Cobi Rehab kann nicht für Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden.

⚠ Mangelnde Wartung kann den bariatrischen Gehstock beschädigen, seine Haltbarkeit verkürzen oder die Leistung des bariatrischen Gehstocks beeinflussen oder beeinträchtigen.

10. Spezifikationen

Maximales Benutzergewicht	270 kg
Höhenverstellbar	710-930 mm
Gewicht	0,9 kg
Reflektoren	Ja
Material	Chrom-Molybdän-Stahl/SAE41-30
Griff	TPR - Thermoplastischer Gummi
ISO-Klassifizierung	ISO 12 03 03 - 05
Lebenserwartung des Produkts	7 Jahre
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102810
Basis-UDI	5740000100010MV
Die Oberflächentemperatur des bariatrischen Gehstocks kann steigen oder fallen, wenn er äußeren Kälte- und Wärmeeinflüssen ausgesetzt ist.	

11. Bestellung

Modell	Artikelnummer
Bariatrischer Gehstock	0200-000-000



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



HERSTELLER UND HÄNDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Dänemark
+45 7025 2522
cobirehab.com