



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUKSANVISNING

Bariatrisk armbågsstycka

Stark och funktionell armbågsstycka, utvecklad till den bariatrisk användaren.

Armbågsstyckan är anpassad till användare som väger upp till 325 kg.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

Innehållsförteckning

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Säkerhet..... | 3 |
| 2. Symbolförklaring..... | 4 |
| 3. Generellt | 5 |
| 4. Användning..... | 5 |
| 5. Inställning..... | 5 |
| 6. Långtidsförvaring | 6 |
| 7. Rengöring och underhåll | 6 |
| 8. Bortforsling | 6 |
| 9. Garanti..... | 7 |
| 10. Specifikationer | 8 |
| 11. Beställning..... | 8 |

1. Säkerhet

VARNING

Armbågskryckan får inte användas utan en grundlig instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i hur armbågskryckan används. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas noggrant innan armbågskryckan tas i bruk. Var speciellt uppmärksam vid säkerhetsvägledningar markerade med .

Cobi Rehab tar inget ansvar för eventuella skador på produkten eller vid personskador som förorsakats av felaktig användning av armbågskryckan.

Kontakta Cobi Rehab omgående om armbågskryckan är skadad eller har konstruktionsfel. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för olämpliga situationer som uppstår efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.

SÄKERHETSVÄGLEDNING




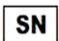



Armbågskryckan får endast ställas in av personal eller av personer som fått en instruktion i bruket av armbågskryckan. Felaktiga inställningar kan skada användaren.












Armbågskryckan kan ta skada om den används av en användare som väger över 325 kg.

Armbågskryckan får inte användas innan knappen i snäpplåset till höjdinställningen är helt på plats. Det inre röret kan lossa om inte knappen i snäpplåset sitter korrekt. Det kan leda till att det inre röret faller in i det yttre röret.

Brist på kontroll av snäpplåset till höjdinställningen kan förorsaka funktionsfel.

2. Symbolförklaring

| Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett. | |
|---|--|
|  | Varning! |
|  | Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter EU 2017/745 |
|  | Cobi Rehab artikelnummer |
|  | Serienummer |
|  | Produktionsår |
|  | Tillverkare |
|  | Medicinsk utrustning klass 1 |
|  | Användarvikt |
|  | Läs manual |
| CE-Etiketten är placerad på armbågskryckans rör. Exempel på etikett kan ses nedan. | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  | Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522 |  |  |  |
|  | XXL-Rehab Crutch, right 0205-000-000RC |  |  | 325 KG |
|  | 0050808 |  | MADE IN TAIWAN | |
|  | 2020 |  | | |

3. Generellt

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om målgruppen för och användningen av armbågs-kryckan. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av bruksanvisningen finner du på vår hemsida. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Har du behov av en bruksanvisning med större text, finns bruksanvisningen i PDF-format på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp bruksanvisningen i textstorlek.

Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar mera upplysningar om armbågs-kryckan.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varsel.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkter kan ses på vår hemsida under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

4. Användning

Armbågs-kryckan är en extra förstärkt krycka som är speciellt utvecklad till att ge stöd och säkerhet under gång till användare som väger upp till 325 kg.

⚠ Armbågs-kryckan kan ta skada om den används av personer som väger över 325 kg.

Armbågs-kryckan används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem.

Armbågs-kryckan kan användas både inomhus och utomhus.

Rådfråga alltid en förskrivare innan armbågs-kryckan rekommenderas till en användare.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med bruket av armbågs-kryckan.

5. Inställning

Armbågs-kryckan ställs in i höjd genom att knappen i snäpplåset tas ur och det inre röret sätts i önskad längd. Tryck in knappen i hålet och tryck den sedan på plats.

Armbågs-kryckan får inte användas om knappen i snäpplåset inte är helt på plats.

Det inre röret kan lossna om inte knappen i snäpplåset sitter korrekt. Det kan få till följd att det inre röret glider in i det yttre röret.

6. Långtidsförvaring

Armbågs-kryckan bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50° C.

7. Rengöring och underhåll

Armbågs-kryckan kan rengöras med vatten och vanligt rengöringsmedel.

Snäpplåset till höjdinställningen ska regelbundet kontrolleras och bytas ut om det är nödvändigt.

⚠ Brist av kontroll av låsknappen till höjdinställningen kan förorsaka funktionsfel.

Desinficering

Armbågs-kryckan kan desinficeras med yt-desinfektion eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficera alltid armbågs-kryckan innan den ska användas av en ny person för att undvika kors-kontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

8. Bortforsling

När armbågs-kryckan inte längre används ska den bortforslas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information om bortforsling.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterar att armbågsstycket är felfri när den levereras. Skulle den mot förmodan vara felaktig eller skadad vid leverans, kontakta Cobi Rehab omgående.

Garantiperioden för armbågsstycket är ett år från dagen för köpet och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller ej:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller är väsentligt skadat.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad personal.

Garantin omfattar ej:

- slitagedelar

9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av armbågsstycket ska rapporteras till Cobi Rehab.

9.2 Efter förväntad livslängd


Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd och hur sliten den är.

Garantin gäller ej i de fall Cobi Rehab bedömer att armbågsstycket blivit felaktigt hanterat eller på olämpligt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

 Brist på underhåll kan skada armbågsstycket, förkorta livslängden eller påverka styckets prestanda.

10. Specifikationer

| | |
|--|---|
| Max användarvikt | 325 kg |
| Höjjusterbar | 68-110 cm |
| Vikt | 1,5 kg |
| Reflex | Ja |
| Underarmsstöd | 15 cm |
| Handtag | 14 cm |
| Anatomiskt handtag | Ja |
| Material | Krom Molybdenstål |
| Grepp | Nylon |
| ISO - klassifikation | ISO 12 03 06 - 04 |
| Produktens förväntade livslängd | 7 år |
| Riskklass | I |
| UDI-DI | 5740000102889/5740000102896/5740000102902 |
| Grundläggande UDI | 5740000100010MV |
| Yttemperaturen på armbågsstycket kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla och värme. | |

11. Beställning

| Modell | Artikelnummer |
|---|----------------|
| Bariatrisk armbågsstycke med standard handtag | 0205-000-000C |
| Bariatrisk armbågsstycke med anatomiskt handtag höger | 0205-000-000RC |
| Bariatrisk armbågsstycke med anatomiskt handtag vänster | 0205-000-000LC |



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



TILLVERKARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com

LEVERANTÖR

Cobi Rehab
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
Tel 08-702 97 74
cobirehab.se