



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

Badetoiletstol Clean

Stærk og funktionel badetoiletstol udviklet til den bariatriske bruger.

Badetoiletstol Clean er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.


Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	5
5. Indstilling	5
6. Langtidsopbevaring	6
7. Rengøring og vedligeholdelse	6
8. Bortskaffelse	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Bestilling.....	8

1. Sikkerhed

ADVARSEL

Badetoiletstol Clean må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Badetoiletstol Clean. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Badetoiletstol Clean tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med .

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Badetoiletstol Clean.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis Badetoiletstol Clean er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller u hensigtsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Badetoiletstol Clean må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Badetoiletstol Clean. Forkert indstilling kan skade brugeren.

Badetoiletstol Clean kan vælte eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 325kg.

Badetoiletstol Clean må ikke bruges i bassiner eller swimmingpools.

Brug kun Badetoiletstol Clean på hårdt underlag med en maksimal hældning på 3°, da Clean ellers kan vælte.




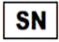





Badetoiletstol Clean skal monteres korrekt inden brug. Se under **Indstilling**.












Desinficer altid Badetoiletstol Clean, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Manglende kontrol af bolte, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Mangel på vedligeholdelse kan skade Badetoiletstol Clean, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Badetoiletstol Cleans ydeevne.

2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på Badetoiletstolens ramme. Eksempel på label kan ses herunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Clean, 61cm 0142-061-000			325 KG
	0051783		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Badetoiletstol Clean. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes brugervejledningen i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Badetoiletstol Clean.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Badetoiletstolens UDI-nummer fremgår af labelen på badetoiletstolen.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anvendelse

Badetoiletstol Clean bruges til toiletbesøg og til badesituationer i vådrumsmiljøer (fx bruserum).

⚠ Badetoiletstol Clean kan vælte eller tage skade, hvis den anvendes af brugere over 325 kg.

Badetoiletstol Clean bruges på hospitaler, i plejeboliger, i eget hjem og på institutioner.

Badetoiletstol Clean må ikke bruges i bassiner eller i swimmingpools.

Konsulter altid en terapeut før Badetoiletstol Clean anvises til en bruger.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af Badetoiletstol Clean.

5. Indstilling

Montering af Badetoiletstol Clean

Clean består af to dele, stolens ramme og ryglæn.

1. Sæt en skive på hver bolt. Fastgør ryglænet til stolens ramme ved at indsætte de fire bolte og skiver i huller, to på hver side. Stram dem godt med den medfølgende sekskantet unbrakonøgle.

Justering af sædedybde og ryglæn

1. Sædedybden kan justeres i tre positioner. Vælg to huller (forreste, midterste eller bageste) på ryglænet for den ønskede sædedybde. Se instruktionerne ovenfor.

Justering af benenes højdeindstillinger

1. Højden på benene kan justeres i seks positioner ved at løsne og stramme de fire bolte, der allerede er monteret på benene. Brug begge sekskantnøgler, når du justerer.

Værktøjer til brug

To unbrakonøgler med 5 mm sekskant, fire skruer med indvendig sekskant og fire skiver.

Under brug

Sæderyggen kan indstilles i tre forskellige dybder. Justering af sædedybden påvirker ikke stolens stabilitet.

6. Langtidsopbevaring

Badetoiletstol Clean bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Badetoiletstol Clean kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af bolte, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Desinficering

Badetoiletstol Clean kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficer altid Badetoiletstol Clean, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

8. Bortskaffelse

Når Badetoiletstol Clean ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Badetoiletstol Clean er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Badetoiletstol Clean ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Badetoiletstol Clean er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Badetoiletstol Clean, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum


Garantien omfatter ikke:

- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Badetoiletstol Clean er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art.

 Mangel på vedligeholdelse kan skade Badetoiletstol Clean, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Badetoiletstol Cleans ydeevne.

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

Brugervægt maks.	325 kg
Sædebredde	61/71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Afstand mellem armlæn	65/75
Totalbredde over armlæn	73/83 cm
Totalhøjde	79-94 cm
Totallængde (fra fod til rygbøjlen)	80-101 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Ramme	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Vægt (61 cm/71 cm)	14/15 kg
ISO - klassifikation	ISO 09 33 07 03
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000101288/5740000101295
Grundlæggende UDI	5740000100003MY
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182
Overfladetemperaturen på Clean kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

11. Bestilling

Model	HMI-nummer	Varenummer
Bariatrisk Badetoiletstol Clean, 61 cm	52000	0142-061-000
Bariatrisk Badetoiletstol Clean, 71 cm	52001	0142-071-000



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com