



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

Bariatrisk Stand Tall Gangbord

Stærkt og funktionelt gangbord udviklet til den bariatriske bruger.

Stand Tall Gangbord er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
4. Anvendelse.....	5
3. Generelt	5
5. Indstilling	5
6. Langtidsopbevaring	6
7. Rengøring og vedligeholdelse	6
8. Bortskaffelse.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Bestilling.....	8

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Stand Tall Gangbord må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Stand Tall Gangbord. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Stand Tall Gangbord tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Stand Tall Gangbord.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis Stand Tall Gangbord er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller uheldige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Stand Tall Gangbord må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Stand Tall Gangbord. Forkert indstilling kan skade brugeren.

Stand Tall Gangbord kan tippe eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 325 kg.




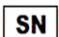





Stand Tall Gangbord skal anvendes på et plant, hårdt underlag med en maksimal hældning på 3,5 ° grader. Brug af gangbordet på større hældning end 3,5 ° grader forøger risikoen for tipning.









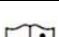


Når Stand Tall Gangbord bruges som støtte, dvs. hvis bruger rejser sig eller sætter sig ned, skal bremserne låses.

Bremserne kan være svære at aktivere for brugere med begrænsede fingerkræfter.

Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre fejlfunktion.

2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på Stand Tall Gangbords rør. Eksempel på label kan ses herunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Stand Tall 0180-076-000			325 KG
	0045418		MADE IN TAIWAN	
	2020			

3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Bariatrisk Stand Tall Gangbord. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Bariatrisk Stand Tall Gangbord.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Gangbordets UDI-nummer fremgår af labelen.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anvendelse

Stand Tall Gangbord er forsynet med fire vandrette, gennemgående bolte (to i hver side) til højdeindstilling af underarmsstøtter og håndstøtter. Boltene er låst med håndmøtrikker.

Stand Tall Gangbord bruges på hospitaler og i plejeboliger, hvor det giver støtte og tryk under gang for brugere op til 325 kg. Gangbordet er kun beregnet til indendørs brug.

⚠ Bruges gangbordet til brugere, der vejer mere end 325 kg kan gangbordet tippe eller tage skade.

⚠ Gangbordet skal anvendes på et plant, hårdt underlag med en maksimal hældning på 3,5° grader. Brug af gangbordet på større hældning end 3,5° grader forøger risikoen for tipning.

Bremserne skal efterses og justeres hver sjette måned.

Der kan monteres en IV-holder på Gangbordet. IV-holderen har en længde på 101 cm og sættes fast på ydersiden af ganggrammen ved hjælp af en rørholder. IV-holderen øger gangbordets bredde med max. 16 cm.

IV-holderen må kun påsættes ganggrammen af uddannet personale.

Konsulter altid en terapeut før Stand Tall Gangbord anvendes til en bruger.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen.

5. Indstilling

Sådan højdeindstilles Stand Tall Gangbord underarms- og håndstøtter:

- Skru håndmøtrikkerne af
- Træk de to vandrette bolte helt ud af rammen
- Sæt underarms- og håndstøtter i den ønskede position
- Stik boltene gennem rammen
- Skru håndmøtrikkerne fast på boltene.

Gangbordet må ikke benyttes, før håndmøtrikkerne er skruet fast på boltene, da underarms- og håndstøtterne kan løsne sig.

Vær opmærksom på, at boltenes buede hoveder ligger helt tæt på rammen, ellers kan håndmøtrikkerne ikke strammes korrekt.

Håndmøtrikkerne bør pege fremad på gangbordet for at undgå skade på brugeren.

Under brug

Bremserne låses ved at føre låsebøjlen ind over bremsehåndtagene, mens gangbordet holdes bremset.

⚠ Når gangbordet bruges som støtte, dvs. hvis brugeren rejser sig eller sætter sig ned, skal bremserne låses.

⚠ Bremserne kan være svære at aktivere for brugere med begrænsede fingerkræfter.

6. Langtidsopbevaring

Stand Tall Gangbord bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50°C.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Stand Tall Gangbord kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og efterspændes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af bolte kan forårsage funktionsfejl.

Desinficering

Stand Tall Gangbord kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficer altid Stand Tall Gangbord, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

8. Bortskaffelse

Når Stand Tall Gangbord ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Stand Tall Gangbord er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Stand Tall Gangbord ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Stand Tall Gangbord er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Stand Tall Gangbord, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

Garantien omfatter ikke:
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Stand Tall Gangbord er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse kan skade Stand Tall Gangbord, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Stand Tall Gangbord ydeevne.

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

Maksimum brugervægt	325 kg
Total længde	76 cm
Total bredde (med påsat IV-holder)	80-92 cm
Bredde indvendig mellem armlæn	59-69 cm
Gangbordets venderadius	2 meter
Højdejusterbar i 2,5 cm interval	100-130 cm
Vægt	20 kg
Massive hjul	Ja, 100 mm
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Underarmspuder	PU skum
ISO - klassifikation	ISO 12 06 12 - 06
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102520
Grundlæggende UDI	5740000100009NC
Overfladetemperaturen på Stand Tall Gangbord kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

11. Bestilling

Model	Bredde cm	Højde støtteanordning i cm	HMI-nummer	Varenummer
Bariatrisk Stand Tall Gangbord	Indvendig bredde mellem armlæn 59-69 Udvendigt bredde 80 Total bredde med IV-holder 92	Min. 100 maks. 130	47313	0180-076-000



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com