



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

Bariatrisk Patientstol/Spisebordsstol

Specialdesignet patientstol, der sikrer god siddekomfort til bariatriske brugere. Patientstol bruges i venteværelser, på hospitaler og institutioner og i private hjem.

Findes i to størrelser, 61 cm og 71 cm. Til brugere, der vejer op til 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Sikkerhed..... | 3 |
| 2. Symbolforklaring..... | 4 |
| 3. Generelt | 5 |
| 4. Anvendelse..... | 5 |
| 5. Indstilling | 5 |
| 6. Langtidsopbevaring | 6 |
| 7. Rengøring og vedligeholdelse | 6 |
| 8. Bortskaffelse..... | 6 |
| 9. Garanti..... | 7 |
| 10. Specifikationer | 8 |
| 11. Bestilling..... | 8 |

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Patientstol må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Patientstol. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Patientstol tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Patientstol.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis Patientstol er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller u hensigtsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Patientstol må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Patientstol. Forkert indstilling kan skade brugeren.

Patientstol kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 325kg.

Patientstol må kun bruges på hårdt underlag med en maksimal hældning på 3°.

Overfladetemperaturen på Patientstol kan stige eller falde, hvis stolen udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.




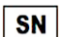





Patientstol skal monteres korrekt inden brug.







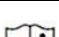


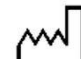

Manglende kontrol af bolte til højdeindstilling, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Desinficer altid Patientstol, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Mangel på vedligeholdelse kan skade Patientstol, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Patientstolens ydeevne.

2. Symbolforklaring

| Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label. | |
|--|--|
|  | Advarsel! |
|  | Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745 |
|  | Cobi varenummer |
|  | Serienummer |
|  | Produktionsår |
|  | Fabrikant |
|  | Medicinsk udstyr, klasse 1 |
|  | Brugervægt |
|  | Læs manual |
| CE-Label er placeret på Patientstolens ramme. Eksempel på label kan ses herunder. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  | Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522 |  |  |  |
|  | XXL-Rehab Patient Chair, 61 0160-061-000 |  |  | 325 KG |
|  | 0050810 |  | MADE IN TAIWAN | |
|  | 2020 |  | | |

3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Patientstol. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes brugervejledning i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Patientstol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Patientstolens UDI-nummer fremgår af labelen på Patientstol.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anvendelse

Patientstol er en stærk stol, der giver god siddekomfort for bariatriske brugere op til 325 kg. Patientstol findes med sædebredde str. 61 cm og 71 cm.

Patientstol er udstyret med et bredt sæde som sammen med de buede armlæn sikrer god plads mellem armlæne. Sædedybden kan endvidere justeres i tre forskellige dybder.

Udformningen af ryg og sæde gør, at brugeren kan komme helt tilbage i sædet, hvilket er en hjælp, når stolen bruges som spisebordsstol.

⚠ Patientstol kan vælte eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger over 325 kg.

Patientstol bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Patientstol er beregnet til indendørs brug.

⚠ Patientstol må kun bruges på hårdt underlag med en maksimal hældning på 3°.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af Patientstol.

5. Indstilling

Montering af Patientstol

Patientstol består af to dele, stolens ramme og ryglænet.

1. Sæt en skive på hver bolt. Fastgør ryglænet til stolens ramme ved at indsætte de fire bolte og skiver i huller, to på hver side. Stram dem godt med den medfølgende sekskant unbrakonøgle.

Justering af sædedybde og ryglæn

1. Sædedybden kan justeres i tre positioner. Vælg to huller (forreste, midterste eller bageste) på ryglænet for den ønskede sædedybde. Se instruktionerne ovenfor.

Justering af benenes højdeindstillinger

1. Højden på benene kan justeres i seks positioner ved at løsne og stramme de fire bolte, der allerede er monteret på benene. Brug begge sekskantsnøgler, når du justerer.

Værktøjer til brug

To unbrakonøgler med 5 mm sekskant, fire skruer med indvendig sekskant og fire skiver.

Under brug

Sæderyggen kan indstilles i tre forskellige dybder. Justering af sædedybden påvirker ikke stolens stabilitet.

6. Langtidsopbevaring

Patientstol bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Patientstol kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af bolte, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Desinficering

Patientstol kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficer altid Patientstol, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

8. Bortskaffelse

Når Patientstol ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Patientstol er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Patientstol ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Patientstol er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

Garantien omfatter ikke:
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Patientstol er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen af art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse kan skade Patientstol, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Patientstolens ydeevne.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af albuestokken, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

| | |
|---|-----------------------------|
| Maksimum brugervægt | 325 kg |
| Sædebredde | 61/71 cm |
| Sædedybde justerbar | 40-52 cm |
| Sædehøjde justerbar | 44-59 cm |
| Afstand mellem armlæn | 65/75 |
| Totalbredde over armlæn | 73/83 cm |
| Totalhøjde | 79-94 cm |
| Totallængde (fra fod til rygbøjlen) | 80-101 cm |
| Sæde/ryg/armlæn | Polyuretan |
| Ramme | Krom molybdæn stål/SAE41-30 |
| Vægt (61 cm/71 cm) | 16,5/17,5 kg |
| ISO - klassifikation | ISO 18 09 03 14 |
| Produktets forventede levetid | 7 år |
| Risikoklasse | I |
| UDI-DI | 5740000102124/5740000102131 |
| Grundlæggende UDI | 5740000100003MY |
| Generelle krav og prøvningsmetoder | EN 12182 |
| Overfladetemperaturen på Patientstol kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger. | |

11. Bestilling

| Model | HMI-nummer | Varenummer |
|-------------------------------|------------|--------------|
| Bariatrisk Patientstol, 61 cm | 54767 | 0160-061-000 |
| Bariatrisk Patientstol, 71 cm | 54766 | 0160-071-000 |



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com