



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

BRUKSANVISNING

# Stödkäpp fyrfotad

**Stark och funktionell stödkäpp utvecklad för den bariatriska användaren.**

**Stödkäppen är beräknad till användare upp till 270 kg.**



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

# Innehållsförteckning

1. Säkerhet.....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning.....	5
5. Inställning.....	5
6. Långtidsförvaring .....	6
7. Rengöring och underhåll .....	6
8. Bortforsling .....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer .....	8
11. Beställning .....	8

# 1. Säkerhet

---



## **VARNING**

Stödkäppen får inte användas utan noggrann instruktion från utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i bruket av stödkäppen. Vid felaktigt bruk kan användaren komma till skada.

Bruksanvisningen ska läsas noggrant innan stödkäppen tas i bruk. Rikta speciellt din uppmärksamhet mot säkerhetsvägledningar som är markerade med

Cobi Rehab tar inte ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador orsakade av ett felaktigt användande av stödkäppen.

Kontakta Cobi Rehab omgående om stödkäppen är skadad eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparation som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.




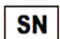


















## **SÄKERHETSVÄGLEDNING**

Stödkäpp fyrfotad ska ställas in av utbildad personal eller av personer som fått instruktion i bruket av stödkäppen. Felaktig inställning kan skada användaren.

Stödkäppen kan ta skada om den används av en person som väger mer än 270 kg.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om för medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi Rehab artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på gåbockens rör. Exempel på etikett kan ses nedan.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab 4 point cane 0201-000-000			270 KG
	0050808		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om målgruppen för och användningen av stödkäppen. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av bruksanvisningen finner du på vår hemsida. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Har du behov av en bruksanvisning med större text, finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp bruksanvisningen i textstorlek.

Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar mera upplysningar om stödkäpp fyrfotad.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varsel.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkter kan ses på vår hemsida under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning

---

Stödkäppen är en extra förstärkt stödkäpp med en 4-punkts bas, speciellt utvecklad till att stödja och ge säkerhet under gång för personer som väger upp till 270 kg.

⚠ Stödkäppen kan ta skada om den används av personer som väger mer än 270 kg.

Stödkäppen används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem och kan användas både inom- och utomhus.

Rådfråga alltid en förskrivare innan stödkäppen rekommenderas till en användare.

### Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med användandet av stödkäppen.

## 5. Inställning

---

Stödkäppen är utrustad med två tryckknappar för höjdinställning placerade på stödkäppens rör.

Justera stödkäppens höjd före användning genom att trycka in de två tryckknapparna.

⚠ Stödkäppen får inte användas innan tryckknappen till höjdinställningen är helt på plats.

Det inre röret kan lossna om inte tryckknappen för höjdinställningen sitter korrekt. Det kan leda till att den inre röret glider in i det yttre röret.

## 6. Långtidsförvaring

---

Stödkäpp fyrfota bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50° C.

## 7. Rengöring och underhåll

---

### 7.1 Rengöring och desinficering

Stödkäppen kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Stödkäppen kan också desinficeras med Ytdesinfektion eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

Desinficera alltid stödkäppen innan den ska användas av en ny person för att undvika

korskontaminering. Lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

Tryckknapparna för höjdinställning ska regelbundet kontrolleras och bytas ut vid behov.

⚠ Bristande kontroll av höjdinställningens tryckknappar kan förorsaka funktionsfel.

## 8. Bortforsling

---

När stödkäppen inte längre ska användas ska den bortforslas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information om bortforsling.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att stödkäppen är felfri när den levereras. Skulle den mot förmodan vara felaktig eller skadad vid leverans, kontakta Cobi Rehab omgående.

Garantiperioden för stödkäppen är ett år från och med dagen för köpet och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller ej:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller är väsentligt skadat.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad personal.

Garantin omfattar ej:

- slitagedelar.

### 9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av stödkäppen ska rapporteras till Cobi Rehab.

### 9.2 Efter förväntad livslängd


Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd och hur sliten den är.

Garantin gäller ej i de fall Cobi Rehab bedömer att stödkäppen blivit felaktigt hanterad.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan hållas ansvarig för skador av någon art.

 Brist på underhåll kan skada stödkäppen, förkorta livslängden eller påverka stödkäppens prestanda.

Den samlade värderingen av produkten ska göras av utbildad personal. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter.

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan värdering.

## 10. Specifikationer

---

Max användarvikt	270 kg
Höjjusterbar	71-93 cm
Vikt	1,5 kg
Mått vid basen	15 x 22 cm
Reflex	Ja
Material	Krom molybden stål
Handtag	Termoplast
ISO - klassifikation	ISO 12 03 16 - 03
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5740000102858
Grundläggande UDI	5740000100010MV
Yttemperaturen på stödkäppen kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

## 11. Beställning

---

Modell		Artikelnummer
Stödkäpp fyrfotad		0201-000-000





# **COBI REHAB**<sup>®</sup>

The Positioning Company

---



## **TILLVERKARE**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## **LEVERANTÖR**

**Cobi Rehab**  
Rålambsvägen 17  
11259 Stockholm  
  
08-702 97 74  
[WWW.cobirehab.se](http://WWW.cobirehab.se)